

Mode d'emploi de votre Microphone de table StarLink



Accessoire pour :

Aides auditives sans-fil

Félicitations !

Vous êtes sur le point d'améliorer votre expérience auditive.

Vous venez d'acquérir un Microphone de table.

Votre Microphone de table est conçu pour améliorer votre écoute dans le bruit en vous aidant à vous concentrer sur l'intervenant principal en présence de plusieurs interlocuteurs, lors d'une réunion ou d'un rassemblement familial par exemple. Il vous permet également de vous connecter au monde qui vous entoure.

Ce mode d'emploi simple vous en explique le fonctionnement.

Contenu

Contenu du coffret :

- Microphone de table
- Adaptateur secteur
- Câble USB-micro USB
- Options de branchement pour :
 - États-Unis
 - Europe
 - Australie
 - Royaume-Uni
- Pochette
- Écouteurs filaires avec embouts auriculaires
- Câble de streaming TV
- Crochet avec cordon
- Housse en silicone
- Mode d'emploi

Sommaire

1. Découvrez votre Microphone de table	
Présentation	8
Configuration.....	12
Fonctionnement.....	15
Recharge.....	25
2. Aide au dépannage	30
3. Informations complémentaires	
Utilisation prévue.....	34
Informations FCC.....	35
Informations réglementaires.....	37

Découvrez votre Microphone de table

- Présentation
- Configuration
- Fonctionnement
- Recharge

Présentation de votre Microphone de table

Présentation du Microphone de table

1. Prise micro-USB

- Rechargeable à l'aide du câble USB-micro USB.
- Diffuse l'audio via un câble de streaming TV.

2. Touches directionnelles tactiles

Sélection manuelle du fonctionnement unidirectionnel ou bidirectionnel.

3. Segments

- Indiquent la ou les directions sélectionnées.
- Témoins opérationnels montrant :
 - État de charge
 - Alimentation
 - Etat de la batterie
 - État du jumelage
 - Volume
 - Connectivité Line-In/Out

4. Signal de mode automatique

- Allumé = mode automatique.
- Éteint = mode Surround ou manuel.

5. Bouton de changement de mode

Permet de passer du mode automatique au mode Surround et inversement.

6. Bouton Marche/Arrêt

Permet d'**allumer/éteindre** le Micro de table.

Présentation de votre Microphone de table

7. Prise audio 3,5 mm

Pour connecter des écouteurs filaires.

8. Boutons Volume + et Volume -

Règle le volume du son transmis.

9. Microphones


Huit microphones intégrés pour capter la voix du locuteur.

10. Bouton de jumelage avec l'aide auditive

Permet le jumelage et la connexion aux aides auditives.

11. Interface magnétique pour crochet

Pour une utilisation en mode microphone déporté.

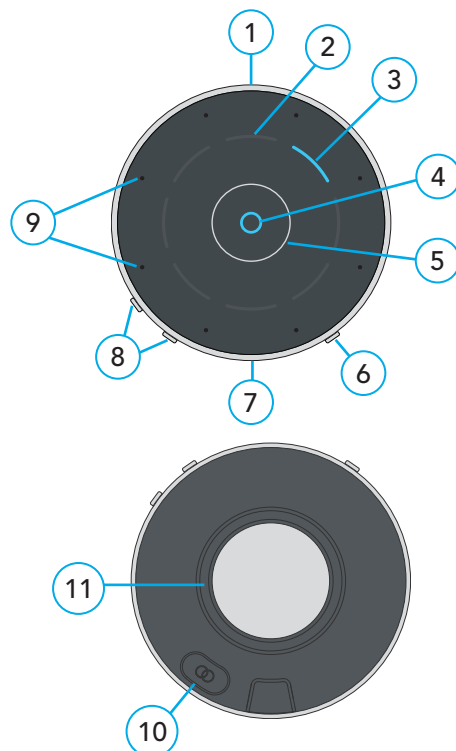


Présentation de votre Microphone de table

Présentation des écouteurs filaires

1. **Embouts auriculaires (petits/moyens/grands)**
Pour une adaptation personnalisée.
2. **Boutons Volume + et Volume –**
Règle le volume du son transmis.
3. **Bouton de changement de mode**
Permet de passer du mode automatique au mode Surround et inversement.
4. **Fiche audio 3,5 mm**
Permet de brancher le Microphone de table à la prise audio 3,5 mm.

Présentation de votre Microphone de table

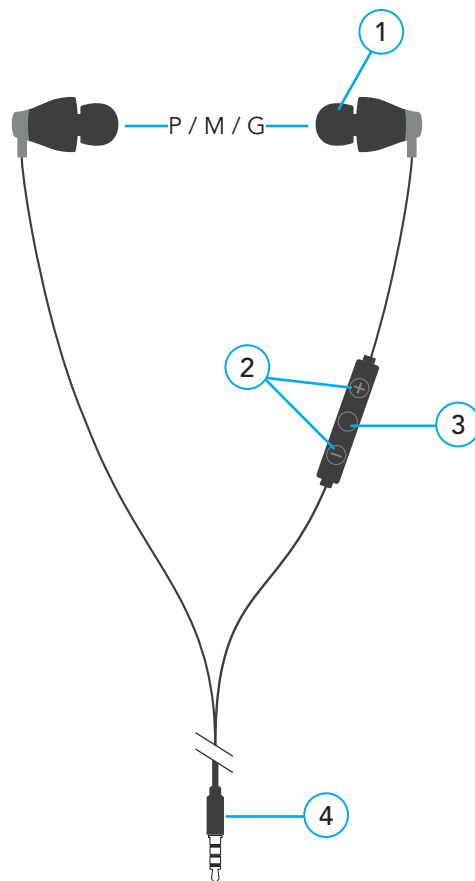


Configuration de votre Microphone de table

Marche/Arrêt

Utilisez le bouton Marche/Arrêt pour **allumer** ou **éteindre** votre Microphone de table :

- **Pour l'allumer** –

Appuyez 1 seconde sur le bouton Marche/Arrêt, puis relâchez. Les segments verts indiquent le niveau de charge de la batterie.

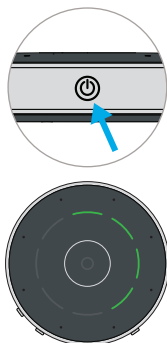

- **REMARQUE :**

Si le Microphone de table a besoin d'être rechargé, consultez la section « Recharge de votre Microphone de table » à la page 25.

- **Pour l'éteindre** – Appuyez 1 seconde sur le bouton Marche/Arrêt, puis relâchez.

Jumelage aides auditives :

Avant d'utiliser votre Microphone de table pour la première fois, vous devez le jumeler à votre ou vos aides auditives. Cela permet à votre accessoire de reconnaître vos aides auditives afin qu'ils puissent fonctionner ensemble.

ÉTAPE 1 : Allumez votre Microphone de table.


ÉTAPE 2 : Éteignez vos aides auditives puis rallumez-les.

- **Pour les systèmes CROS** : éteignez vos aides auditives et l'émetteur CROS. Puis **rallumez** vos aides auditives mais laissez l'émetteur CROS **éteint**.

Configuration de votre Microphone de table

ÉTAPE 3 : Jumelez votre Microphone de table et votre ou vos aides auditives :

1. Vérifiez que vos aides auditives ne sont pas connectées à des appareils Bluetooth® situés à proximité.
 - **Désactivez** le Bluetooth de votre téléphone portable.
 - **Désactivez** tout accessoire sans fil déjà jumelé à vos aides auditives.
2. Placez vos aides auditives à moins de 15 cm de votre Microphone de table.
3. Appuyez 2 secondes sur le bouton de jumelage avec une aide auditive et installez le Microphone de table face supérieure visible sur une surface stable. Les parenthèses bleues clignotantes indiquent que le Bluetooth® est prêt pour le jumelage.

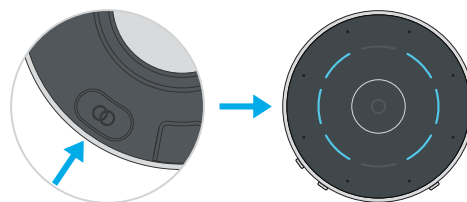

Configuration de votre Microphone de table

4. Pour une **paire** d'aides auditives :

Parenthèse gauche	Parenthèse droite	Statut jumelage	Étape suivante
()	Les deux aides auditives sont jumelées.	Terminé
()	Seule l'aide auditive gauche est jumelée.	Répétez les points 1 à 3 de l'ÉTAPE 3
()	Seule l'aide auditive droite est jumelée.	Répétez les points 1 à 3 de l'ÉTAPE 3
()	Aucune aide auditive jumelée.	Répétez les points 1 à 3 de l'ÉTAPE 3

5. Pour une aide auditive **unique** :

Parenthèse gauche	Parenthèse droite	Statut jumelage	Étape suivante
(Aide auditive gauche jumelée.	Terminé
)	Aide auditive droite jumelée.	Terminé
(Aide auditive gauche non jumelée.	Répétez les points 1 à 3 de l'ÉTAPE 3
)	Aide auditive droite non jumelée.	Répétez les points 1 à 3 de l'ÉTAPE 3

Terminé ! Passez à la page suivante pour commencer à utiliser votre Microphone de table.

Fonctionnement de votre Microphone de table

Votre Microphone de table est un dispositif d'assistance à l'audition doublé d'un émetteur TV. Il transmet le son directement dans vos aides auditives sans fil.

Principaux modes de fonctionnement :

- **Microphone de table** : diffuse la voix cible provenant d'une direction sélectionnée en utilisant les modes ci-dessous. Pour en savoir plus, voir la section *Diffusion des conversations en streaming* à la page 20.
 - Automatique
 - Manuel
 - Unidirectionnel
 - Bidirectionnel
 - Surround
- **Microphone déporté** : diffuse la voix de la personne qui porte le Microphone de table. Pour en savoir plus, voir la section *Comment porter votre Microphone de table* à la page 21.
- **Émetteur TV** : diffuse l'audio via la prise micro-USB line-in. Pour en savoir plus, voir la section *Streaming Audio TV* à la page 24.

REMARQUE : la portée de fonctionnement maximale est généralement de 20 mètres. Cette portée peut être réduite par des facteurs environnementaux tels qu'obstacles, interférences et position des personnes. S'il est possible d'atteindre une portée de fonctionnement plus importante, qualité du son et connectivité risquent d'en être impactées.

Fonctionnement de votre Microphone de table


Fonctionnement de votre Microphone de table :

ÉTAPE 1 : Vérifiez que vos aides auditives sont allumées.

Rappel – Avant d'utiliser le streaming audio pour la première fois, vérifiez que vos aides auditives sont bien jumelées à votre Micro de table. Voir page 12.

ÉTAPE 2 : Activer/désactiver le streaming audio

Pour cela, vous pouvez au choix utiliser :

- **Le Microphone de table** : en l'allumant, le streaming audio démarre automatiquement dans l'aide auditive.
- **Une application mobile pour aides auditives** : ouvrez l'application sur votre téléphone portable ou tablette. Sélectionnez l'option Démarrer/Arrêter le streaming sur l'écran **Accessoires**.
- **Une télécommande sans fil** : appuyez sur le bouton Favori si votre audioprothésiste l'a configuré. 
- **Un contrôle utilisateur d'aide auditive** : si votre audioprothésiste l'a configuré, un geste spécifique (ex : une pression longue sur un contrôle utilisateur) peut démarrer/arrêter le streaming.

REMARQUE : un signal sonore peut retentir dans vos aides auditives pour indiquer que le streaming audio démarre/s'arrête.

Fonctionnement de votre Microphone de table

ÉTAPE 3 : Réglez le volume du streaming.
Pour cela, vous pouvez au choix :

- Appuyer sur le **bouton Volume + ou Volume -** du Microphone de table.
- Déplacer le **curseur du volume** sur l'écran Accessoires de votre application mobile compatible.
- Appuyer sur le **bouton Favori** de votre **Télécommande sans fil**.*
- Appuyer ou taper sur les **contrôles utilisateurs de vos aides auditives**.*


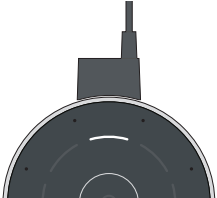
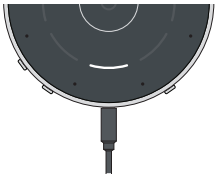


*Le contrôle de votre Microphone de table à l'aide de cette fonction doit être configuré par votre audioprothésiste.

Fonctionnement de votre Microphone de table

Segments




Les segments vous permettent d'identifier le mode de fonctionnement actuel de votre Microphone de table.

Opérationnel

	<p>Orientation du produit</p> <p>Pour une performance optimale, assurez-vous que les boutons de volume et de marche/arrêt sont face à vous.</p>
	<p>Line-in</p> <p>Le segment supérieur blanc indique une connexion line-in (p. ex., audio TV).</p>
	<p>Line-out</p> <p>Le segment inférieur blanc indique une connexion line-out (écouteurs).</p>
	<p>Volume +</p> <p>Le segment supérieur blanc clignote lorsqu'on augmente le volume.</p>
	<p>Volume -</p> <p>Le segment inférieur blanc clignote lorsqu'on baisse le volume.</p>

Fonctionnement de votre Microphone de table

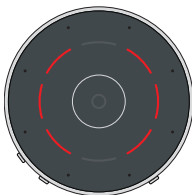


Jumelage d'une aide auditive

	<p>Parenthèses bleues clignotantes</p> <p>Recherche de votre/ vos aide(s) auditive(s).</p>
	<p>Parenthèses vertes continues</p> <p>Jumelage de l'aide auditive réussi.</p>
	<p>Parenthèses rouges continues</p> <p>Échec du jumelage de l'aide auditive.</p>

Consultez la page 12 pour en savoir plus sur le jumelage d'une paire d'aides auditives ou d'une aide auditive seule.

Fonctionnement de votre Microphone de table


Diffusion des conversations en streaming

	Automatique Témoin du mode automatique (O) : bleu continu. Un segment bleu indique une direction d'écoute active.
	Unidirectionnel/ bidirectionnel manuel Un ou deux segments en bleu indiquent la ou les directions d'écoute sélectionnées.
	Surround Tous les segments éclairés en bleu indiquent une écoute dans toutes les directions.

Fonctionnement de votre Microphone de table


Port du Microphone de table

La personne qui parle peut porter votre Microphone de table autour de son cou grâce au cordon et au crochet fournis. Le mieux est de le placer à moins de 20 cm de la bouche du locuteur.

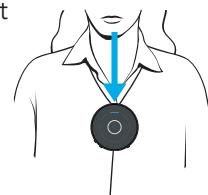

Instructions pour le cordon :

1. Fixez le crochet magnétique à l'arrière du Microphone de table. Vérifiez que le crochet est correctement inséré et qu'il tient bien.
2. Passez le cordon autour du cou. Pour ajuster la longueur, tenez le cylindre et tirez sur la fermeture.
3. Lorsque le Microphone de table est porté par l'intervenant, le voyant supérieur s'allume pendant 3 secondes.

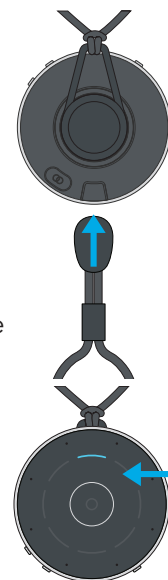

Fonctionnement de votre Microphone de table

Comment votre Microphone de table vous aide





Modes de diffusion des conversations

Le Microphone de table est un produit polyvalent et intelligent. Il suit automatiquement le locuteur principal dans les environnements calmes ou bruyants pour vous offrir une compréhension de la parole optimale. Le Microphone de table vous permet de faire fi du mode automatique afin de sélectionner manuellement jusqu'à deux locuteurs au sein d'un groupe. Le mode Surround est optimisé pour les discussions en grand groupe en environnement calme. Le Microphone de table peut en outre être porté par un intervenant éloigné en cas de bruit.

Dessus de table

Placez votre Microphone au centre de la table pour écouter un groupe de personnes. Pour une meilleure compréhension de la parole, placez toujours votre Microphone de table au plus près de vos interlocuteurs.

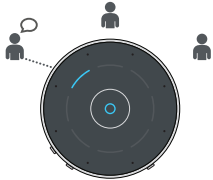
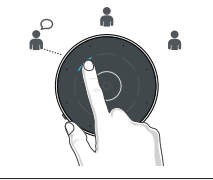
Fonctionnement de votre Microphone de table

	Automatique Lorsque le voyant du mode automatique s'éclaire, le Microphone de table suit automatiquement le locuteur principal. Si le voyant du mode automatique est éteint, appuyez sur la touche Automatique/Surround pour l'activer.
	Locuteur unique manuel Appuyez sur n'importe quel segment pour orienter le micro sur un locuteur en particulier.
	Double locuteur manuel Appuyez pendant 1 seconde sur un segment pour orienter le micro sur un second locuteur.
	Surround Appuyez sur la touche Automatique/Surround pour écouter plusieurs personnes en environnement calme. Appuyez sur la touche Automatique/Surround pour revenir au mode automatique.

Fonctionnement de votre Microphone de table

Streaming Audio TV (Line-in)


Diffuse l'audio de votre téléviseur à vos aides auditives.

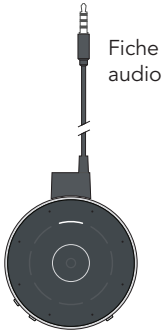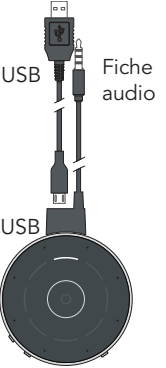 <p>Fiche audio</p>	<p>Insérez le câble de streaming TV dans la prise micro-USB du Microphone de table.</p> <p>Insérez la fiche audio 3,5 mm du câble de streaming TV dans la prise audio du téléviseur.</p>
 <p>Fiche USB</p> <p>Fiche audio</p> <p>Fiche micro-USB</p>	<p>Pour recharger le Microphone de table lorsque vous écoutez votre téléviseur en streaming, vous pouvez insérer la fiche micro-USB du câble de recharge dans la prise micro-USB du câble de streaming TV.</p> <p>Insérez la fiche USB du câble de recharge dans la prise d'alimentation électrique.</p> <p>Raccordez l'alimentation électrique à la prise murale.</p>




Recharge de votre Microphone de table

Pour recharger votre Microphone de table :

1. Raccordez l'extrémité micro-USB du câble de recharge à la prise micro-USB de votre Microphone de table.
2. Insérez l'autre extrémité micro-USB du câble de recharge dans la prise de l'adaptateur secteur.
3. Branchez votre adaptateur à une source d'alimentation externe (prise murale).
4. Vérifiez le statut de charge à l'aide des segments de votre Microphone de table. Voir page suivante.

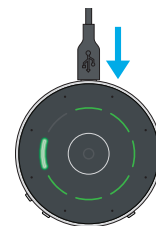

Recharge de votre Microphone de table

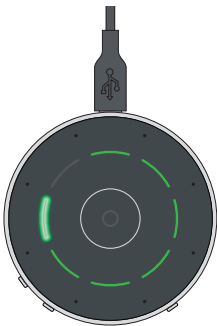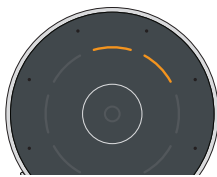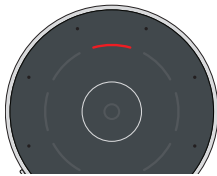Statut des segments	État de charge
	Les segments verts indiquent le niveau de charge de la batterie. Chaque segment représente environ une heure d'autonomie. Le segment vert clignotant indique le niveau actuel. Si vous rechargez votre Microphone de table pendant que vous l'utilisez, tous les segments verts interrompent brièvement les autres voyants lorsque la batterie sera de nouveau pleine.
	Les segments orange indiquent moins de deux heures de batterie.
	Un segment rouge indique moins d'une heure de batterie. Un segment rouge clignotant indique que la batterie est vide.

Une charge complète du Microphone de table fournit jusqu'à 12 heures de streaming. Votre Microphone de table se chargera entièrement en 2 heures environ.


Recharge de votre Microphone de table

Assemblage de votre adaptateur secteur

Votre Microphone de table peut être fourni avec plusieurs fiches de branchement correspondant à différents pays. Si vous devez assembler l'adaptateur secteur, respectez les étapes suivantes.

Pour fixer une fiche de branchement à votre adaptateur secteur :

1. Choisissez la fiche adaptée au pays dans lequel vous utilisez votre Microphone de table.
2. Faites-la glisser dans l'adaptateur jusqu'à ce qu'elle s'emboîte correctement.
3. Pour changer la fiche, appuyez sur la languette et faites-la glisser afin de la retirer de l'adaptateur secteur.

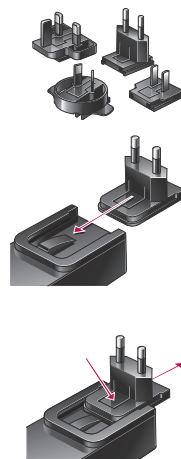

Aide au dépannage

Aide au dépannage

Un problème avec votre Microphone de table ? Ces conseils peuvent vous aider. Si le problème persiste, contactez votre audioprothésiste.

Problème	Causes possibles	Solutions
Le streaming audio s'interrompt subitement dans l'une des aides auditives (ou les deux).	Il se peut que les aides auditives soient à la limite de la portée sans fil.	Rapprochez-vous du Microphone de table.
	La pile ou le niveau de batterie de l'aide auditive est trop faible pour permettre le streaming audio.	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacez la pile de l'aide auditive. • Rechargez votre aide auditive, le cas échéant.
	Un élément de grande dimension, tel qu'un meuble ou un mur, peut dégrader le signal.	Pour une performance optimale, vos aides auditives doivent être en visibilité directe avec le Micro de table.
	La connexion sans fil avec le Microphone de table a été perdue.	Pour redémarrer le streaming audio, suivez les étapes de la section <i>Démarrage/arrêt du streaming audio</i> à la page 16.

Aide au dépannage

Problème	Causes possibles	Solutions
La qualité du son transmis est altérée.	La batterie du Microphone de table est faible.	Rechargez le Microphone de table. Reportez-vous à la section <i>Recharge de votre Microphone de table</i> à la page 25.
	Le volume de la source audio n'est pas optimal.	Réglez le volume de la source audio jusqu'à obtenir une meilleure qualité de son.
La qualité du streaming audio est irrégulière.	Il se peut que l'appareil Bluetooth soit à la limite de la portée sans fil.	Rapprochez l'appareil Bluetooth du Microphone de table.
Le streaming audio est trop fort ou trop faible.	Le volume sonore transmis du Microphone de table à l'aide auditive n'est pas optimal.	Appuyez sur le bouton Volume + ou - du Microphone de table.

Aide au dépannage

Problème	Causes possibles	Solutions
Mode Microphone de table : il est difficile d'entendre la personne qui parle dans les environnements bruyants.	Il se peut que le Microphone de table soit trop loin du locuteur.	Rapprochez le Microphone de table de sa bouche.
Mode microphone déporté : il est difficile d'entendre la personne qui parle dans les environnements bruyants.	Il se peut que le Microphone de table soit couvert par un vêtement ou mal positionné.	Évitez tout obstacle entre le Microphone de table et la voix du locuteur.
Aucun son n'est diffusé dans les aides auditives lors du streaming.	Les aides auditives ne sont pas jumelées au Microphone de table.	Suivez les étapes détaillées à la section <i>Jumelage de vos aides auditives</i> à la page 12.
	Aucun signal audio entrant n'est disponible.	<ul style="list-style-type: none">• Allumez la source audio électronique.• Désactivez le mode Muet ou augmentez le volume sur la source audio électronique.
L'appareil ne répond pas.	Dysfonctionnement possible.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 8 secondes pour forcer l'arrêt. Rallumez-le normalement.

Informations complémentaires

- Utilisation prévue
- Informations FCC
- Informations réglementaires

Utilisation prévue

Le Microphone de table est un dispositif d'assistance à l'audition qui transmet le son via des écouteurs filaires ou des aides auditives à conduction aérienne sans fil 2,4 GHz. Porté par un locuteur éloigné ou utilisé en environnement bruyant, il agit en microphone déporté. Il fonctionne aussi comme émetteur TV lorsqu'il est connecté à la sortie audio d'un téléviseur.

Le Microphone de table est conçu pour respecter les normes internationales de compatibilité électromagnétique les plus strictes. Des interférences sont toutefois susceptibles de survenir malgré tout, provoquées par les perturbations des lignes électriques, détecteurs de métaux dans les aéroports, champs électromagnétiques provenant d'autres dispositifs médicaux, signaux radio et décharges électrostatiques.

Le Microphone de table doit être nettoyé avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse.

Si vous utilisez un autre dispositif médical ou portez un dispositif médical implanté comme un défibrillateur ou un pacemaker et que vous vous demandez si votre Microphone de table pourrait causer des interférences avec celui-ci, contactez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical pour en savoir plus sur les risques de perturbation du signal. Il convient de ne pas utiliser le Microphone de table lors d'examen IRM ni dans un caisson hyperbare. Le Microphone de table n'est pas officiellement certifié pour une utilisation dans des atmosphères explosives telles que celles présentes dans des mines de charbon ou certaines usines chimiques.

Tout incident grave survenu en lien avec votre dispositif Starkey doit être signalé à votre représentant Starkey local et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous êtes établi. Un incident grave est défini comme un dysfonctionnement, une détérioration des caractéristiques et/ou des performances du dispositif, ou une inadéquation dans son guide d'utilisation/étiquetage qui pourrait entraîner la mort ou une détérioration grave de l'état de santé de l'utilisateur OU pourrait y conduire en cas de répétition.


Utilisation à bord des avions

Il convient de ne pas utiliser le Microphone de table à bord d'avions, sauf autorisation spécifique du personnel navigant.

Utilisation à l'étranger

Le Microphone de table est approuvé pour un fonctionnement sur des fréquences radio spécifiques à votre pays ou région et peut ne pas l'être pour une utilisation en dehors de votre pays ou région.

Veillez noter que son utilisation à l'étranger est susceptible de causer des interférences avec d'autres appareils électroniques, ou que d'autres appareils électroniques pourraient causer des interférences avec votre Microphone de table.

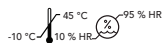

Votre Microphone de table est conçu pour fonctionner, être conservé et transporté à une température comprise entre -10 °C et +45 °C, à un taux d'humidité relative compris entre 10 et 95 % et à des plages de pression allant de 70 kPa à 106 kPa (équivalant à des altitudes allant de 380 m au-dessous du niveau de la mer à 3 000 m).

Utilisation prévue

Nous sommes tenus par les exigences réglementaires de faire part des avertissements suivants :

⚠ AVERTISSEMENT : L'utilisation du Microphone de table à proximité immédiate d'un autre appareil électronique doit être évitée, ses performances pouvant en être altérées. Si cette utilisation s'avère indispensable, vérifiez que vos aides auditives et l'autre appareil fonctionnent normalement.

⚠ AVERTISSEMENT : L'utilisation d'accessoires, composants ou pièces de rechange autres que ceux fournis par le fabricant du Microphone de table peut entraîner une hausse des émissions électromagnétiques et une baisse de l'immunité électromagnétique, et induire une détérioration des performances.

⚠ AVERTISSEMENT : L'utilisation d'un dispositif portatif de communication à radiofréquence à moins de 30 cm de votre Microphone de table peut détériorer les performances de votre aide auditive. Si tel est le cas, éloignez-vous de cet appareil de communication.

Même si le Microphone de table n'est pas officiellement certifié (classé IP) protégé contre toute pénétration de poussière ou d'eau, conformément à la norme CEI 60529, il a été testé au niveau IP 52. Le Microphone de table est donc protégé contre la poussière. La batterie de votre Microphone de table n'est pas remplaçable. N'essayez pas de la remplacer. Le Microphone de table ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne l'ouvrez pas et ne le modifiez pas.

Ne connectez pas le Microphone de table à un appareil non décrit dans ce mode d'emploi. La durée de vie prévue du Microphone de table est de 3 ans.

Description technique de la technologie sans fil

Le Microphone de table utilise la bande de fréquences 2,4 à 2,4835 GHz avec une PIRE de 8 dBm, une modulation de transmission de type 1M12FXD et une bande passante de 1,1 MHz. La partie réceptrice de la radio a une bande passante de 2 MHz.

NOTIFICATIONS SANS FIL

ID FCC : 2AS2V-TM10

IC : 24964-TM10 (Modèle TM10)

NOTIFICATION FCC/IC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC et aux normes RSS sans licence d'ISDE Canada. Leur utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ces appareils ne doivent pas causer d'interférences nuisibles ; et (2) ces appareils doivent accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'en causer un mauvais fonctionnement.

REMARQUE : le fabricant ne saurait être tenu responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Par la présente, Nuance Hearing déclare que le Microphone de table de Starkey Laboratories Inc. est conforme aux principales exigences et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Vous pouvez obtenir une copie de la Déclaration de conformité en écrivant à info@nuancehear.com

Informations FFC

NOTIFICATION NCC

Sans autorisation de la NCC, aucune société ou entreprise ni aucun utilisateur n'a le droit de modifier la fréquence, d'augmenter la puissance de transmission, ni d'altérer les caractéristiques originales ou la performance de dispositifs à radiofréquence de faible puissance. Les dispositifs à radiofréquences de faible puissance ne doivent pas affecter la sécurité des avions ni interférer dans les communications légales. En pareil cas, l'utilisateur identifié devra immédiatement interrompre le fonctionnement dudit dispositif jusqu'à disparition des interférences. Les communications légales désignent des communications radio effectuées conformément au Télécommunications Management Act. Les dispositifs à radiofréquences de faible puissance peuvent être sensibles aux interférences des communications légales ou des périphériques émettant des ondes radio ISM.

Informations réglementaires

Nuance Hearing

24 Raoul Wallenberg St.
Tel Aviv 6971920
Israël



Starkey Laboratories (Allemagne) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hambourg
Allemagne



Consulter le mode d'emploi



À conserver au sec

Instructions relatives à l'élimination des équipements électroniques usagés

Starkey Laboratories, Inc. vous invite à éliminer votre Microphone de table conformément à votre procédure locale de recyclage/élimination des équipements électroniques, aux exigences de l'UE et à celles de votre législation locale le cas échéant.

Les instructions ci-dessous sont destinées au personnel chargé de l'élimination ou du recyclage. Merci de joindre le présent mode d'emploi lorsque vous mettez au rebut votre Microphone de table.



















INSTRUCTIONS DESTINÉES UNIQUEMENT AU PERSONNEL CHARGÉ DE L'ÉLIMINATION/DU RECYCLAGE

Ce produit contient une batterie lithium-ion polymère. Pour retirer cette batterie :

- Éteignez le Microphone de table.
- Séparez les deux moitiés du boîtier à l'aide d'un petit tournevis.
- Coupez les fils reliant le circuit imprimé à la batterie pour éviter tout court-circuit accidentel.
- Détachez la batterie du boîtier à l'aide d'une large lame plate.

De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Informations réglementaires

Symbole	Signification du symbole	Norme applicable	Référence symbole
	Fabricant	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Date de fabrication	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Référence catalogue	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	N° de série	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Dispositif médical	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	À conserver au sec	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Limites de température	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Limites d'humidité	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Mise en garde	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Avertissement général	EC 60601-1, référence Tableau D.2, signal de sécurité 2	ISO 7010-W001
	Se référer au mode d'emploi/livret	EC 60601-1, référence Tableau D.2, signal de sécurité 10	ISO 7010-M002
	Tri sélectif et recyclage	Directive 2012/19/EU (DEEE)	Décret 2021-835 du 29 juin 2021
	Dispositif de classe II	CEI 60417 Référence Tableau D.1	Symbole 9 (CEI 60417-5172)
	Regulatory Compliance Mark (RCM - marque de conformité réglementaire)	AS/NZS 4417.1:2012	S/O
	Certification japonaise Giteki	Loi japonaise sur les radios	S/O
	Courant continu	CEI 60601-1 Référence Tableau D.1	CEI 60417-5031
	Symbole de recyclage	Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil	Annexe I-VII

Notes



StarLink et Starkey sont des marques déposées de Starkey Laboratories, Inc.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Starkey fait l'objet d'une licence.

©2023 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 9/23 BKLT3171-00-FF-ST

Brevet : www.starkey.com/patents