

# Guía de inicio rápido

Evolv AI



**ITC/HS recargable e ITE recargable**

**En Starkey, comprendemos el impacto que implica la pérdida de audición.**

**Por eso, damos todos los pasos necesarios para lograr una audición sin esfuerzo.**

**Evolv AI** ofrece nuestra línea completa de audífonos más innovadores hasta la fecha. Fabricados a mano, con nuestra tecnología más innovadora y el sonido más nítido, estos audífonos se adaptan perfectamente a su estilo de vida.

**Obtenga el máximo partido a sus audífonos**

Visite [starkey.com/care](https://starkey.com/care) para obtener herramientas y recursos adicionales, que incluyen:

- Videos instructivos
- Manuales de operaciones
- Folletos de productos

## Carga de los audífonos



- Coloque los audífonos en el cargador con la placa frontal hacia abajo para que los contactos de la pila de cada audífono queden alineados con los postes de carga del cargador.
- Los audífonos se desactivarán automáticamente y comenzarán a cargarse, siempre que el cargador esté encendido.
- Nota: Los LED correspondientes a cada audífono:
  - Iluminado en color verde = cargando
  - Verde fijo = carga completa
  - Rojo intermitente = estado de error.  
Para restablecerlo, retire los audífonos del cargador, espere a que el LED se apague y vuelva a insertarlos. Si el fallo continúa, consulte con su profesional de la audición.

- Si no va a usar los audífonos durante un período prolongado de tiempo (por ejemplo, semanas), retire el enchufe del cargador (depende del modelo) y los audífonos de los postes de carga. Tendrá que desactivar manualmente los audífonos pulsando el botón de control de usuario de cada audífono durante tres segundos.
- La carga se realiza con la tapa abierta o cerrada; los audífonos se cargarán completamente en menos de 3½ horas.
- Es seguro guardarlos en el cargador después de estar completamente cargados y en el momento que no los esté utilizando.
- Los audífonos se encenderán automáticamente cuando se retiren del cargador.

Solo para cargador premium con batería integrada:

- Para iluminar los LED cuando el cargador no está enchufado, retire los audífonos de su poste de carga durante tres segundos y luego vuelva a colocarlos. Los LED se iluminan durante 10 segundos antes de apagarse de nuevo.
- Cuando se cargan sin el cable del cargador, los LED se apagarán cuando los audífonos estén completamente cargados para preservar la batería incorporada.

# Encendido y apagado

**ENCENDIDO** – Los audífonos se encienden automáticamente después de sacarlos del cargador, siempre que su cargador esté encendido. Hay una demora para que dé tiempo a insertar el audífono en el oído.

**ENCENDIDO** – Si el audífono se ha apagado manualmente, pulse el botón de control de usuario durante tres segundos para encenderlo. Sigue habiendo una demora para darle tiempo para insertar el audífono en el oído.

**APAGADO** – Los audífonos se apagarán automáticamente cuando se coloquen en el poste de carga. El proceso de carga se pone en marcha.

**APAGADO** – Los audífonos se pueden apagar manualmente pulsando el botón del control de usuario durante tres segundos.

# Cuidados del sistema

## CUIDADO DE LOS AUDÍFONOS

Mantenga sus audífonos limpios. El calor, la humedad y las sustancias extrañas pueden provocar un rendimiento deficiente.

- Utilice un cepillo o un paño suave para limpiar la suciedad alrededor del control de usuario, del micrófono y del compartimento de la pila.

- Inspeccione el receptor, el auricular y el protector anticerumen con regularidad.
- No utilice nunca agua, disolventes, líquidos de limpieza ni aceite para limpiar su audífono.

## CUIDADOS del cargador

Mantenga el cargador limpio. El calor, la humedad y las sustancias extrañas pueden provocar un rendimiento deficiente.

- Mantenga los postes de carga libres de residuos empleando el cepillo de limpieza suministrado.
- No utilice agua, disolventes o líquidos de limpieza para limpiar los puertos de carga.
- Mantenga la tapa cerrada tanto como sea posible para evitar la acumulación de polvo y suciedad.
- Guarde el cargador en un lugar seco y limpio, como un aparador o un estante mejor que el baño o la cocina.

Para asegurar una larga vida de las pilas recargables para audífonos y las baterías del cargador premium:

- Haga una carga completa de las pilas para audífonos cada noche.
- No las exponga a calor excesivo, es decir, no las guarde en la repisa de una ventana o en un carro expuesto al sol.

## Consejos útiles


- No desarme sus audífonos ni inserte herramientas de limpieza en su interior.
- Cuando no los utilice, coloque los audífonos en el recipiente de almacenamiento y guárdelos:
  - En un lugar seco y seguro
  - Lejos de la luz solar directa y del calor para evitar temperaturas extremas
  - Donde pueda encontrarlos fácilmente
  - Con seguridad fuera del alcance de niños y mascotas

## Protectores de cerumen Hear Clear


Los audífonos a medida integran una protección anticerumen desechable Hear Clear. Estos innovadores protectores de cerumen evitan la acumulación de cerumen en el receptor del audífono. Cuando necesite cambiar los protectores de cerumen, siga las instrucciones siguientes.

1. Inserte el extremo vacío de la barra de aplicación directamente en el protector de cerumen usado en el audífono.
2. Jale **hacia afuera** (sin girar) la barra para quitar el protector de cerumen usado.


3. Utilice el extremo opuesto de la varilla para insertar con firmeza el protector de cerumen limpio en el audífono.
4. Jale **hacia afuera** (sin girar) para quitar la barra y desecharla.

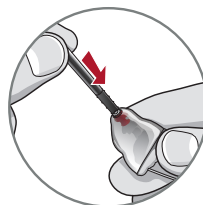


1

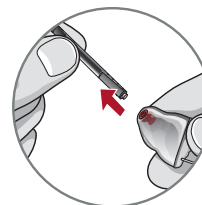

2

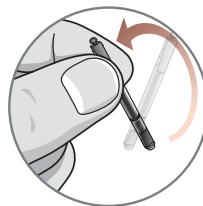

3

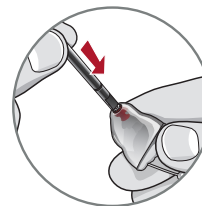

4

# Descargue y conéctese a la aplicación Control Auditivo Thrive



La aplicación Control Auditivo Thrive facilita el control y el ajuste de sus audífonos recargables de 2,4 GHz con su dispositivo Apple o Android compatible. Descargar y conectarse a la aplicación es fácil; consulte la

## Guía del usuario de la aplicación Control Auditivo

**Thrive** o visite [starkey.com/thrivesupport](http://starkey.com/thrivesupport) para obtener información adicional, por ejemplo:

- Sensores integrados y funciones de inteligencia artificial
- Memorias automáticas y personalizadas
- Geoetiquetas
- Manejo del tinnitus
- Encontrar mis audífonos
- Alertas

Para obtener información sobre la compatibilidad con iOS/Android de la aplicación Control Auditivo Thrive, visite [starkey.com/thrivesupport](http://starkey.com/thrivesupport).

# Información sobre los audífonos

Modelo de los audífonos: \_\_\_\_\_

Número de serie de los audífonos: I \_ D \_\_\_\_\_

Número de serie del cargador: \_\_\_\_\_

Fecha de caducidad de la garantía: \_\_\_\_\_

Configuración de la memoria, si procede: \_\_\_\_\_

N.º de memorias	Entorno/Situación de escucha	Pitido/Indicador
-----------------	------------------------------	------------------

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

.....

Instrucciones especiales: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Profesional de la audición:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_







Para obtener información sobre la compatibilidad con iOS/Android y la aplicación Control Auditivo Thrive, visite [starkey.com/thrivesupport](https://starkey.com/thrivesupport).

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod Touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio registrada de Apple Inc.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

El logotipo de Starkey, Starkey, Thrive, el logotipo de Thrive, Evolv y el logotipo de Evolv son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.



Starkey.com

