


Aplikacja Thrive

Tryb Zaawansowany



Hear better. Live better.

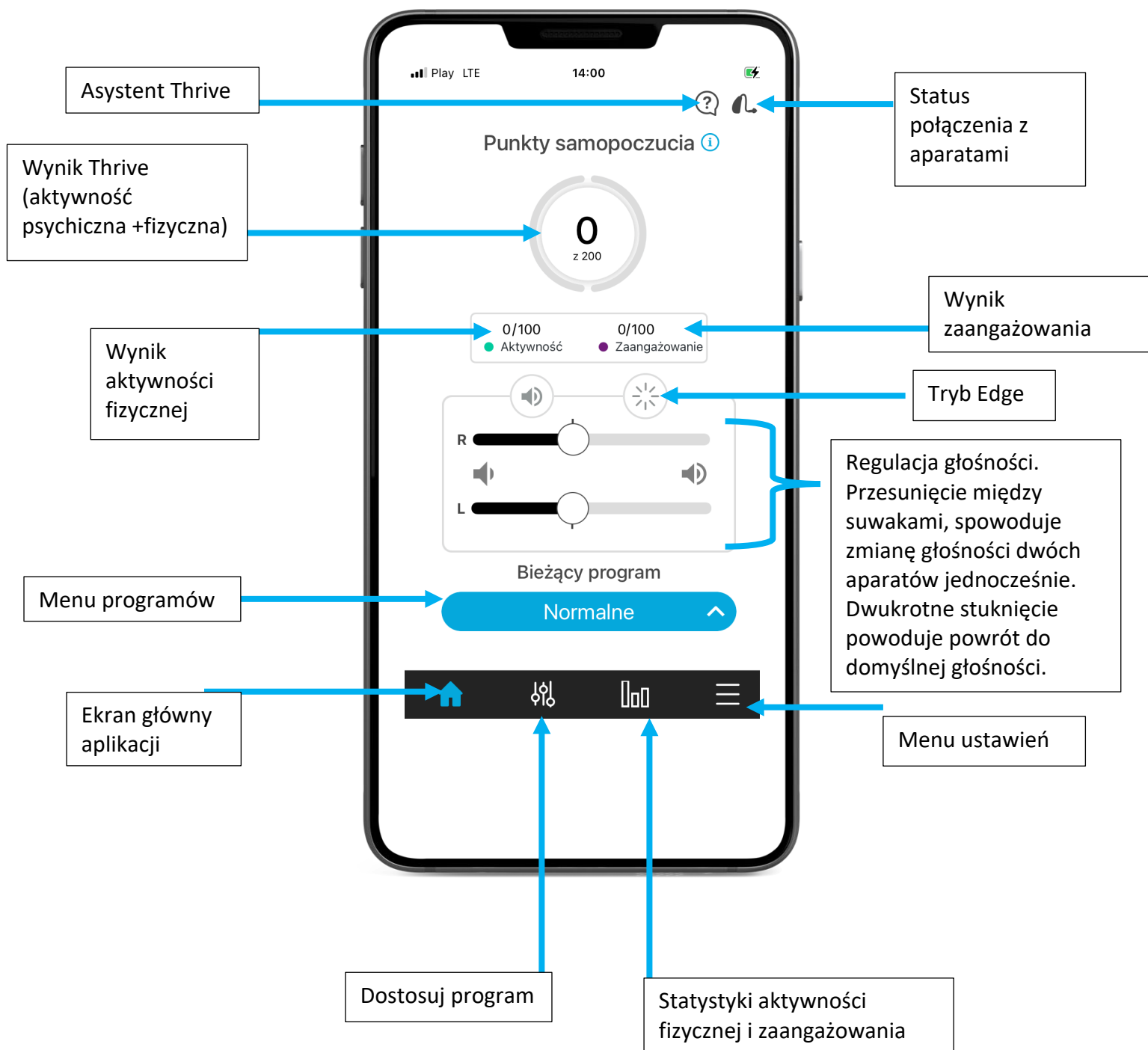

Aplikacja Thrive


Tryb Zaawansowany





Hear better. Live better.




Tworzenie programów indywidualnych

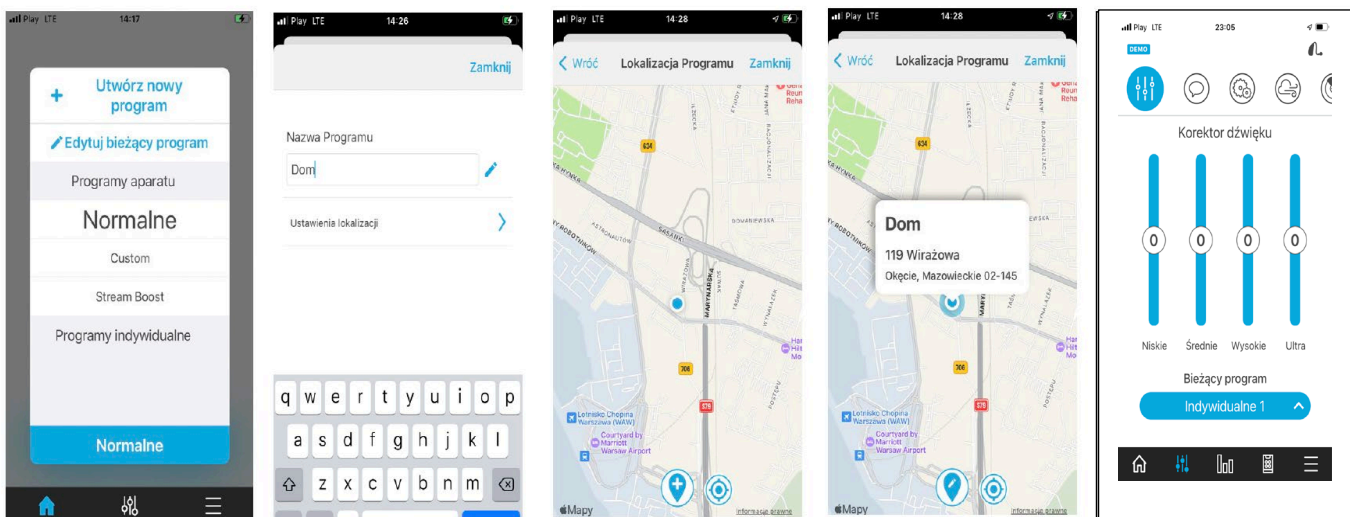Wybierz pamięć, która zapewni najlepszą jakość dźwięku w bieżącym środowisku.
Wybrana pamięć stanowi punkt odniesienia dla dokonywanych regulacji. Pacjent może stworzyć 20 programów indywidualnych z przypisaną geolokalizacją.



1. Wybierz Menu programów. Na samej górze kliknij „+ Utwórz nowy program”
2. Stwórz program indywidualny. W celu przypisania lokalizacji, wybierz Ustawienia lokalizacji.
3. Wybierz  by przypisać preferowaną lokalizację
4. Program indywidualny został przypisany do wybranego miejsca
5. Regulacja ustawień programów indywidualnych jest możliwa przez wybór w ekranie głównym ikony 

Personalizacja programów

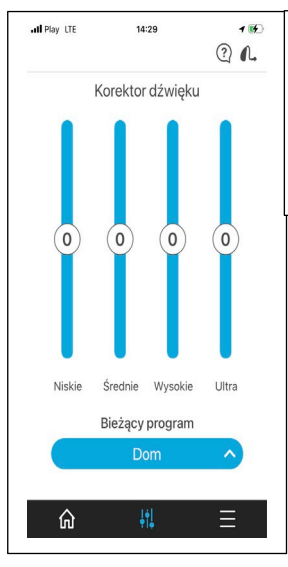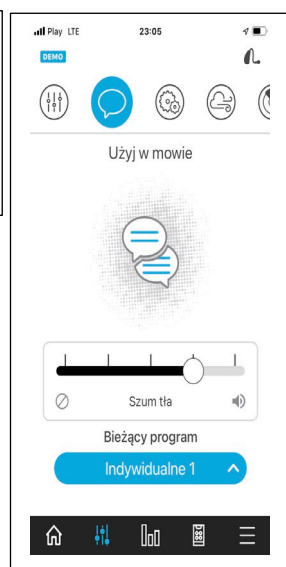	<p>Precyzyjna regulacja barwy dźwięku</p>
	<p>Poprawa rozumienia mowy w hałasie</p>
	<p>Zwiększa komfort słuchania w obecności hałasu maszyn</p>

Aplikacja Thrive


Tryb Zaawansowany





Hear better. Live better.



Ułatwia słyszenie w wietrze dni.

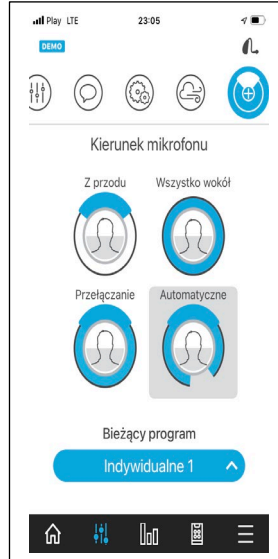

Dostosowanie trybu mikrofonu.

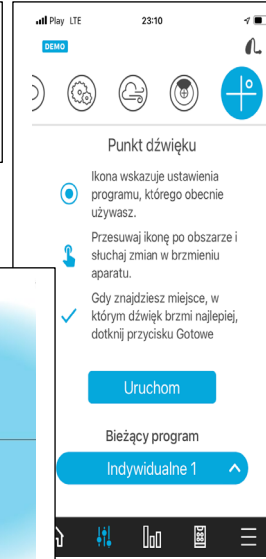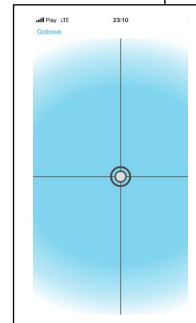

Punkt Dźwięku
Naciśnij Uruchom, następnie poruszaj pulsującą ikoną po ekranie. Po znalezieniu żądanej jakości dźwięku wybierz opcję Gotowe w lewym górnym rogu ekranu.

Wyniki Thrive

Wynik Thrive przedstawia wynik ogólnej kondycji organizmu poprzez podanie łącznej wartości aktywności fizycznej i funkcji poznawczych. Dzienny wynik Thrive może wynieść 200 punktów.

Wyniki aktywności fizycznej

Kroki


Postęp w kierunku poprawy ogólnej poprzez zwykłe chodzenie.

Ćwiczenie

Wynik dziennej dawki aktywności fizycznej.

Stanie

Analizuje tętno w ciągu dnia, motywując do większej aktywności.

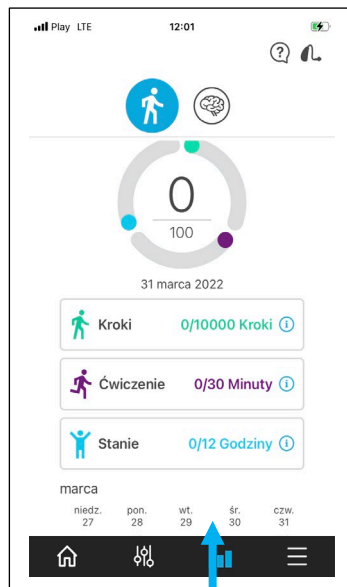

Wyniki aktywności psychicznej

Użycie


Dane o używaniu aparatów słuchowych

Interakcja

Informacje analizujące używanie akcesoriów, czasu trwania streamingu oraz rozmów.

Środowisko

Analiza charakterystycznych cech dźwięków w środowiskach, w których przebywa pacjent.

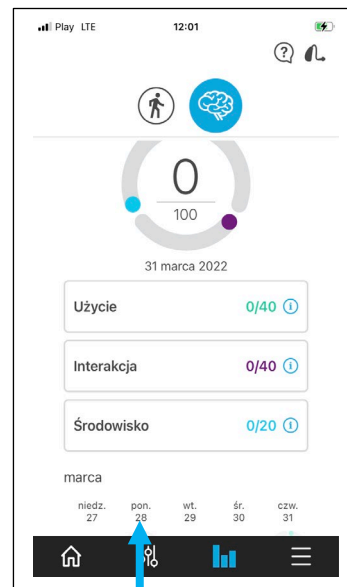

Wyniki zaangażowania psychicznego i fizycznego z podziałem na dni.

Aplikacja Thrive

Tryb Zaawansowany



Hear better. Live better.

Powiadomienie o upadku

Funkcja Powiadomienie o upadku wykorzystuje zintegrowane czujniki do automatycznego wykrywania upadków i wysyłania wiadomości tekstowych z ostrzeżeniem do wybranych kontaktów.

Szczegółowe informacje o konfiguracji powiadomienia o upadku w aplikacji Thrive znajdziesz na stronie

dlaprofesjonalistow.starkey.com, w sekcji Edukacja- Aplikacja Thrive- Powiadomienia o upadkach Konfiguracja w Thrive App



Alert automatyczny

Włącza się, gdy samodzielnie, gdy protetyk słuchu ustawia aparaty słuchowe.

Wykrycie upadku powoduje automatyczne uruchomienie alarmu

*nie można uruchomić, gdy jest ustawiona opcja Auto On/Off

Alert manualny

Aby zainicjować alarm, należy nacisnąć przycisk w aparacie słuchowym.


Funkcja ta jest ustawiana w programie Inspire w regulacji użytkownika.


Asystent Thrive

Thrive Assistant zapewnia obsługę aparatów słuchowych bez użycia rąk.

Aktywacja asystenta Thrive poprzez aplikację lub gest umożliwia korzystanie z komend głosowych, które zapewniają:

- Regulację głośniejsz/ciszej
- Zmianę programów
- Znajdź mój telefon

Asystent Thrive, udziela również odpowiedzi na pytania dotyczące aparatów słuchowych, aplikacji oraz akcesoriów Starkey. Wystarczy wybrać symbol  i zadać pytanie asystentowi.


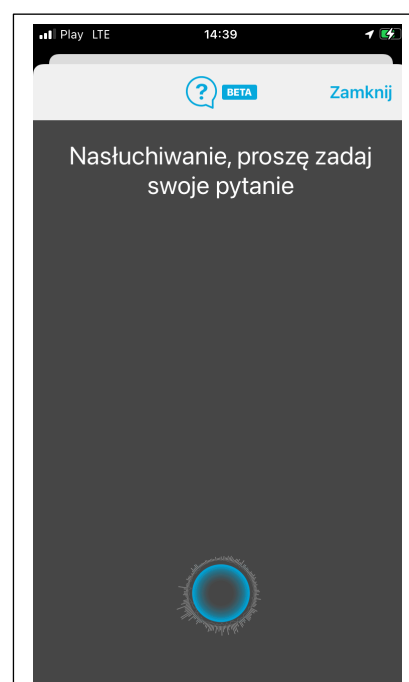


Tłumacz

Funkcja umożliwia tłumaczenie 27 języków.


Kiedy użytkownik mówi do mikrofonu telefonu, jego słowa są tłumaczone i zapisywane na ekranie. Przetłumaczona mowa jest przesyłana do aparatu słuchowego użytkownika.

1. Wybierz Translator z menu ustawień
2. Wybierz język
3. Naciśnij ikonę mikrofonu na środku ekranu
4. Zwróć mikrofon telefonu w stronę rozmówcy/audio które chcesz przetłumaczyć
5. Przetłumaczona treści przesyłane są bezpośrednio do aparatów słuchowych oraz widoczne na ekranie.

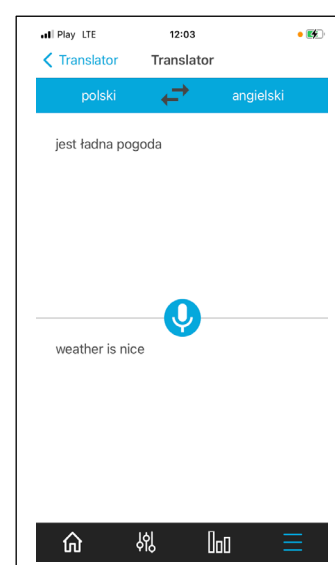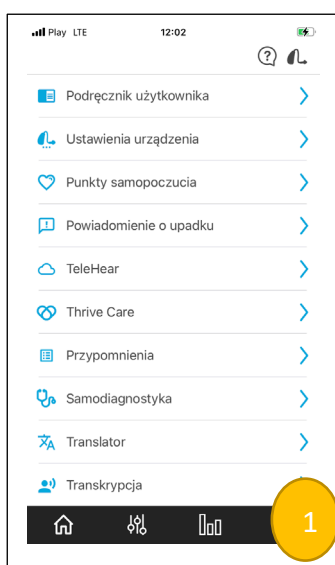

Samodiagnostyka

Funkcja Samodiagnostyka umożliwia pacjentom szybką i wygodną analizę działania ich aparatów słuchowych bezpośrednio z aplikacji Thrive.

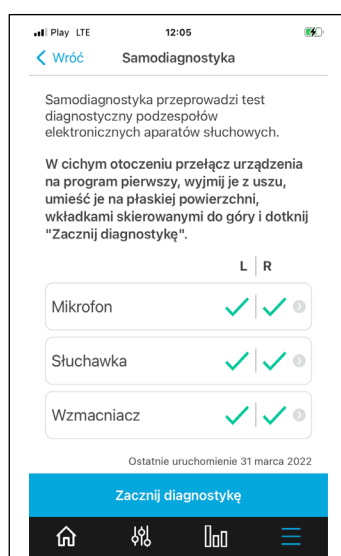

1. Wybierz z menu ustawień samodiagnostykę
2. Zdejmij aparaty z uszu i Zacznij diagnostykę.
3. Kolor zielony oznacza, że komponenty działają sprawnie. Żółty i czerwony - stan aparatów wymaga weryfikacji.

Uwaga! By dowiedzieć się więcej kliknij w żółty lub czerwony znacznik a aplikacja Thrive podpowie Ci co zrobić.

Aplikacja Thrive


Tryb Zaawansowany




Hear better. Live better.

Transkrypcja


Funkcja uprasza wysyłanie wiadomości tekstowych z telefonu. Wybierz ją w menu ustawień, mów do mikrofonu telefonu a tekst sam się napisze. Następnie wyślij wiadomość w formie maila lub sms.

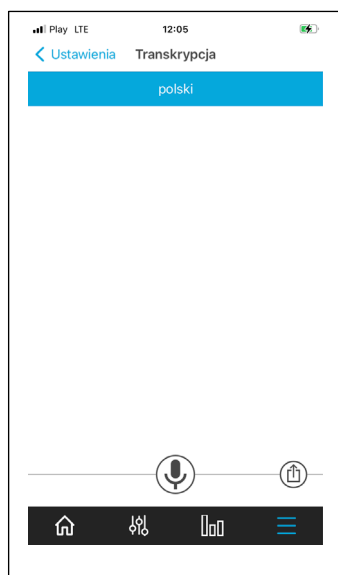


1. Wybierz transkrypcję z menu ustawień.

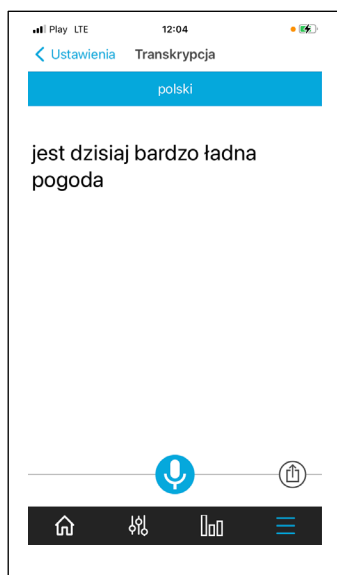

2. Wybierz ikonę i mów.

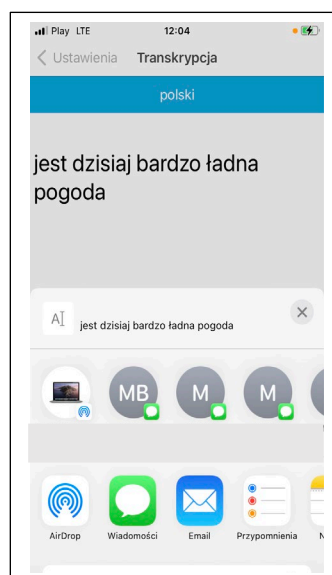

3. Wybierz ikonę i wybierz aplikację przez którą chcesz wystać wiadomość.



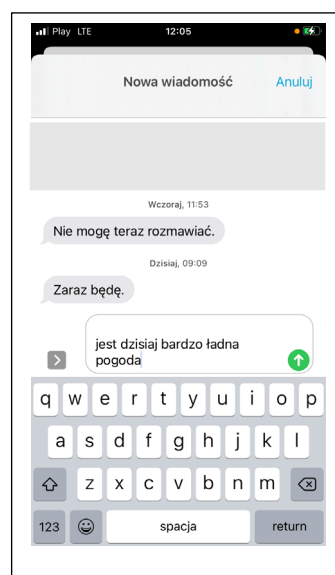


4. Aplikacja Thrive przeniesie Cię do wybranej aplikacji by wystać wiadomość.

Przypomnienia


Dzięki tej funkcji aparaty słuchowe mogą przypominać nam o najważniejszych informacjach tj. spotkania przyjmowanie leków, realizacji recept lub innych osobistych zadaniach.

1. Wybierz opcje Przypomnienia w menu ustawień.
2. + Nowe przypomnienie
3. Wybierz kategorię lub wpisz własną nazwę przypomnienia.
4. Ustaw dzień, godzinę oraz cykliczność.
5. Gotowe – ustawieś przypomnienie.

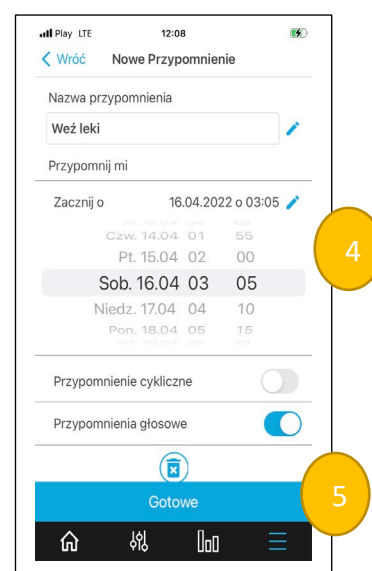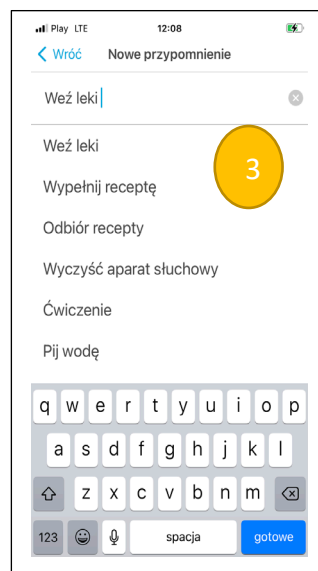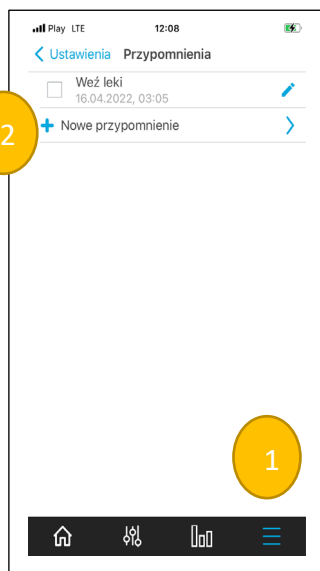


Tinnitus

Wybierając program Tinnitus, użytkownik aplikacji Thrive może regulować głośność oraz szybkość modulacji bodźca dla szumów usznych.

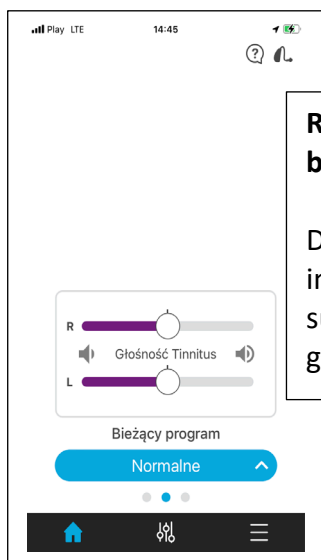

Regulacja głośności bodźca szumów usznych

Dostosuj głośność bodźca indywidualnie, przesun suwaki, aby dostosować głośność.

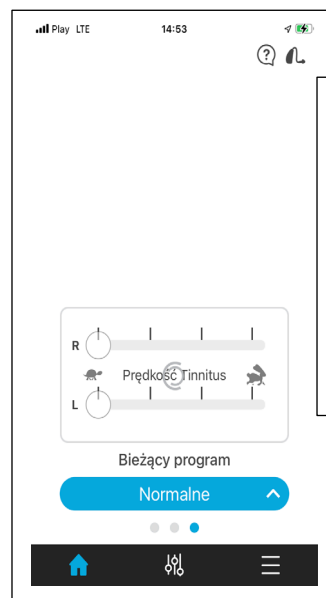


Regulacja prędkości bodźca szumów usznych

Przesuń suwaki, aby zmienić ustawienie z braku modulacji (w lewo) na szybką modulację (w prawo).

System Cros

Dostosuj balans dźwięku z nadajnika względem odbiornika w programie który zostały skonfigurowane dla BiCROS. Ekran Balance (Balans) będzie widoczny w aplikacji Thrive, jeśli program słuchowy będzie miał funkcję BiCROS.

- Przeciągnij ikonę okręgu wzdłuż suwaka, aby dostosować balans dźwięku między odbiornikiem a nadajnikiem.
- Jeśli chcesz wyciszyć nadajnik wybierz opcję Wycisz.

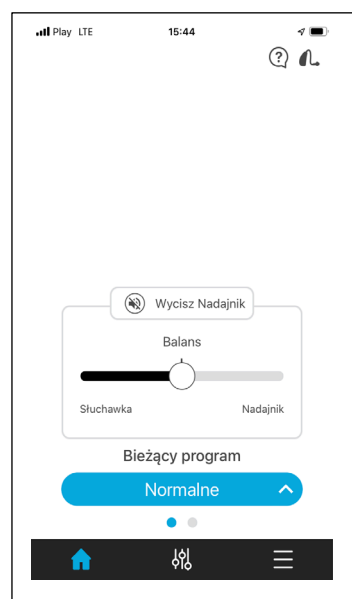


Aplikacja Thrive


Tryb Zaawansowany



Hear better. Live better.

Akcesoria

Ikona akcesoriów  będzie widoczna, gdy aparaty są sparowane z akcesoriami lub gdy aparaty mają dostęp do funkcji IntelliVoice.

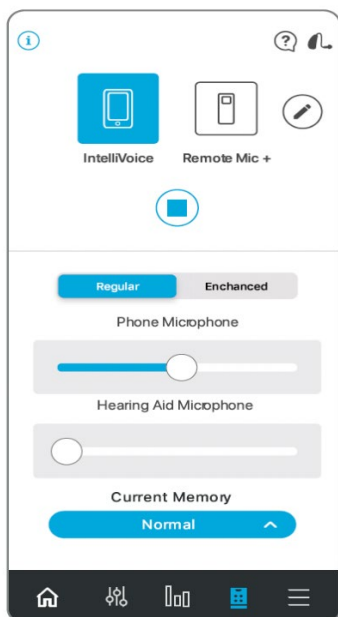

Menu akcesoriów ułatwia korzystanie z akcesoriów bezprzewodowych. Pacjent może na poziomie aplikacji regulować głośność sygnału przesyłanego, zmienić ustawienia mikrofonów oraz aktywować funkcję IntelliVoice /Voice AI (funkcja dostępna w aparatach Evolv i Livio AI 2400 przy połączeniu z iPhone) która wykorzystuje mikrofon telefonu komórkowego do poprawy słyszenia w trudnych sytuacjach akustycznych.

Tryb zaawansowany posiada również:

- Podręcznik użytkownika
- Ustawienia urządzenia
- Znajdź Mój Aparat
- Informacje
- Ustawienia aplikacji
- Tryb demo