

## QUICKTIP

## 자가진단 (Self Check)

자가진단은 보청기 시스템의 진단 테스트를 수행하여 마이크, 리시버, 앰프를 포함한 보청기 구성 요소의 최적 성능을 보장합니다. 자가진단은 Pro Fit(프로 핏)을 사용하는 청각전문가 또는 My Starkey앱의 사용자가 실행할 수 있습니다.

## 사용자 조절 구성

녹색 체크 표시에 기준선이 자동으로 설정됩니다. (그림1) 청각전문가는 Pro Fit(프로 핏)에서 환자의 보청기에 대한 자가진단을 완료할 수 있습니다.

- 1 전체 메뉴 ≡ 에서 자가진단을 선택합니다.
- 2 리시버(Receiver)가 위를 향하도록 평평한곳에 보청기를 놓습니다.
- 3 모든 소음을 줄입니다. (주위를 조용하게 합니다.)
- 4 '테스트 시작'을 클릭하여 시작합니다.
- 5 짧고 강한 자극이 각각 보청기에서 재생됩니다.




[그림1]

## 자가진단 결과

테스트가 완료되면 각 구성요소에 대한 결과가 표시됩니다.

결과 위에 마우스를 놓으면 자세한 결과를 확인할 수 있습니다. [그림2]

- (A) 초록색: 통과
- (B) 노란색: 기준선을 통과하지 못했습니다. 확인이 필요합니다.
- (C) 빨간색: 실패

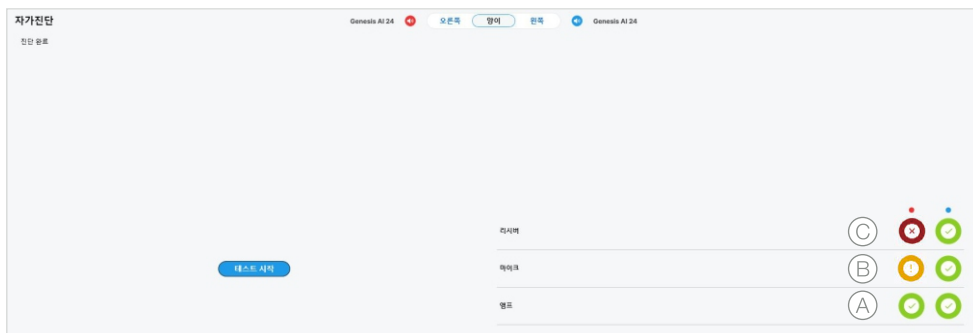








[그림2]

# 자가진단 [My Starkey(마이 스타키앱)]

자가진단은 고객이 빠르고 편리하게 사용할 수 있는 방법을 제공합니다.  
My Starkey(마이 스타키앱)에서 보청기 시스템의 성능을 분석합니다.

My Starkey(마이 스타키앱)에서 자가진단을 시작하려면:

- 1 My Hearing(내 보청기)를 누릅니다.
- 2 Self Check(자가진단)을 누릅니다.
- 3 리시버(Receiver)가 위로 향하도록 평평한 곳에 보청기를 놓습니다.
- 4 모든 소음을 줄입니다.
- 5 Run Self Check(자가진단 시작하기)를 선택합니다.
- 6 각각의 보청기에서 짧게 소리가 재생됩니다.
- 7 테스트가 완료되면 보청기의 각 구성요소에 대한 결과가 화면에 표시됩니다.
- 8 각 구성요소 아래의 Details(상세정보)를 누릅니다.  
(구성 요소 화면 예시(아래쪽))

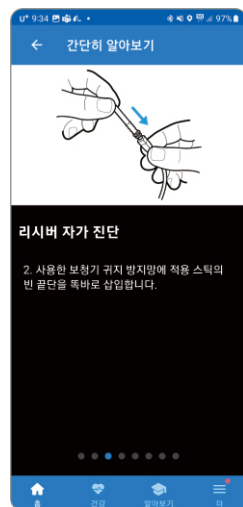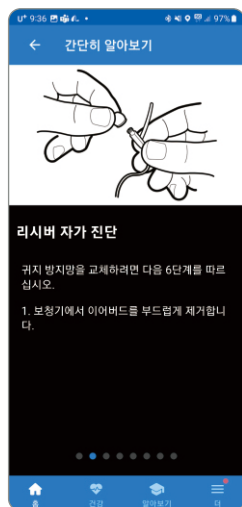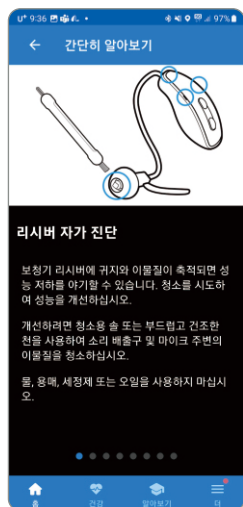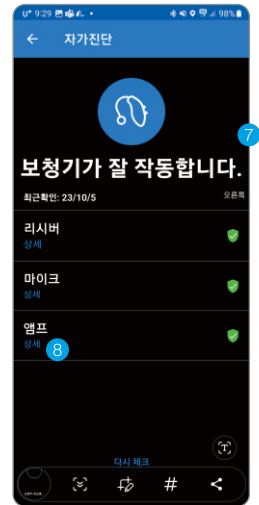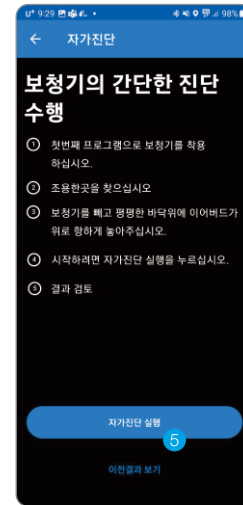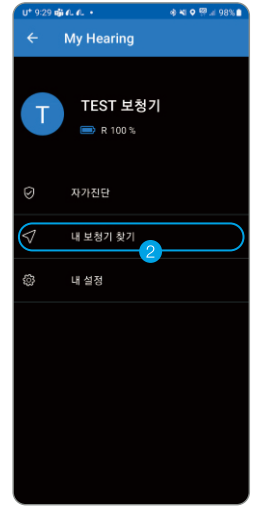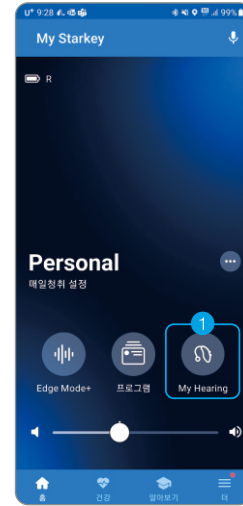

Features may vary by country.

This app may have slight differences depending on your phone.  
Pro Fit and the Starkey logo are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.  
©2023 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved. 10/23 FLYR4081-00-KO-SC

