


Compatibilità Dispositivi

Scopri se il tuo dispositivo è compatibile con l'app Hear Circle scansionando il codice sottostante con la fotocamera del tuo smartphone.



SCARICA L'APP:

1. Apri **App Store**  sui dispositivi Apple o **Google Play**  sui dispositivi Android.
2. Nella casella di ricerca, digita  **Hear Circle**
3. Seleziona **OTTIENI** sui dispositivi Apple o **INSTALLA** sui dispositivi Android per scaricare l'app sul tuo dispositivo.

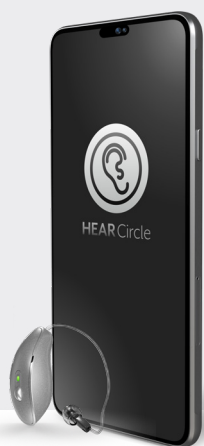

Per l'elenco dei dispositivi compatibili, visita il sito www.starkey.it/compatibilita

Scopri di più sull'app Hear Circle

Visita il sito

www.starkey.it/apparecchi-acustici/app/my-starkey/panoramica

per maggiori informazioni, istruzioni sull'utilizzo e video dimostrativi.

NUEAR™

Via Lombardia, 2A
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. +39 02 92 72 181
info@starkey.it - www.starkey.it

L'app potrebbe presentare lievi differenze a seconda del telefono. NOTA: i telefoni dello stesso modello possono variare da Paese a Paese. Ciò potrebbe influire sulla compatibilità in alcuni Paesi.

NuEar, il logo NuEar, G Series, NuEar Edge, Genesis e Omega sono marchi commerciali di Starkey Laboratories, Inc. ©2026 Starkey Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Apple Watch®, Apple e App Store sono marchi commerciali di Apple, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. Google Play e Android sono marchi commerciali di Google, LLC.

©2026 Starkey Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati. P00008882 2/26 BROCC3009-02-IT-NE

NUEAR

HEAR Circle

App Mobile

Facile come sempre.
Potente quanto basta.





Gli apparecchi acustici wireless NuEar possono connettersi all'app Hear Circle compatibile tramite la tecnologia Bluetooth®.

- **Sentire meglio ovunque**

Effettua regolazioni in tempo reale per ottenere un ascolto più chiaro e una riduzione del rumore anche negli ambienti di ascolto più difficili.

- **Suggerimenti, strumenti e risorse**

Adattati all'uso degli apparecchi acustici più velocemente grazie a istruzioni d'uso rapide, consigli, e video. Tutto su misura in base al tuo percorso uditivo.

- **Monitoraggio salute e benessere**

Monitora le attività e l'esercizio fisico quotidiani per mantenerti in salute. Stabilisci e raggiungi i tuoi obiettivi salute, passi, esercizio fisico e altro ancora.

**Prendersi cura del proprio udito non è mai stato così facile.
Vivi al meglio la tua vita con Hear Circle.**

Hear Circle è compatibile con gli apparecchi acustici wireless Omega AI, Edge AI, NE Series AI e NXG AI.



Collegamento di uno o più apparecchi acustici con un dispositivo Apple compatibile

1. Sul dispositivo, assicurati che il **Bluetooth** sia **attivo**.
2. Seleziona **Impostazioni > Accessibilità > Apparecchi acustici**.
3. **Spegni e riaccendi** gli apparecchi acustici per attivare la modalità di abbinamento.
4. Dovresti visualizzare i tuoi apparecchi acustici sotto **APPARECCHI ACUSTICI MFI** (ad es. **"Apparecchi acustici di Jane"**). Seleziona questa voce.
5. Seleziona **Abbina** per ogni apparecchio acustico (**DESTRO** e **SINISTRO**). L'abbinamento è completato.
6. Apri l'**app Hear Circle** e segui le istruzioni per creare il tuo account e collegare gli apparecchi acustici.



Cambia i programmi e regola il volume in modo rapido e intuitivo sul tuo Apple Watch compatibile.

Per istruzioni su come installare l'app Hear Circle sul tuo Apple Watch, visita la **sezione Impara** dell'app.



Collegamento di uno o più apparecchi acustici con un dispositivo Android compatibile

1. Seleziona l'**icona Impostazioni** sul tuo dispositivo.
2. Assicurati che il **Bluetooth** sia **attivo**.
3. **Spegni e riaccendi** gli apparecchi acustici per attivare la modalità di abbinamento.
4. Apri l'**app Hear Circle** e segui le istruzioni per creare il tuo account e collegare gli apparecchi acustici.
5. Quando vengono elencati gli apparecchi acustici, seleziona una o più caselle accanto a ogni apparecchio acustico (**DESTRO** e **SINISTRO**). Seleziona **CONNETTI**. L'abbinamento è completato.

