


QUICKTIP


Microphone de table StarLink

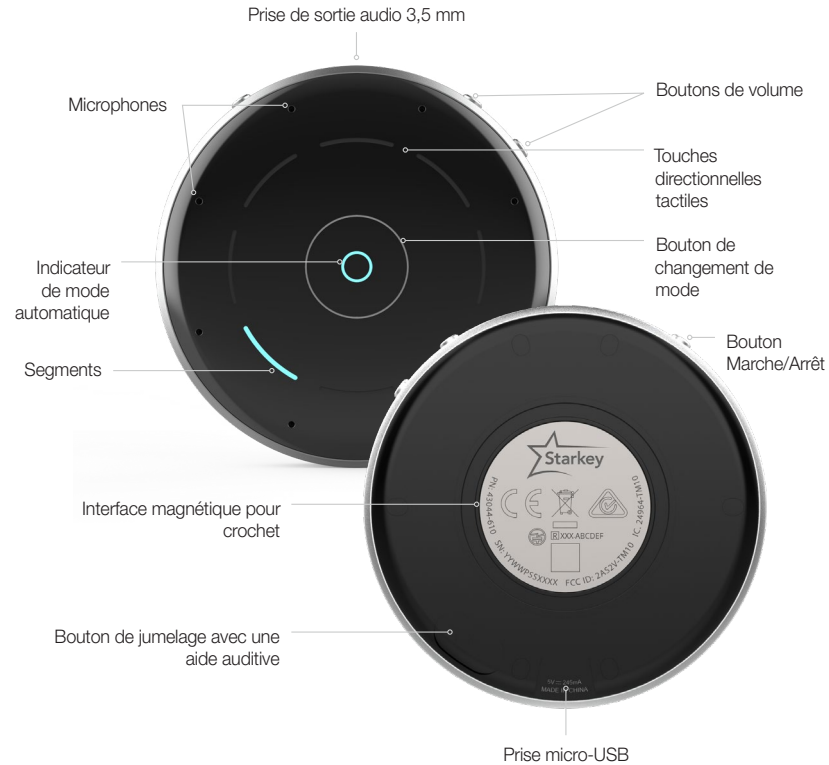


Jumelage

Le microphone de table 2.4 GHz doit être jumelé pour interagir avec les aides auditives 2.4 GHz compatibles utilisant les plateformes Neuro Processor et Thrive. Le jumelage ne doit être réalisé qu'une seule fois, les aides auditives et le microphone de table se reconnaissent ensuite automatiquement. Il est possible de jumeler le microphone de table au sein du logiciel d'adaptation ou en dehors.


Jumelage dans Pro Fit


- 1 Lancez Pro Fit et connectez les aides auditives.
- 2 Sélectionnez **Accessoires** depuis la Session de préparation dans Pro Fit ou à partir du **Menu volant** ☰.
- 3 Assurez-vous que le microphone de table est allumé en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que les voyants s'allument en vert.
- 4 Placez les aides auditives à moins de 15 cm du microphone de table.
- 5 Mettez le microphone de table en mode jumelage en appuyant sur le bouton de jumelage avec une aide auditive  situé en bas de l'appareil pendant 2 secondes. Les voyants bleus clignotants situés en haut de l'appareil indiquent que le microphone de table est en mode jumelage.
- 6 Sélectionnez **+** pour mettre les aides auditives en mode jumelage.
- 7 Le jumelage est effectif lorsque le microphone de table s'affiche sur l'écran Accessoires.
- 8 Utilisez le menu déroulant au-dessus du microphone de table pour régler le statut du **microphone d'aide auditive lors du streaming**.
- 9 Utilisez le menu déroulant au-dessous du microphone de table pour optimiser le son du streaming. Les options possibles sont Égalisé (par défaut), Amplification des aigus et Amplification des graves. Au besoin, sous Options de son du streaming, sélectionnez le niveau d'amplification souhaité.
- 10 Si nécessaire, sélectionnez **Informations de jumelage** pour obtenir des instructions.

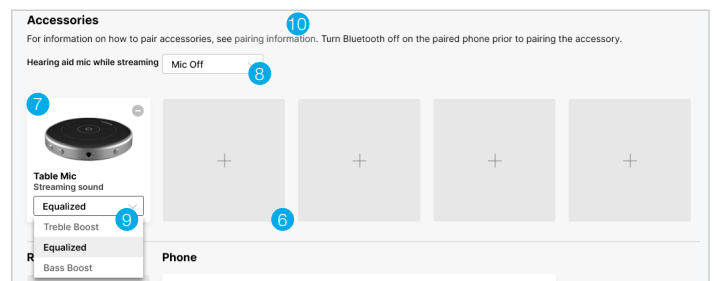


Jumelage (suite)


Jumelage dans Inspire X

- 1 Lancez Inspire X puis connectez les aides auditives afin de les détecter.
- 2 Sélectionnez **Accessoires** dans la barre de navigation de gauche.
- 3 Assurez-vous que le microphone de table est allumé en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que les voyants s'allument en vert.
- 4 Placez les aides auditives à moins de 15 cm du microphone de table.
- 5 Mettez le microphone de table en mode jumelage en appuyant sur le bouton de jumelage avec une aide auditive  situé en bas de l'appareil pendant 2 secondes. Les voyants bleus clignotants situés en haut de l'appareil indiquent que le microphone de table est en mode jumelage.
- 6 Sélectionnez **Jumeler** pour mettre les aides auditives en mode jumelage.
- 7 Le jumelage est effectif lorsque le microphone de table s'affiche sur l'écran Accessoires.
- 8 Utilisez le menu déroulant au-dessous du microphone de table pour régler le statut du **microphone d'aide auditive lors du streaming**.
- 9 Si nécessaire, cliquez sur l'icône d'information pour en savoir plus sur le processus de jumelage.

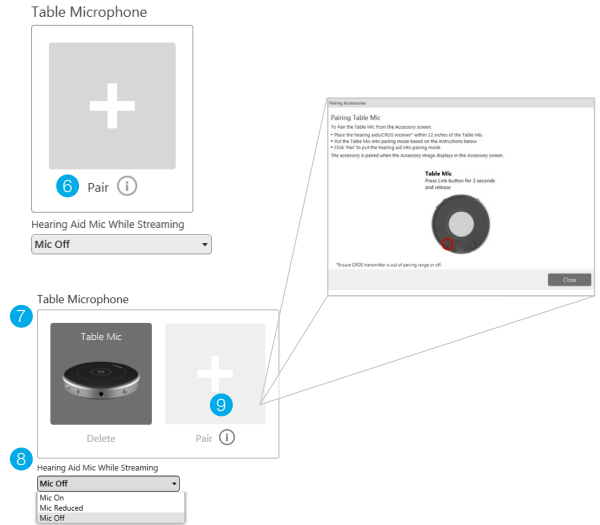


Jumelage en dehors du logiciel

- 1 Éteignez tout smartphone ou autre accessoire déjà jumelé aux aides auditives.
- 2 Éteignez puis rallumez les aides auditives pour passer en mode jumelage.
- 3 Placez les aides auditives à moins de 15 cm du microphone de table.
- 4 Mettez le microphone de table en mode jumelage en appuyant sur le bouton de jumelage avec une aide auditive  situé en bas de l'appareil pendant 2 secondes. Les voyants bleus clignotants situés en haut de l'appareil indiquent que le microphone de table est en mode jumelage **(A)**.
- 5 Un voyant vert indique que le jumelage est effectif **(B)**. Un voyant correspond à l'aide auditive gauche et un autre à l'aide auditive droite.

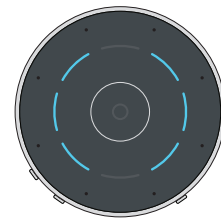


(A) Recherche d'aides auditives

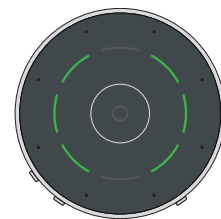

(B) Jumelage de l'aide auditive réussi

Comment ça marche ?


Le microphone de table est conçu pour améliorer l'écoute dans le bruit en permettant à l'utilisateur de se concentrer sur l'intervenant principal en présence de plusieurs personnes, par exemple lors d'une réunion. Le microphone de table peut également faire office de microphone déporté portatif ou d'émetteur TV. Associé à un casque filaire, le microphone de table peut aussi faciliter l'écoute dans le bruit d'auditeurs non appareillés ou normo-entendants.

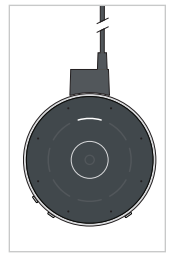

Modes d'utilisation

Mode automatique : Appuyez sur le Bouton de changement de mode (au centre).

Le O s'allume en bleu une fois le mode automatique activé. Lorsque l'Indicateur de mode automatique est allumé, le microphone de table suit automatiquement l'intervenant principal. Le segment bleu indique la direction d'écoute active.

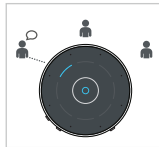


Mode Surround : Conçu pour écouter plusieurs intervenants dans un environnement calme.

- Appuyez sur le Bouton de changement de mode pour désélectionner le Mode automatique et mettre le microphone de table en Mode Surround. Tous les segments bleus indiquent une écoute dans toutes les directions.




Mode manuel : Unidirectionnel

- Appuyez sur n'importe quel segment pour viser une direction spécifique.
- Appuyez sur un autre segment pour viser une autre direction.

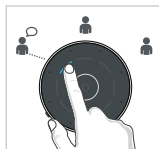

Microphone extérieur : Le microphone de table peut être utilisé comme microphone déporté lorsqu'il est porté avec un cordon autour du cou. Il est préférable que le microphone de table se trouve à moins de 20 cm de la bouche de l'intervenant.

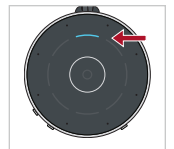

Mode manuel : Bidirectionnel

- Appuyez sur un deuxième segment pendant 1 seconde pour viser une deuxième direction.
- Appuyez sur un autre segment pour viser une autre direction.




- Fixez le crochet magnétique à l'arrière du microphone de table. Vérifiez que le crochet tient bien.
- Lorsque le microphone de table est porté par l'intervenant, le voyant supérieur s'allume pendant 3 secondes.

Modes d'utilisation (suite)

Streaming TV/audio : Le microphone de table peut être utilisé pour transmettre le son d'un téléviseur, d'un lecteur MP3 et d'autres appareils lorsqu'il est connecté via la prise de sortie audio 3,5 mm.


- Insérez le câble de streaming audio dans la prise micro-USB.
- Insérez la fiche 3,5 mm du câble de streaming audio dans la prise de sortie audio.

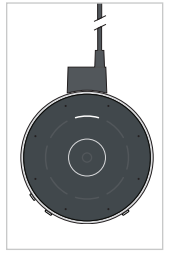

Utilisation

Le microphone de table peut être jumelé à une paire d'aides auditives 2.4 GHz compatibles utilisant la plateforme Neuro Processor ou Thrive. Pour une performance optimale, assurez-vous que les boutons de volume et de marche/arrêt du microphone de table sont face à vous.

- Le streaming audio commence automatiquement lorsque le microphone de table est allumé. Le streaming audio s'arrête lorsque le microphone de table est éteint.
 - En outre, le streaming audio peut être démarré/arrêté de plusieurs façons :
 - Contrôle utilisateur d'aide auditive : Pression longue ou Double tapotement
 - Télécommande : bouton Favori
 - Application Thrive Hearing Control
 - Pour régler le volume du streaming, appuyez sur les boutons + ou - du microphone de table. Le segment supérieur blanc clignote lorsque le volume est augmenté et le segment inférieur blanc clignote lorsque le volume est diminué.
 - La distance de fonctionnement du microphone de table est de 10 mètres maximum.
 - Pleinement chargé, le microphone de table assure jusqu'à 12 heures de streaming.
 - Le microphone de table atteint sa pleine charge en 2 heures environ.
- Voyants de niveau de batterie :
 - (A) **Les segments verts** indiquent le niveau de charge de la batterie. Chaque segment représente une heure. Le segment vert clignotant indique le niveau actuel.
 - (B) Des segments **orange** indiquent moins de deux heures d'autonomie.
 - (C) Un segment **rouge** indique moins d'une heure d'autonomie.

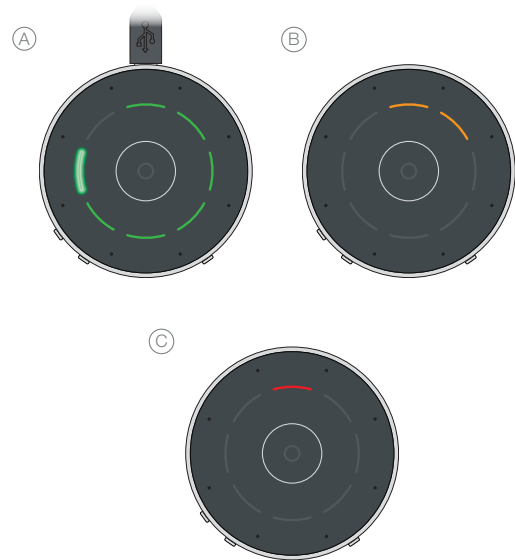

Connexion d'entrée/de sortie de ligne :
Segment supérieur blanc clignotant pour connexion d'entrée de ligne (ex : son d'un téléviseur). Segment inférieur blanc clignotant pour connexion de sortie de ligne (ex : écouteurs filaires).