


Konfiguracja aplikacji Thrive Hearing Control

Wersja dla iPhone

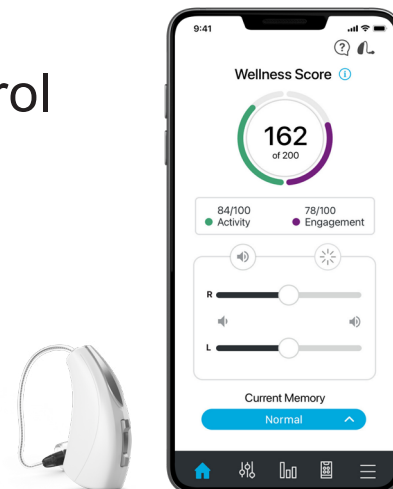

Pobranie aplikacji Thrive Hearing Control

Musisz posiadać Apple ID, aby pobrać aplikację. W celu konfiguracji konta wejdź na <https://support.apple.com/pl-pl/apple-id>



- 1 Gdy posiadasz już skonfigurowane konto, otwórz App Store.
- 2 Wyszukaj aplikacji Thrive Hearing Control.
- 3 Wybierz Pobierz.



Parowanie

Sparowanie powinno zostać ukończone po zaprogramowaniu aparatów słuchowych w programie Inspire X. Upewnij się, że Inspire X jest zamknięty przed rozpoczęciem parowania.

- 1 Wybierz **Ustawienia > Dostępność > Aparaty słuchowe**
- 2 Upewnij się, że Bluetooth jest włączony.
- 3 Wyłącz i włącz aparaty słuchowe, aby wprowadzić je w tryb parowania.
- 4 Wybierz aparaty słuchowe, gdy pojawią się na ekranie.
- 5 Po wyświetleniu komunikatu wybierz opcję **Połącz**. W przypadku pary aparatów słuchowych wybierz **Połącz** dwukrotnie.
- 6 Upewnij się, że przy nazwie aparatu słuchowego widnieje status "Połączono".

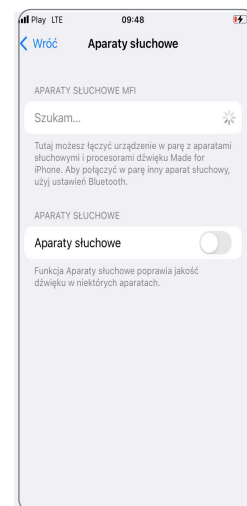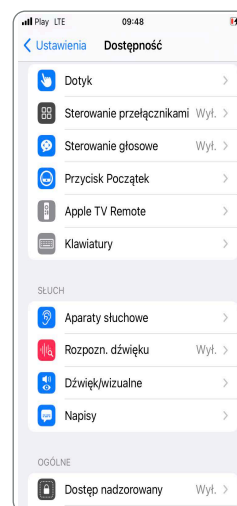

Konfiguracja iPhone

Aparaty słuchowe i iPhone współpracują ze sobą, aby zapewnić obustronne przesyłanie strumieniowaniowe rozmów telefonicznych i innych dźwięków, takich jak muzyka, filmy i wskazówki GPS.

Zmień wyjście audio dla połączeń telefonicznych i strumieniowanych multimediiów poprzez:

- 1 **Ustawienia > Dostępność > Aparaty słuchowe > Wyjście Audio**
- 2 Wybierz **Połączenia**, aby zmienić wyjście audio dla połączeń telefonicznych lub Multimedia, aby zmienić wyjście audio dla strumieniowanych multimediiów.

Opcje zawierają:

- Zawsze aparaty słuchowe - dźwięk będzie domyślnie przesyłany strumieniowo do aparatów słuchowych
- Nigdy aparaty słuchowe - dźwięk będzie domyślnie przesyłany strumieniowo do urządzenia Apple
- Automatycznie - dźwięk będzie przesyłany strumieniowo do aktualnie podłączonego urządzenia Bluetooth (jest to zarządzane przez iOS);
Wyjście audio i multimediiów domyślnie ustawione na Automatyczne

Odtwarzaj dzwonki

Dzwonek telefonu iPhone może być odtwarzany w aparatach słuchowych, gdy pojawi się połączenie przychodzące.

Opcja Odtwarzaj dzwonki jest domyślnie wyłączona.

W celu włączenia tej opcji wybierz:


- 1 **Ustawienia > Dostępność > Aparaty słuchowe**
- 2 Przesuń Odtwarzaj Dzwonki do pozycji włączonej. Po odebraniu połączenia przychodzącego użytkownik usłyszy swój unikalny dzwonek iPhone'a w swoich aparatach słuchowych.

Kontrola aparatu słuchowego

Dodanie "Słuchu" umożliwi pojawienie się ikony z uchem, gdy przesuniesz palcem, aby uzyskać dostęp do centrum sterowania.

- 1 **Ustawienia > Centrum sterowania > Więcej narzędzi > Słuch**
- 2 Uzyskaj dostęp do poniższych funkcji bez otwierania aplikacji Thrive:

- Poziom baterii
- Regulacja głośności
- Programy
- Aktualne odtwarzanie

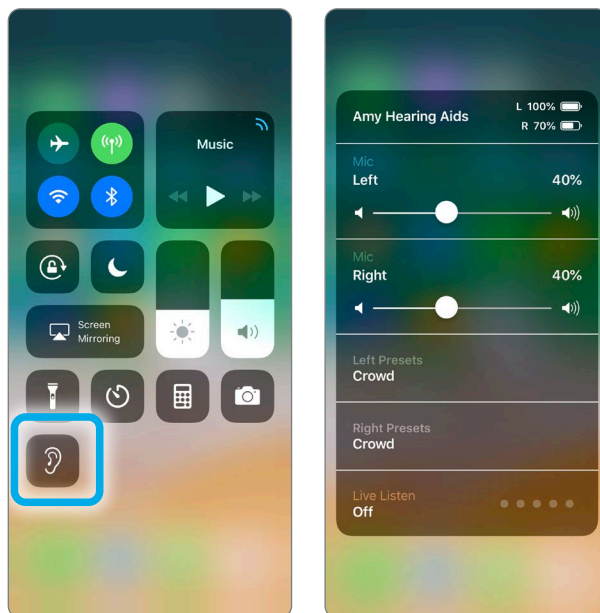

Konfiguracja wstępna aplikacji Thrive Hearing Control

Po otwarciu aplikacji Thrive po raz pierwszy, pojawiające się ekrany dostarczają użytkownikowi informacji o funkcjonalności aplikacji. Dotknij **Rozpocznij**, aby rozpocząć proces konfiguracji aplikacji.

Umowa licencyjna użytkownika Thrive **A**

Przeczytaj, a następnie zaznacz pole, aby potwierdzić zapoznanie się z umową licencyjną użytkownika Thrive. Dotknij **Zgadzam się**, aby kontynuować.

Logowanie do Chmury **B**

Zaloguj się używając konta Facebook, Google lub utwórz konto przy pomocy adresu e-mail i hasła. Łączność z Chmurą umożliwia przechowywanie i archiwizowanie informacji dla TeleHear, powiadamiania o upadkach oraz z aplikacji/aparatu słuchowego. Jeśli wybierzesz Pomiń Chmurę możesz zalogować się później, przechodząc do aplikacji **Thrive Ustawienia > TeleHear > Zaloguj się**.

Połączenie z aparatami słuchowymi **C**

Aplikacja Thrive połączy się z aparatami słuchowymi. Komunikat zapyta, czy użytkownik chciałby połączyć się z Bluetooth. Wybierz **OK**.

Przegląd funkcji aplikacji Thrive **D**

Przegląd funkcji aplikacji Thrive przedstawia krótkie informacje i praktyczne zastosowanie powszechnie używanych regulacji użytkownika i funkcji jakie posiada aplikacja. Użytkownicy mogą pominąć ekrany informacyjne lub konfiguracyjne, wybierając opcję **Pomiń** lub **Skonfiguruj** później.

Dostosuj głośność: **E**

Użytkownicy mogą eksperymentować z regulacją głośności aparatu słuchowego. Dotknij **Kontynuuj**, aby kontynuować.

Programy: **F**

Użytkownicy mogą eksperymentować ze zmianą programów. Dotknij **Kontynuuj**, aby kontynuować.

Śledź aktywność umysłową i fizyczną: Dotknij **Kontynuuj** aby kontynuować.

Znajdź Mój Aparat: **G**






Wybierz **Włącz Znajdź Mój Aparat słuchowy**, aby włączyć tę funkcję. Użytkownik zostanie zapytany, czy pozwalać aplikacji Thrive na używanie lokalizacji. Wybierz: **Pozwalaj**, gdy używam aplikacji, **Pozwól raz** lub **Nie pozwalaj**.

Powiadomienia i przypomnienia: **H**

Pozwól aplikacji Thrive na udostępnienie powiadomień, wybierając **Włączyć powiadomienia**. Dotknij **Pozwalaj** lub **Nie pozwalaj**.

Asystent Thrive: **I**

Wybierz **Zezwól na dostęp do mikrofonu**, aby kontynuować, później **OK**.

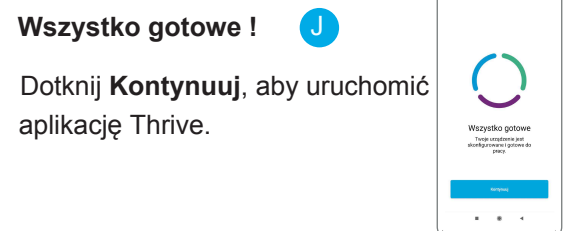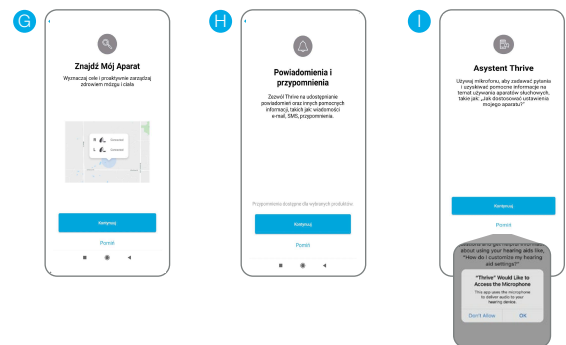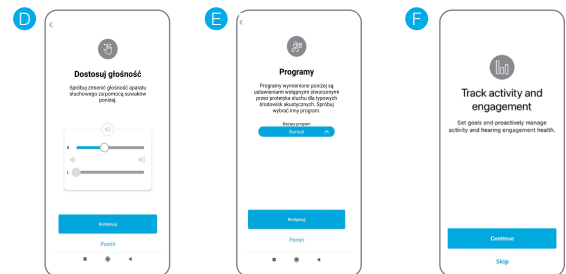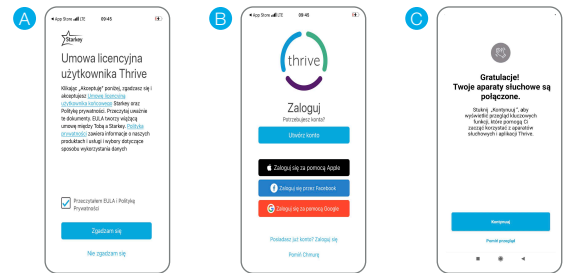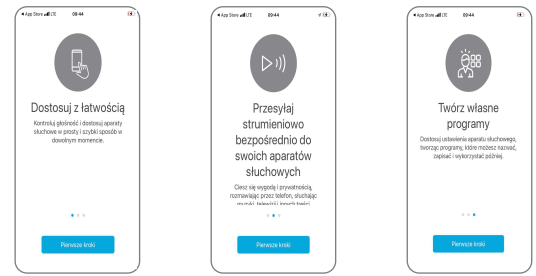


Ustawienia urządzenia


Zaawansowane ustawienia aparatów słuchowych mogą być włączone/wyłączone w tym menu.


O moich urządzeniach: Wyświetla model, poziom technologiczny i numery seryjne aparatów słuchowych, a także aktualną wersję oprogramowania.

Powiadomienia: Włączenie powiadomień umożliwia odtworzenie sygnału w aparatach słuchowych podczas odbierania rozmów telefonicznych. Dotknij niebieski prostokąt, aby odegrać alert.

Wybierz Gest: Włącz lub wyłącz możliwość regulacji przez dotknięcie.

Funkcja Podwójne dotknięcie pozwala na uruchomienie działania Akcesoriów/zatrzymanie strumieniowania, Trybu Edge i Asystenta Thrive. Ustaw preferowaną funkcjonalność Podwójnego Dotknięcia dla prawego i lewego aparatu słuchowego przez dotknięcie ikony ołówka.  Wybierz czułość dotknięcia między **Mniej**, **Domyślne** lub **Więcej**. Dostępne tylko dla aparatów słuchowych AI.F

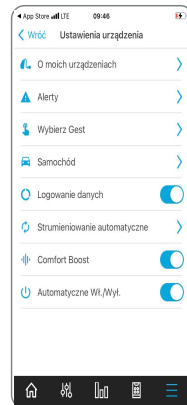

Samochód: Włącz opcję Samochód dla automatycznego włączenia się dedykowanego programu podczas podróży samochodem. Dotknij Ok, aby umożliwić dostęp do czujnika ruchu telefonu w celu zapewnienia automatycznych zmian programu, gdy pojazd osiąga prędkość 16 km na godzinę lub większą. Określ, którego programu używa tryb Automatyczny samochód, klikając  i wybierając preferowany program.

Logowanie danych: Włącz lub wyłącz opcję logowania danych. Wyłączenie logowania danych eliminuje możliwość generowania wyniku zaangażowania.

Strumieniowanie Automatyczne: Włącz lub wyłącz opcję automatycznego strumieniowania. Automatyczne strumieniowe jest domyślnie włączone po zaprogramowaniu aparatów w Inspire X. Jeśli automatyczne przesyłanie strumieniowe jest wyłączone, program nie zmieni się sam podczas przesyłania strumieniowego.

Media Audio: Akceptuj/kończ/odrzucaj połączenia. Włączenie tej funkcji pozwala użytkownikowi aparatu słuchowego na odbieranie, odrzucanie i kończenie połączeń telefonicznych w telefonach Apple. Po zaprogramowaniu w Inspire X funkcja akceptuj/kończ/odrzucaj połączenia jest domyślnie włączona.

Automatyczne włączanie/wyłączanie: dotknij suwaka, aby dezaktywować/aktywować automatyczne włączanie/wyłączanie. Automatyczne włączanie/wyłączanie pozwala aparatom słuchowym na automatyczne przejście w tryb niskiego poboru mocy, gdy te nie są używane. Dostępne tylko dla aparatów słuchowych AI.

Speech Assistant Mic: Dotknij Mikrofon aparatu słuchowego lub Mikrofon telefonu, aby wybrać preferencje użycia mikrofonu dla Asystenta Thrive. Mikrofon aparatu słuchowego jest ustawiony domyślnie.

Konfiguracja Wellness Score

Ustaw informacje dotyczące śledzenia aktywności, aby zapewnić najdokładniejsze obliczenia Wellness Score.

- **Śledzenie Aktywności:** Dostosuj cele wyników aktywności, w tym kroki, ćwiczenie i stanie. Informacje można modyfikować w dowolnym momencie, przechodząc do opcji **Ustawienia > Wellness Score > Śledzenie aktywności**.

The app may look slightly different depending on your phone and/or hearing aid model.

The Starkey logo, Thrive, Thrive logo, Inspire and TeleHear are trademarks of Starkey Laboratories, Inc. | Apple, the Apple logo, iPhone, iPod touch, App Store and Siri are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license. | The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license. | Google is a trademark of Google LLC. ©2022 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved. 8/22 FLYR3475-03-PL-SC



Hear better. Live better.