

QUICKTIP

Protection pare-cérumen écouteur Hear Clear

Produit disponible : RIC et intra-auriculaires

Le système de protection Hear Clear utilise une protection jetable. Cette protection innovante empêche l'accumulation de cérumen dans l'écouteur de l'aide auditive. La barrette d'application est jaune.

L'entretien régulier et le remplacement des protections anti-cérumen Hear Clear permettent d'assurer une performance optimale des aides auditives.


NOTE : les protections Hear Clear ne sont pas compatibles avec les aides auditives d'autres fabricants.

Insertion et extraction


- 1 Insérer l'extrémité vide de la barrette d'application dans la protection usagée de l'aide auditive.

NOTE : Enfoncer directement la barrette dans la protection usagée. Il n'est pas nécessaire de la tourner.

- 2 Retirer la barrette pour extraire la protection usagée.
- 3 Utiliser l'extrémité opposée de la barrette pour insérer la nouvelle protection dans l'aide auditive en appuyant fermement.
- 4 Tirer vers l'extérieur pour retirer la barrette puis la jeter.

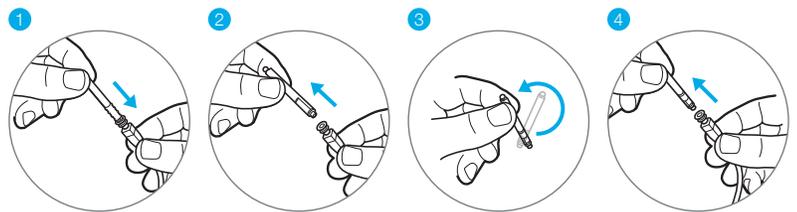

RIC

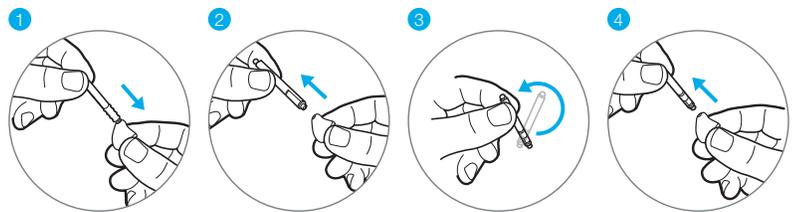

Intra-auriculaires

Utilisation

- Les protections pare-cérumen pour écouteur Hear Clear sont disponibles sur commande par packets de 8 et 48.
- Les packets de 8 sont livrés avec les RIC, les intra-auriculaires, les écouteurs RIC et écouteurs AP (Absolute Power) ou les écouteurs sur-mesure.
- Les commandes comprennent des packets bleus de 8 barrettes jaunes et des instructions de remplacement.

