

# Table Microphone

MANUAL DE OPERACIONES



---

<b>Resumen</b> . . . . .	<b>2</b>
<b>Indicadores</b> . . . . .	<b>8</b>
<b>Uso básico</b> . . . . .	<b>12</b>
<b>Vinculación</b> . . . . .	<b>13</b>
<b>Uso diario</b> . . . . .	<b>16</b>
<b>Llevar el Table Microphone</b> . . . . .	<b>21</b>
<b>Montaje del adaptador de corriente</b> . . . . .	<b>22</b>
<b>Auriculares con cable</b> . . . . .	<b>23</b>
<b>Resolución de problemas</b> . . . . .	<b>25</b>
<b>Información de seguridad</b> . . . . .	<b>27</b>
<b>Avisos reglamentarios</b> . . . . .	<b>30</b>

### Resumen

El Table Microphone de Starkey es un dispositivo de asistencia auditiva y transmisor de TV. Transmite audio directamente a sus audífonos inalámbricos de 2,4 GHz.


Modos clave de uso:

- Table Microphone: transmite la voz de destino desde una dirección seleccionada en los siguientes modos:
  - o Automático
  - o Manual
    - Dirección única
    - Dirección doble
  - o Envoltente
- Micrófono remoto: transmite la voz de la persona que lleva el dispositivo
- Transmisor de TV: transmite audio a través de un microUSB de entrada


**Transmisión** - El audio o el vídeo se transmiten de forma inalámbrica directamente desde el Table Microphone a sus audífonos.

## Contenido del paquete

- Table Microphone
- Adaptador de corriente y cable USB a MicroUSB
- Conectores para hasta cuatro territorios:
  - o Estados Unidos
  - o Europa
  - o Australia
  - o Reino Unido
- Manual de operaciones
- Bolsa
- Auriculares con cable con coberturas externas
- Cable de transmisión de TV
- Gancho con cordón
- Funda de silicona

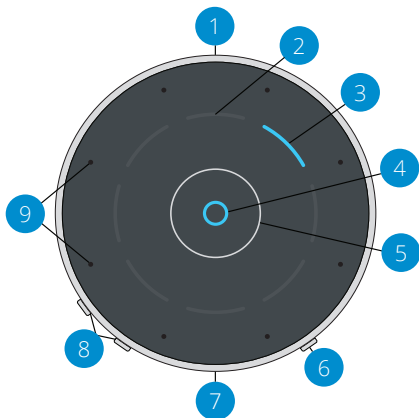

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Clavija MicroUSB              | 6. Botón de encendido         |
| 2. Teclas táctiles direccionales | 7. Entrada de audio de 3,5 mm |
| 3. Segmentos                     | 8. Botones de volumen +/-     |
| 4. Indicador de modo automático  | 9. Micrófonos                 |
| 5. Botón de cambio de modo       |                               |

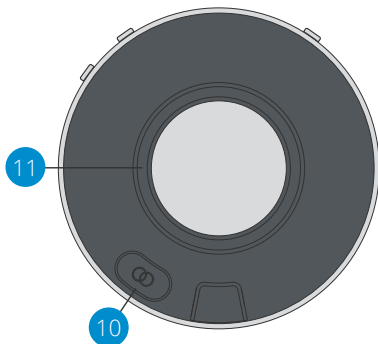

- 10. Botón de vinculación de audífonos
- 11. Interfaz magnética para gancho

### 1. **Clavija MicroUSB**

- Recargable mediante un cable USB a MicroUSB
- Transmite audio a través del cable de transmisión de TV

### 2. **Teclas táctiles**

- Selección manual de una dirección única o dual

### 3. **Segmentos:**

- Indica la dirección o direcciones seleccionadas
- Indicadores operacionales, que indican:
  - o Estado de carga
  - o Energía
  - o Estado de la batería
  - o Estado de vinculación
  - o Volumen
  - o Conectividad de entrada/salida

### 4. **Indicador de modo automático**

- Encendido indica modo Automático
- Apagado indica modo Envoltente o Manual

### 5. **Botón de cambio de modo**

- Cambia entre los modos Automático y Envoltente

### 6. **Botón de encendido**

- Presiónelo para encender/apagar

**7. Entrada de audio de 3,5 mm**

- Para la conexión de auriculares con cable

**8. Botones de volumen +/-**

- Ajustan el volumen de transmisión

**9. Micrófonos**

- Recogen la voz del hablante

**10. Botón de vinculación de audífonos**

- Para vincular y conectar con los audífonos

**11. Interfaz magnética para gancho**


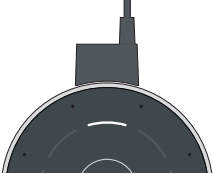
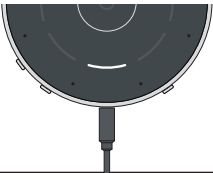


- Para el modo de Micrófono Remoto




## Indicadores

### Indicadores operacionales

	<p><b>Recarga</b></p> <p>Los segmentos verdes indican el nivel de carga de la batería. Cada segmento representa aproximadamente 1 hora. El segmento verde parpadeante indica el nivel actual. Si se carga durante el uso, todos los segmentos verdes interrumpirán brevemente otros indicadores cuando la batería esté completamente cargada.</p>
	<p>Los segmentos de color naranja indican menos de 2 horas de duración de la batería.</p>
	<p>El segmento de color rojo indica menos de 1 hora de duración de la batería.</p> <p>El segmento de color rojo parpadeante indica que la batería está descargada.</p>

 A top-down view of a circular, dark-colored device. On its side, there are four small, circular buttons: a power button with a power symbol, a volume up button with a plus sign, a volume down button with a minus sign, and a microphone button with a microphone icon.	<p><b>Orientación del producto</b></p> <p>Para lograr el máximo rendimiento, asegúrese de que los botones de Volumen y Encendido del Table Microphone estén mirando hacia usted.</p>
 A front view of the device, which is semi-circular. A white curved segment is visible at the top edge, indicating an input connection.	<p><b>Línea de entrada</b></p> <p>El segmento superior blanco indica una conexión de entrada (por ejemplo, audio de TV).</p>
 A front view of the device, which is semi-circular. A white curved segment is visible at the bottom edge, indicating an output connection.	<p><b>Línea de salida</b></p> <p>El parpadeo del segmento inferior blanco indica una conexión de salida (auriculares).</p>
 A front view of the device, which is semi-circular. A white curved segment is visible at the top edge, indicating a volume increase.	<p><b>Volumen +</b></p> <p>El segmento superior blanco parpadea cuando se sube el volumen.</p>
 A front view of the device, which is semi-circular. A white curved segment is visible at the bottom edge, indicating a volume decrease.	<p><b>Volumen -</b></p> <p>El segmento inferior blanco parpadea cuando se baja el volumen.</p>

**Indicadores de vinculación de los audífonos**

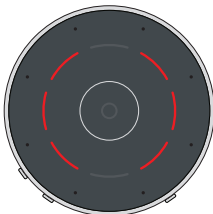	<b>Soportes azules intermitentes</b>	Buscando el audífono o audífonos.
	<b>Soportes verdes sólidos</b>	Los audífonos se han vinculado correctamente.
	<b>Soportes rojos sólidos</b>	Los audífonos no se han vinculado correctamente.

Consulte «Vinculación con audífonos» en la página 13 para más información sobre la vinculación de audífonos monoaurales o binaurales.

**Indicadores de transmisión de conversación**

	<p><b>Automático</b></p> <p>Indicador de modo Automático (O) de color azul sólido.</p> <p>El segmento azul indica la dirección de escucha activa.</p>
	<p><b>Manual simple/dual</b></p> <p>Uno o dos segmentos azules indican la dirección o direcciones de escucha seleccionadas.</p>
	<p><b>Envoltante</b></p> <p>Todos los segmentos azules indican la escucha en todas las direcciones.</p>



## Uso básico

1. Para encender el Table Microphone, presione el botón de encendido.
2. Los segmentos verdes indican el nivel de carga de la batería.
3. Asegúrese de que los audífonos estén encendidos.

**Nota:** Antes de transmitir audio por primera vez, los audífonos deben ser vinculados con el Table Microphone. Consulte **Vinculación** en la página 13.

4. Para iniciar la transmisión de audio, abra la aplicación Thrive Hearing Control y seleccione Iniciar transmisión desde la pantalla Accesorios en la página 20 para ver opciones adicionales.
5. Para ajustar el volumen de la transmisión, presione el botón + o -.
6. Para detener la transmisión, apague el Table Microphone.

Consulte **Iniciar/Detener la transmisión de audio** en la página 20 para ver opciones adicionales.

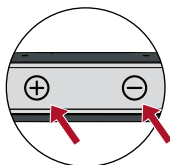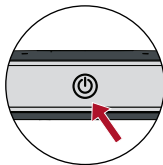

## Vinculación

Para que el Table Microphone interactúe con los audífonos, primero debe vincularlo con cada uno de ellos. Solo debe llevar a cabo esta acción una vez, ya que el Table Microphone y los audífonos se reconocerán automáticamente cuando ambos estén encendidos y se encuentren en el rango de funcionamiento inalámbrico.\* Para vincular el Table Microphone con los audífonos:


1. Asegúrese de que los audífonos no estén conectados a dispositivos Bluetooth® cercanos. Para hacer esto:
  - Desactive la opción de Bluetooth en su teléfono móvil.
  - Apague cualquier micrófono remoto o accesorios de Starkey Hearing Technologies cercano que haya vinculado previamente con los audífonos.
  - Apáguelos y a continuación encienda los audífonos.

**Nota:** Si tiene un sistema de audífonos CROS, apague tanto su audífono como su transmisor CROS.


Encienda únicamente el audífono, asegurándose de que el transmisor CROS continúe apagado.

*El rango de funcionamiento típico es de hasta 10 metros (~30 pies). El rango de funcionamiento puede verse reducido por factores ambientales, tales como obstrucciones, interferencias y el posicionamiento del cuerpo humano. Es posible lograr mayores distancias operativas, aunque la calidad de audio y la conectividad pueden verse afectadas.*

- Coloque sus audífonos a menos de 15 cm (6") del Table Microphone.

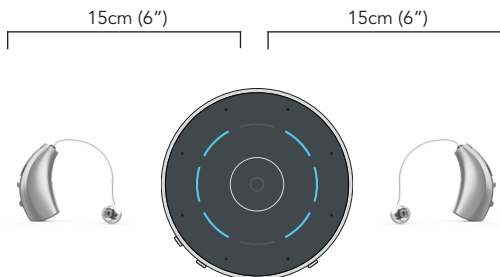

- Presione el botón de vinculación del audífono durante 2 segundos y coloque el Table Microphone boca arriba sobre una superficie. Los soportes azules parpadeantes indican que Bluetooth está listo para realizar la vinculación.

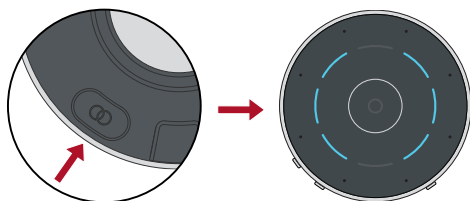

## 4. Para un conjunto de audífonos:

Soporte izquierdo	Soporte derecho	Resultado de vinculación	Siguiente paso
(	)	Ambos audífonos vinculados.	Completo
(	)	Solo se ha vinculado el soporte izquierdo.	Repita los pasos 1 - 3
(	)	Solo se ha vinculado el soporte derecho.	Repita los pasos 1 - 3
(	)	No se han vinculado audífonos.	Repeat steps 1 - 3

## 5. Para un solo audífono:

Soporte izquierdo	Soporte derecho	Resultado de vinculación	Siguiente paso
(		Audífono izquierdo vinculado.	Completo
	)	Audífono derecho vinculado.	Completo
(		Audífono izquierdo no vinculado.	Repita los pasos 1 - 3
	)	Audífono derecho no vinculado.	Repita los pasos 1 - 3




## Uso diario

### Encendido

Presione el botón de Encendido durante 1 segundo y suéltelo.


### Apagado

Presione el botón de Power durante 1 segundo. Los indicadores verdes mostrarán el nivel de la batería y el producto se apagará.

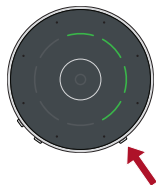

### Batería baja

El indicador o indicadores de dirección activos se iluminan en rojo. En paralelo, se transmite un pitido a los audífonos cada 15 minutos.

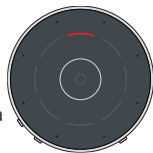

### Recarga de la batería

Conecte el extremo microUSB del cable de carga a la clavija microUSB en el Table Microphone. Conecte el extremo USB del cable de carga a la clavija USB en el adaptador de corriente. Una carga completa alimenta el Table Microphone durante un máximo de 12 horas de transmisión. El dispositivo tarda aproximadamente 2 horas en cargarse completamente.





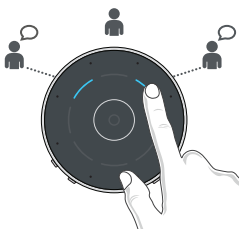

## Modos de transmisión de conversación

Este Table Microphone es un producto versátil e inteligente. Sigue al hablante principal en entornos silenciosos o ruidosos de forma automática a fin de proporcionarle la mejor comprensión posible del habla. El Table Microphone le permite desactivar el modo automático y seleccionar manualmente hasta dos hablantes en el grupo. El modo Envolverte está optimizado para una discusión de grupo grande en entornos silenciosos. Además, el Table Microphone puede ser utilizado por un hablante distante en entornos ruidosos.

## Sobremesa



Coloque el Table Microphone en el centro de una mesa para escuchar a un grupo de personas. Para una mejor comprensión del habla, coloque el Table Microphone siempre lo más cerca posible de los interlocutores.
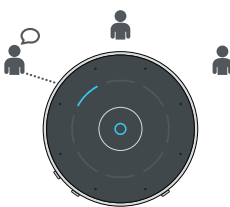
<b>Automático</b>	
	<p>Cuando el indicador de modo Automático se ilumina, el Table Microphone sigue al hablante principal de forma automática.</p> <p>Si el indicador de modo Automático está apagado, toque sobre tecla táctil Automático/Envolverte para activarlo.</p>

<p><b>Hablante individual manual</b></p> 	<p>Toque sobre cualquier segmento para centrarse en un hablante específico.</p>
<p><b>Hablante doble manual</b></p> 	<p>Toque y mantenga presionado (durante 1 segundo) un segundo segmento para centrarse en un hablante adicional.</p>
<p><b>Envolvente</b></p> 	<p>Toque sobre la tecla táctil Automático/Envolvente para escuchar a varias personas en entornos silenciosos.</p> <p>Toque sobre la tecla táctil Automático/Envolvente para volver al modo Automático.</p>

## Transmisión de audio de TV (entrada)

Transmisión de audio desde su TV a sus audífonos

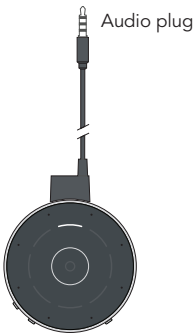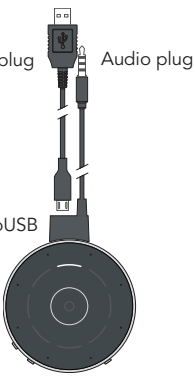 <p>Audio plug</p>	<p>Inserte el cable de transmisión de TV en la clavija microUSB del Table Microphone</p> <p>Inserte el conector de audio de 3,5 mm del cable de transmisión de TV en la clavija de audio del televisor.</p>
 <p>USB plug</p> <p>Audio plug</p> <p>microUSB plug</p>	<p>Para recargar el Table Microphone mientras transmite audio desde su TV, puede insertar el conector microUSB del cable de carga en la clavija microUSB del cable de transmisión de TV.</p> <p>Inserte el conector USB del cable de carga en la clavija de la fuente de alimentación.</p> <p>Conecte la fuente de alimentación a la toma de pared.</p>

## Iniciar/Detener transmisión de audio

La transmisión de audio desde el Table Microphone puede iniciarse o detenerse de diferentes maneras:


- **Al encender el Table Microphone:** La transmisión de audio comienza automáticamente en el audífono.
- **Control remoto de Starkey Hearing Technologies:** Si su profesional de la audición lo ha preconfigurado, presione el botón Favorito.
- **Control del usuario del audífono:** Si su profesional de la audición lo ha preconfigurado, un movimiento específico (por ejemplo, pulsar el control de usuario durante varios segundos)  **puede iniciar o detener la transmisión.**

La transmisión de audio también se detendrá cuando el Table Microphone se apague.

Es posible que un indicador audible se reproduzca en sus audífonos para indicar que la transmisión de audio comienza o se detiene.


## Llevar el Table Microphone

El Table Microphone puede llevarse en un cordón. El Table Microphone debe encontrarse a 20 cm (8") de la boca del hablante.

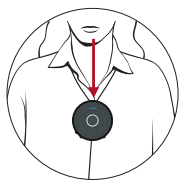


### Cordón


- Conecte el gancho magnético a la parte posterior del Table Microphone. Asegúrese de que el gancho esté insertado y fijado correctamente.

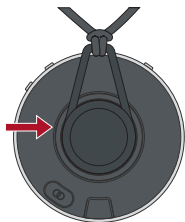

- Coloque el cordón alrededor del cuello. Para ajustar la longitud, sostenga el cilindro y tire del cierre.

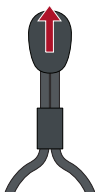


- Cuando el Table Microphone sea llevado por el hablante, el indicador superior se iluminará durante 3 segundos.

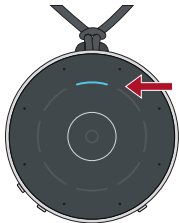


## Montaje del adaptador de corriente

El Table Microphone puede incluir varias configuraciones de enchufes para su uso en diferentes países. Si el adaptador de corriente requiere montaje:


1. Seleccione la configuración de enchufe que sea utilizada en su país.

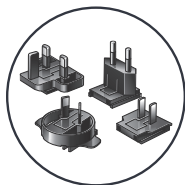


2. Introduzca el enchufe en el adaptador de corriente hasta que encaje en el lugar correspondiente.

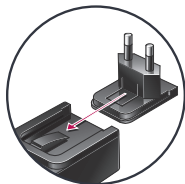

3. Para retirar el enchufe, presione la pestaña y separe el enchufe del cable.

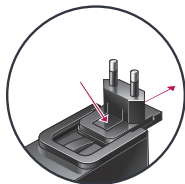

## Auriculares con cable

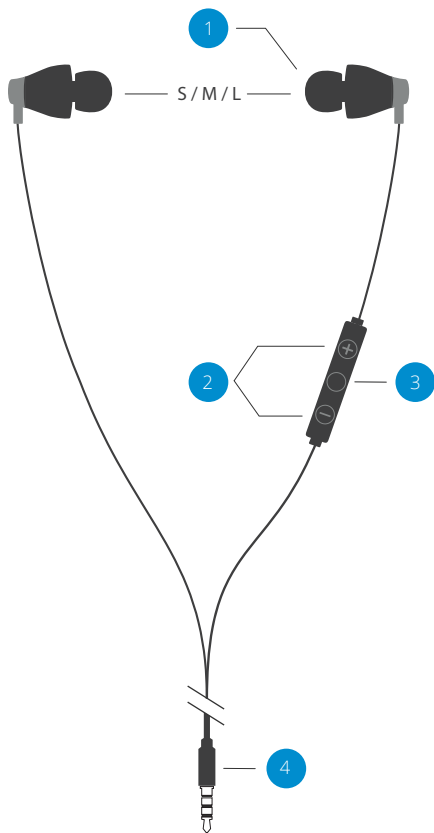



- 1. Almohadillas (pequeñas/medianas/grandes)**
  - Para un ajuste personal
- 2. Volumen +/-**
  - Ajuste el volumen de transmisión de la conversación
- 3. Botón de cambio de modo**
  - Cambia entre los modos Automático y Envolvente
- 4. Conector de audio de 3,5 mm**

## Resolución de problemas

SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
Uno de los audífonos (o ambos) deja de	Los audífonos pueden encontrarse al límite del rango inalámbrico.	Acérquese al Table Microphone.
transmitir audio de forma inesperada.	El nivel de batería en el audífono ya no posibilita la transmisión de audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reemplace la batería del audífono por una nueva.</li> <li>• Recargue el audífono, si es posible.</li> </ul>
	Los objetos grandes, como muebles o las paredes, pueden afectar negativamente a la señal.	Para ofrecer el mejor rendimiento, los audífonos deben encontrarse en el rango visual del Table Microphone.
	Se ha perdido la conexión inalámbrica con el Table Microphone.	Para reiniciar la transmisión de audio, siga los pasos en la sección Iniciar/Detener transmisión de audio.
La calidad de audio transmitida	Nivel de batería bajo en el Table Microphone.	Recargue el Table Microphone.
está distorsionada.	El volumen de la fuente de audio no es el óptimo.	Ajuste el nivel de volumen de la fuente de audio hasta obtener una mejor calidad de sonido.
La calidad de audio transmitida es irregular.	El dispositivo Bluetooth puede encontrarse al límite del rango inalámbrico.	Acerque el dispositivo Bluetooth al Table Microphone.

SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
La transmisión de audio es demasiado alta o demasiado baja.	El volumen transmitido desde el Table Microphone al audífono no es el óptimo.	Presione el botón de volumen + o - en el Table Microphone.
<u>Modo del micrófono de mesa:</u>  Es difícil oír al hablante en entornos ruidosos.	El Table Microphone podría estar muy lejos del hablante.	Acerque el Table Microphone a la boca del hablante.
<u>Modo de Micrófono Remoto:</u> Es difícil oír al hablante en entornos ruidosos.	El Table Microphone podría estar cubierto por ropa o mal colocado.	Facilite un acceso claro desde el Table Microphone a la voz del hablante.
No se escucha ningún sonido transmitido en los audífonos.	Los audífonos no están vinculados al Table Microphone.	Siga los pasos descritos en la sección Vinculación.
	No hay ninguna señal de audio entrante disponible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encienda la fuente de audio electrónica.</li> <li>• Active o aumente el volumen en la fuente de audio electrónica.</li> </ul>
El dispositivo no responde.	Posible estado de error.	<p>Presione el botón de encendido durante 8 segundos para forzar el apagado.</p> <p>Enciéndalo como de costumbre.</p>

## Información de seguridad

### Información requerida



Los desechos de los equipos electrónicos deben ser tratados de acuerdo con las normativas locales.

### Instrucciones para desechar dispositivos electrónicos viejos

Starkey Hearing Technologies anima, y las leyes de su comunidad local pueden exigir, que este Table Microphone sea desechado siguiendo el proceso local de reciclaje/derecho de productos electrónicos.

Las instrucciones a continuación se facilitan en beneficio del personal de reciclaje/desechos. Le rogamos adjunte este manual cuando deseche el Table Microphone.

### Solo para el personal de reciclaje/desechos

El presente producto contiene una batería de polímero de iones de litio. Para retirar esta batería:

- Apague el Table Microphone.
- Separe las mitades de la carcasa con un destornillador pequeño.
- Corte los cables de la batería de la placa de circuito para evitar el riesgo de cortocircuitos.
- Separe la batería de la carcasa con una cuchilla ancha y plana.

### Uso previsto

Este Table Microphone es un dispositivo de asistencia auditiva que transmite sonido a través de auriculares con cable o audífonos inalámbricos por vía aérea de 2,4 GHz. Cuando es llevado por un hablante lejano en entornos con ruido, funciona como un dispositivo de asistencia auditiva. También funciona como un transmisor de TV al conectarlo a la salida de audio del televisor.

El Table Microphone ha sido diseñado para cumplir con los Estándares Internacionales de Compatibilidad Electromagnética. No obstante, es posible que experimente interferencias causadas por perturbaciones en la línea de alimentación, detectores de metales en aeropuertos, campos electromagnéticos de otros dispositivos médicos, señales de radio y descargas electrostáticas.

El Table Microphone ha sido diseñado para ser limpiado con un paño humedecido con agua jabonosa.

Si utiliza otros dispositivos médicos o lleva dispositivos médicos implantables tales como desfibriladores o marcapasos y le preocupa que su Table Microphone pudiese causar interferencias con su dispositivo médico, póngase en contacto con su médico o el fabricante de su dispositivo médico para obtener información sobre el riesgo de que se produzcan alteraciones. Este Table Microphone no debe ser utilizado durante un procedimiento de resonancia magnética o dentro de una cámara hiperbárica. Este Table Microphone no está formalmente certificado para funcionar en atmósferas explosivas como las que puede haber en minas de carbón o en ciertas fábricas químicas.

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con su dispositivo Starkey debe informarse a su representante local de Starkey Hearing Technologies y a la autoridad competente del Estado miembro en el que está establecido. Un incidente grave se define como cualquier mal funcionamiento, deterioro en las características o rendimiento del dispositivo, o información errónea en el Manual de operaciones/etiquetado del dispositivo que podría provocar la muerte o un deterioro grave en el estado de salud del usuario, o podría provocarlo de forma recurrente.

## Uso en aviones

Este Table Microphone no debe ser utilizado en aviones, a menos que haya sido autorizado expresamente por el personal de vuelo.

## Uso internacional

Este Table Microphone ha sido aprobado para funcionar en frecuencias de radio específicas de su país o región y es posible que su uso no haya sido aprobado fuera de su país o región.

Tenga en cuenta que su uso durante un viaje internacional puede provocar interferencias con otros dispositivos electrónicos, o bien otros dispositivos electrónicos pueden provocar interferencias con su Table Microphone.



Este Table Microphone ha sido diseñado para funcionar y para ser almacenado en un rango de temperaturas de -10 °C (14 °F) a 45 °C (113 °F) y un rango de humedad relativa de 10 % a 95 %.

Las normativas vigentes nos exigen que proporcionemos las siguientes advertencias:



**ADVERTENCIA:** Debe evitarse el uso del Table Microphone directamente al lado de otros equipos electrónicos, ya que esto podría causar un funcionamiento incorrecto. Si tal uso fuese necesario, compruebe si los audífonos y los demás equipos están funcionando de forma habitual.



**ADVERTENCIA:** El uso de accesorios, piezas de repuesto o componentes que no sean aquellos provistos por el fabricante de este Table Microphone podría incrementar las emisiones electromagnéticas y disminuir la inmunidad electromagnética, lo que podría afectar al rendimiento.



**ADVERTENCIA:** Si un equipo de comunicaciones de radiofrecuencia portátil se utiliza a menos de 30 cm (12") del Table Microphone, esto podría afectar negativamente el rendimiento de su audífono. Si esto ocurriese, aléjese del equipo de comunicaciones.

Aunque el Table Microphone no cuenta con una certificación formal (clasif. IP) para la protección contra la entrada de polvo o agua, ha sido probado según IEC 60529 al nivel IP 52. Esto significa que el Table Microphone está protegido del polvo.

La batería del Table Microphone no es reemplazable. No intente reemplazar la batería. El Table Microphone no contiene piezas que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario. No lo abra ni realice modificaciones.

No conecte el Table Microphone a ningún dispositivo que no haya sido descrito en este manual. La vida útil esperada del Table Microphone es de 3 años.

## Descripción técnica inalámbrica

Este Table Microphone funciona en la banda de 2,4-2,4835 GHz con una potencia radiada efectiva máxima de 8 dBm, con un tipo de modulación de transmisión de 1M12FXD y un ancho de banda de 1,1 MHz. La sección del receptor de radio tiene un ancho de banda de 2 MHz.

## Avisos reglamentarios

FCC ID: 2AS2V-TM10

IC: 24964-TM10

IFETEL: RCPSTTM20-2114

### Aviso FCC/IC

Este dispositivo es conforme a la parte 15 de las normas FCC y a los estándares RSS exentos de licencia de ISED Canadá. La operación del dispositivo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del mismo.

NOTA: El fabricante no se hace responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas realizadas en este equipo. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Por la presente, Nuance Hearing declara que el Table Microphone de Starkey Hearing Technologies cumple con los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Puede recibir una copia de la Declaración de Conformidad enviando un correo electrónico a [info@nuancehear.com](mailto:info@nuancehear.com)

### Aviso IFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

**Nuance Hearing**

24 Raoul Wallenberg St.  
Tel Aviv 6971920  
Israel



**Nuance Hearing**

Packhorse Lane Bibury  
Cirencester GL7 5NT  
Inglaterra



Este dispositivo produce energía de radiofrecuencia. Por lo tanto, pueden producirse interferencias en las proximidades de equipos marcados con el siguiente símbolo.



Deséchelo de forma apropiada



Consulte el manual de operaciones



Mantener seco







La marca denominativa y el logotipo Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Starkey se realiza bajo licencia. Starkey y Thrive son marcas comerciales registradas de Starkey Laboratories, Inc.

© 2021 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved.

86334-055 08/21 BKLT3072-04-LS-SG

400-103017-17.0 SP