



Guía de inicio rápido

Livio Edge AI | Livio AI | Livio



Productos a la Medida Recargables

En Starkey creemos que escuchar mejor es vivir mejor

Los audífonos **Livio Edge AI**, **Livio AI** y **Livio a la medida recargable**, lo ayudan a estar conectado con las personas que usted más ama. Estos audífonos de 2.4 GHz de frecuencia le ofrecen la tecnología Starkey más avanzada, así como un sonido y características supremas que permiten personalizarlos de manera que sus audífonos tienen un sistema de adaptación único.



Aproveche al máximo sus audífonos

Visite starkey.com/care para conocer herramientas y recursos adicionales

- Vídeos educativos
- Manuales de operación
- Folletos sobre nuestros productos



Cargando sus audífonos



- Por favor ponga sus audífonos en el cargador con la platina hacía abajo de manera que los postes de carga hagan contacto con el cargador.
- Sus audífonos se apagarán y de inmediato iniciarán a cargar.
- Nota: Las luces LED le pueden indicar:
 - Parpadeando en verde = Cargando
 - Color verde = Carga completa
 - Parpadeando en rojo= Falta de contacto. Para iniciar de nuevo, remueva los audífonos del cargador, espere hasta que la luz LED se apague y vuelva a insertar los audífonos. Si la luz sigue parpadeando, contacte a su profesional de la audición.
- Cuando realice la carga sin el cable del cargador, los LED se apagarán cuando los audífonos están completamente cargados para mantener la batería.
- La carga ocurre con la tapa abierta o cerrada; los audífonos estarán completamente cargados en 3 1/2 Hrs.
- Es seguro mantener sus audífonos en el cargador incluso después de que estén completamente cargados o no los esté utilizando.
- Los audífonos automáticamente encenderán en cuanto sean removidos del cargador.
- Para iluminar las luces LED cuando el cargador no este enchufado, retire los audífonos de los postes de carga durante tres segundos y luego vuelva a insertarlo. Los LED se iluminan durante 10 segundos antes de apagarse.
- Si usted no esta utilizando sus audífonos por un período de tiempo extendido (por ejemplo: semanas) remuévalos de los postes de carga. Necesitará activarlos manualmente cuando los vuelva a utilizar, esto se hace presionando 3 segundos el control de cada audifono.

Encendido y apagado

Encendido - Los audífonos se encenderán automáticamente después de removerlos del cargador. Tardarán algunos segundos para darle tiempo a que los coloque sobre su oído.

Encendido - Si el audífono es encendido manualmente, presionando el botón del audífono durante 3 segundos. Notará un retraso del encendido para darle tiempo a que lo coloque sobre su oído.

Apagado - Los audífonos se apagarán automáticamente cuando se coloquen en los postes del cargador. La carga continuará.

Apagado - Los audífonos pueden ser apagados manualmente presionando el control de usuario durante 3 segundos.

Cuidado del sistema

CUIDADOS DE AUDÍFONO

Mantenga sus audífonos limpios. La humedad, la grasa y utilizarlos bajo circunstancias distintas a las recomendadas reflejarán un bajo desempeño del mismo.

- Utilice un cepillo o un paño limpio, suave y seco para limpiar suciedad alrededor del botón de uso y el micrófono y el portapila.
- Revise con regularidad que la punta del receptor no tenga cerilla.

- Nunca use agua, solventes, aceites o productos de limpieza para limpiar su audífono.

CUIDADO DEL CARGADOR

Mantenga su cargador limpio. La humedad, la grasa y utilizarlo bajo circunstancias distintas a las recomendadas reflejarán un bajo desempeño del mismo.

- Utilice un cepillo exclusivo y suave para limpiar suciedad alrededor de los postes de carga y los micrófonos del audífono.
- No utilice agua, solventes o productos de limpieza para limpiar los postes de carga.
- Mantenga su cargador con la tapa cerrada el mayor tiempo posible, ayuda que no entre polvo o suciedad.
- Guarde su cargador en un lugar seco y limpio. Por ejemplo el closet o algún librero o repisa que este a salvo.

Para asegurar una vida más larga del cargador de sus audífonos recargables así como las baterías de su cargador:

- Cargue sus audífonos con carga completa cada noche.
- No exponga estos dispositivos a un exceso de calor. Por ejemplo, no los exponga a la intemperie, no los deje cerca de una ventana o dentro de un automóvil que pueda encerrar calor.

Consejos útiles


- No desarme sus audífonos o introduzca herramientas de limpieza.
- Cuando no este utilizando sus audífonos, guárdelos en:
 - En un lugar seco y seguro
 - Lejos de la luz directa del sol y evite temperaturas altas
 - Un lugar que sea fácil de recordar
 - Lejos de niños y mascotas

Filtros para cera del receptor


Los audífonos a la medida traen integrado un filtro para atrapar el cerumen. Los innovadores filtros previenen la acumulación de cerilla en el receptor. Cuando usted necesite reemplazar los filtros, por favor siga las siguientes instrucciones:

1. Inserte el lado vacío del bastón directamente en el filtro de cera usado en el audífono.
2. Tire hacia afuera (no gire) para quitar el bastón para quitar el filtro de cera usado.


3. Use el extremo opuesto del bastón para insertar firmemente el protector de cera en el audífono.
4. Tire hacia afuera (no gire) para quitar el bastón y desecharlo.

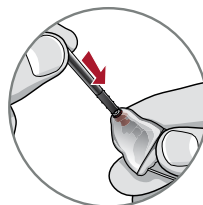


1

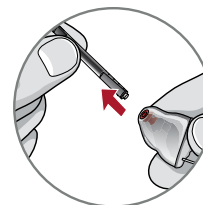

2

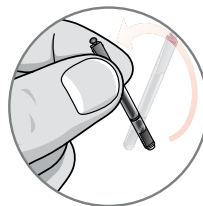

3

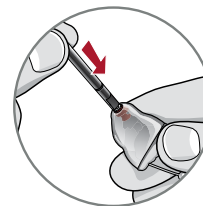

4

Para la aplicación Thrive Hearing Control y su compatibilidad con iOS/Android por favor visite starkey.com/thrivesupport.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas registradas por Apple Inc., registrada en los EE. UU. de América y en otros países. App Store es una marca de servicio registrada.

Android y Google Play son marcas registradas de Google LLC.

El logotipo de Starkey, Starkey, Livio y SoundSpace, Thrive, son marcas registradas por Starkey Laboratories, Inc.



Starkey.com

6700 Washington Ave. S.
Eden Prairie, MN 55344
1.800.328.8602

