

## QUICKTIP

# Microphone StarLink Edge



## Jumelage

Le Microphone à distance doit être jumelé pour interagir avec les aides auditives 2.4 GHz compatibles, utilisant la plateforme Neuro Processeur G2. Le jumelage ne doit être réalisé qu'une seule fois, les aides auditives et le Microphone à distance se reconnaissant ensuite automatiquement. Il est possible de jumeler le Microphone au sein du logiciel d'adaptation ou en dehors.

### Jumelage dans Pro Fit

- 1 Lancez Pro Fit et connectez les aides auditives.
- 2 Sélectionnez **Accessoires** depuis la session Préparation dans Pro Fit ou à partir du **menu contextuel** ☰.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez **Informations de jumelage** pour en savoir plus sur la procédure.
- 4 Vérifiez que le Microphone est allumé.
- 5 Placez les aides auditives à **moins de 15 cm** du Microphone.
- 6 Appuyez sur le bouton de jumelage et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant clignote en vert.
- 7 Sélectionnez **+** pour mettre les aides auditives en mode jumelage.
- 8 Le jumelage est effectif lorsque l'image du Microphone apparaît sur l'écran Accessoires.
- 9 Utilisez le menu déroulant sous la fenêtre Accessoires de streaming pour sélectionner **Microphone aide auditive en streaming**.
- 10 Utilisez le menu déroulant situé sous le Microphone pour optimiser le son du streaming. Les options possibles sont Égalisé (par défaut), Amplification des aigus, Amplification des graves et Amplification générale.



#### Mise sous tension

Faites glisser l'interrupteur vers le voyant. Le voyant s'allume en blanc pendant 2 secondes.



#### Mise hors tension

Faites glisser l'interrupteur en l'éloignant du voyant. Le voyant s'allume en rouge pendant 2 secondes. La couleur orange apparaît à côté de l'interrupteur.

**Accessoires micro streaming**

Ajustez le son pour les micros déportés et de table.



8 Micro extérieur



7 Micro de table



+

9 Micro d'aide auditive en cours de streaming

Micro diminué

Streaming audio 10

Égalisé

Amplification des aigus

Égalisé

Amplification des graves

Amplification générale

**Appareils de diffusion**

Ajustez le son pour l'émetteur TV

# Jumelage

## Jumelage en dehors du logiciel

- 1 Éteignez tout téléphone portable ou autre accessoire déjà jumelé aux aides auditives.
- 2 Vérifiez que le Microphone est allumé.
- 3 Éteignez puis rallumez les aides auditives pour passer en mode jumelage.
- 4 Placez les aides auditives à moins de 15 cm du Microphone.
- 5 Appuyez sur le bouton de jumelage et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant clignote en vert.
- 6 Dans la minute qui suit, le voyant devient vert fixe pendant 2 secondes lorsque le jumelage est terminé sur chaque aide auditive.



## Fonctionnement



Le Microphone à distance est conçu pour améliorer la parole et aider l'utilisateur d'aides auditives à apprécier les conversations avec une autre personne. Le Microphone peut également être utilisé comme une télécommande.

### Pour commencer le streaming avec le Microphone :

- 1 Assurez-vous que le Microphone est sous tension en faisant glisser l'interrupteur vers le voyant. Le voyant s'allume en blanc pendant 2 secondes.
- 2 Le streaming démarre automatiquement dans les aides auditives.
- 3 Lorsque vous avez terminé, mettez le Microphone hors tension pour arrêter le streaming.

### Le streaming audio s'arrête quand :

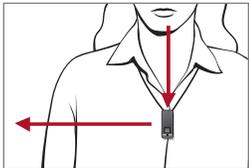
- Le Microphone est hors tension.
- Un appel téléphonique est reçu via un flux de téléphone mobile direct dans les aides auditives. Une fois l'appel téléphonique terminé, le flux redémarre automatiquement.
- Si l'utilisateur sort momentanément de la portée du Microphone (jusqu'à 15 mètres), la diffusion s'arrête, mais reprendra dès que l'utilisateur sera à nouveau à portée. S'il est hors de portée pendant 30 minutes, le Microphone passe en mode veille. Pour le réactiver, il suffira d'appuyer sur n'importe quel bouton ou en l'éteignant et en le rallumant.

### Pour utiliser le Microphone comme télécommande :

- 1 Appuyez sur les boutons +/- pour modifier le volume. Lorsque le Microphone est sous tension, les touches +/- modifient le volume du streaming. Lorsqu'il est éteint, les boutons +/- modifient le volume de l'aide auditive.
- 2 Appuyez sur les touches +/- et maintenez-les enfoncées pendant 2 secondes pour modifier le programme de l'aide auditive. Appuyez sur + pour changer le programme vers l'avant. Appuyez sur - pour changer le programme vers l'arrière.



## Utilisation

- Le Microphone peut être jumelé à une paire d'aides auditives 2,4 GHz compatibles, utilisant la plateforme Neuro Processeur G2.
  - Le Microphone peut être accroché à un vêtement ou porté avec un cordon autour du coup.
  - Placez le Microphone près de la source audio pour obtenir des résultats optimum. Le Microphone doit être à moins de 20 cm de la bouche de l'orateur.
  - Le Microphone offre une autonomie généreuse de 10 heures en streaming, pour un temps de charge complet de seulement 3 heures.
- Lorsque la batterie du Microphone est faible, le voyant d'état clignote lentement en rouge et un indicateur sonore de 3 tons est émis dans les aides auditives.
  - Le Microphone se met momentanément en veille en cas de chute et reprend le streaming dès qu'il est stabilisé.
  - Le volume du flux audio peut être réglé via les commandes du Microphone, l'application mobile de l'aide auditive, la télécommande 2.0 et/ou le contrôle utilisateur de l'aide auditive.