




Compatibilidad del dispositivo

Verifique si su dispositivo móvil es compatible con la aplicación My Starkey escaneando el siguiente código con la cámara de su dispositivo.



DESCARGAR LA APLICACIÓN:

1. Abra **App Store**  en dispositivos Apple o **Google Play**  en dispositivos Android.
2. En el cuadro de búsqueda, escriba  **My Starkey**.
3. Pulse **OBTENER** en dispositivos Apple, o **INSTALAR** en dispositivos Android para descargar la aplicación en su dispositivo móvil.



Para consultar la lista de dispositivos compatibles, visite: www.starkey.com/compatibility.

Más información sobre la aplicación My Starkey

Visite www.starkey.com/my-starkey para consultar las instrucciones de uso, los vídeos explicativos y más información sobre las diversas funciones.



www.Starkey.com

Starkey Spain
C. Llacuna, 11 - Planta 4
08005 barcelona
T. 937 866 373

La aplicación puede variar ligeramente en función del teléfono. NOTA: Los teléfonos del mismo modelo pueden variar de un país a otro. Esto podría afectar a la compatibilidad en determinados países.

Starkey, el logotipo de Starkey, Genesis y Starkey Edge, son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc. ©2024 Starkey Laboratories, Inc. Todos los derechos reservados. La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Apple Watch®, Apple y App Store son marcas comerciales de Apple, Inc. registradas en EE.UU. y otros países y regiones.

©2024 Starkey Laboratories, Inc. Todos los derechos reservados. P00008882 9/24
BROC3009-00-ES-ST



My Starkey

Aplicación móvil

Lo más sencillo posible.
Lo más potente que necesita.





Sus audífonos inalámbricos Starkey Edge AI o Genesis AI pueden conectarse a través de la tecnología Bluetooth® a la aplicación compatible My Starkey.

- **Oiga mejor donde quiera**

Haga ajustes instantáneos para hablar con mayor claridad y reducir el ruido, incluso en los entornos de escucha más exigentes.

- **Obtenga consejos, herramientas y recursos**

Adáptese rápidamente a los audífonos mediante instrucciones sencillas, consejos y vídeos. Todo a medida para su experiencia auditiva.

- **Controle la salud y el bienestar**

Controle la audición y la actividad física diarias para mantenerse sano/a. Defina y alcance sus objetivos de audición, pasos, ejercicio y más.

Nunca ha sido tan fácil tomar el control de su audición. Y vivir al máximo con My Starkey.



Conexión de los audífonos con un dispositivo Apple compatible

1. En su dispositivo, asegúrese de que el **Bluetooth** está **ACTIVADO**.
2. Seleccione **Ajustes > Accesibilidad > Dispositivos auditivos**.
3. **APAGUE** los audífonos y vuelva a **encenderlos** para activar el modo de emparejamiento.
4. En **DISPOSITIVOS AUDITIVOS MFI** debería ver sus audífonos (por ejemplo, “Audífonos de Jane”). Pulse ahí.
5. Pulse **Emparejar** para cada audífono (**DERECHO** e **IZQUIERDO**). El emparejamiento estará luego completado.
6. Abra la **aplicación My Starkey**, y siga las instrucciones para crear su cuenta y conectar sus audífonos.



Cambie de programa y regule el volumen de forma rápida y sencilla en su Apple Watch compatible.

Visite la sección **Más información** de la aplicación para consultar las instrucciones de instalación de la aplicación My Starkey en su Apple Watch.



Conexión de los audífonos con un dispositivo Android compatible

1. Pulse el **icono de Ajustes** de su dispositivo.
2. En su dispositivo, asegúrese de que **Bluetooth** está **ACTIVADO**.
3. **APAGUE** los audífonos y vuelva a **ENCENDERLOS** para activar el modo de emparejamiento.
4. Abra la **aplicación My Starkey** y siga las instrucciones para crear su cuenta y conectar sus audífonos.
5. Cuando vea sus audífonos listados en la pantalla, seleccione la(s) casilla(s) situada(s) junto a cada audífono (**DERECHA** e **IZQUIERDA**). Pulse **CONECTAR**. El emparejamiento estará luego completado.

