

StarLink Edge LE Adapter



Aansluiten & klaar


Met de StarLink Edge LE-adapter kunt u compatibele telefoons, tablets en computers met USB-C-aansluiting eenvoudig aansluiten op de LE Audio-hoortoestellen van Starkey, voor handsfree streaming en geluid van hoge kwaliteit.

Compatible met:

OMEGA^{AI} EDGE^{AI}

Handige tip:

Telefoons en tablets met een 3,5 mm audioaansluiting werken mogelijk niet met de adapter vanwege de gebruikte audiorouterings.

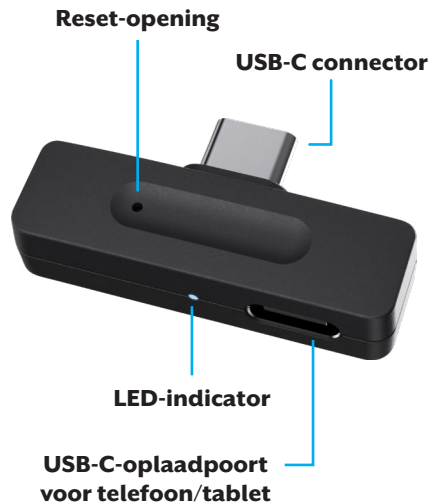


Uw StarLink Edge LE Adapter koppelen

1. Sluit de adapter aan op uw bronapparaat



Steek de adapter in uw bronapparaat (telefoon, tablet of pc). De adapter schakelt automatisch in en gaat bij het eerste gebruik naar de koppelingsmodus (als er geen eerdere koppeling is gevonden).

2. Uw LE Audio-hoortoestel koppelen

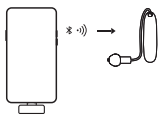


In de koppelmodus knippert de LED-indicator op de adapter blauw. Schakel uw hoortoestellen **UIT** en vervolgens weer **IN** om de koppelmodus te activeren. De LED op de adapter brandt gedurende 5 seconden continu blauw en gaat daarna uit zodra de koppeling tot stand is gebracht.

Opnieuw verbinden: Plaats de adapter opnieuw als de verbinding is verbroken.

Sommige bedieningselementen van uw hoortoestel(len) werken mogelijk niet met de adapter. Gebruik uw bronapparaat om oproepen aan te nemen of te beëindigen.

OVERIGE FUNCTIES

Telefoon/tablet opladen tijdens gebruik van de adapter

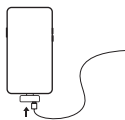

Sluit uw oplaadkabel aan op de adapter om uw telefoon/tablet op te laden. USB-gegevensoverdracht is niet beschikbaar tijdens gebruik van de adapter.


Systeem resetten en koppelmodus activeren



Gebruik een puntig voorwerp om de resetknop in te drukken tot de LED blauw begint te knipperen. Dit geeft aan dat de adapter in de koppelmodus staat en klaar is om met een nieuw apparaat te koppelen.

Indicatorbeschrijving

LED-indicator

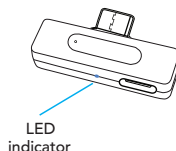

Koppelen: Blauw knipperend.

Gekoppeld: Continu blauw gedurende 5 seconden, daarna uit.