

StarLink Edge LE Adapter



Koble til & Gå

StarLink Edge LE Adapter gjør det enkelt å koble kompatible USB-C-aktiverte telefoner, nettbrett og datamaskiner til Starkeys LE Audio-høreapparater, for håndfri strømming og lyd av høy kvalitet.

Kompatibel med:

OMEGA^{AI} EDGE^{AI}

Nyttig tips:

Telefoner og nettbrett med en 3,5 mm lydkontakt fungerer kanskje ikke med adapteren på grunn av lydruteringsbanen.




Sammenkobling av din StarLink Edge LE Adapter

1. Koble adapteren til vertsenheten din



Koble adapteren til vertsenheten din (telefon, nettbrett, PC). Adapteren slår seg automatisk på og går inn i sammenkoblingsmodus ved første gangs bruk (hvis ingen tidligere sammenkobling blir funnet).

2. Koble sammen dine LE Audio-høreapparater

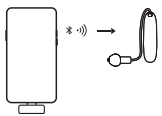


I sammenkoblingsmodus vil LED-indikatoren på adapteren blinke blått. Slå høreapparatene dine **AV** og deretter **PÅ** for å aktivere sammenkoblingsmodus. LED-en på adapteren lyser blått i 5 sekunder, og slås deretter av når den er parett.

Koble til på nytt: Sett adapteren inn igjen hvis forbindelsen mistes.

Merk: Noen brukerkontroller på høreapparatet ditt/dine fungerer kanskje ikke med adapteren. Bruk vertsenheten din til å besvare/avslutte samtaler.

ANDRE FUNKSJONER

Lade telefon/nettbrett mens adapteren brukes

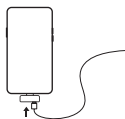

Koble ladekabelen til adapteren for å lade telefonen/nettbrettet. Vær oppmerksom på at USB-dataoverføring ikke er tilgjengelig mens adapteren brukes.


Tilbakestilling av systemet og aktivering av sammenkoblingsmodus



Bruk et spisst verktøy til å trykke på systemets tilbakestillingsknapp til LED-en begynner å blinke blått. Dette indikerer at adapteren er i sammenkoblingsmodus og klar til å kobles til en ny enhet.

Indikatorbeskrivelse

LED-indikator

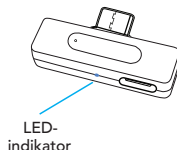

LED-indikator

Paring: Blinker blått.

Parkert: Fast blått lys i 5 sekunder og slår seg deretter av.