



MED⁹EL

DualSync- Technologie

Für das beste bimodale Hörerlebnis
mit Starkey und MED-EL






Ein starkes Duo für bimodal Versorgte

Dank der Streaming-Partnerschaft von MED-EL und Starkey bieten Sie Ihren bimodal versorgten CI-Kundinnen und -Kunden ein perfekt abgestimmtes, synchrones Stereo-Hören.

Starkey freut sich über die Zusammenarbeit mit MED-EL, einem Pionier für Hörimplantate, um Trägerinnen und Trägern eines Cochlea-Implantats und eines Hörsystems bimodales Streaming anbieten zu können. Durch die DualSync-Technologie erkennen Geräte von Apple® den CI-Audioprozessor und das Hörsystem als ein Paar und bieten ein ganzheitliches bimodales Streamingerlebnis.

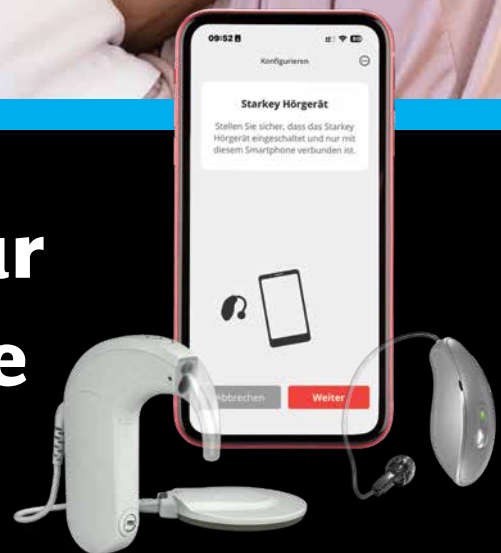

„Ich bin mit meinem gesamten Hörerlebnis sehr zufrieden. Die verbesserte Klarheit ist unglaublich. Der Klang ist so klar und deutlich, dass ich beinahe leiser stellen musste. Sie werden die Benutzerfreundlichkeit und Qualität von DualSync auf Anhieb lieben.“

Jen Murray

Innenarchitektin im Ruhestand

Ein besseres Hörerlebnis

Die DualSync-Technologie bietet Ihren bimodal versorgten Kundinnen und Kunden mit einem Hörsystem von Starkey und einem Cochlea-Implantat von MED-EL zahlreiche Vorteile, darunter:

- Optimale Synchronisation
- Räumliches Hören
- Streaming von Anrufen und Medien über iPhones®
- Und vieles mehr ...



Standard oder individuell gefertigter Receiver von Starkey

SnapFit 2.0 Standard und Custom Receiver



Dome offen

5 mm, 6 mm, 7 mm,
9 mm, 11 mm



Dome geschlossen

4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm,
9 mm, 11 mm



Power Dome

8-10 mm, 10-12 mm,
12-14 mm



Custom Cased Receiver

Individuelles Schirmchen
mit integriertem
Receiver



RIC Silikon Helix Otoplastik (Standard)




RIC Silikon Otoplastik (Standard)

Anpassbereiche


Besuchen Sie starkeypro.de/produkte/hoersysteme/omega-ai,
um die vollständigen technischen Datenblätter zu erhalten.

RIC mit Standard-Receiver

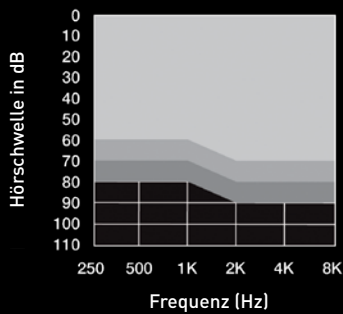


L 40 db **M** 50 db
P 60 db

RIC mit Custom Cased Receiver CIC

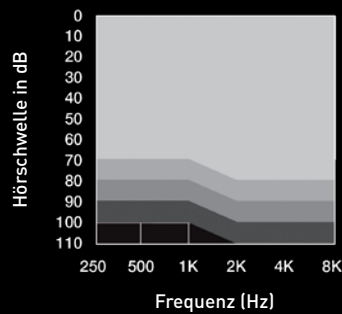

L 40 db **M** 50 db
P 60 db **UP** 70 db


ITC/ITE R

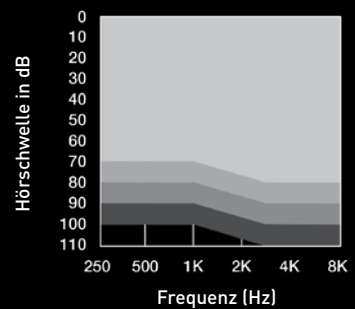


L** 40 db **M** 50 db
P 60 db **UP** 70 db

**L Matrix ist nicht für
ITE R erhältlich

P BTE 13

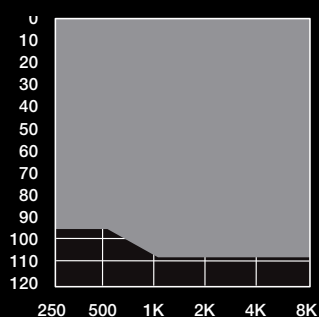

UP BTE 13

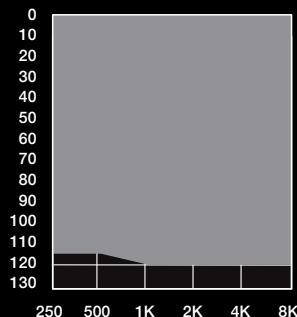

Partner für transformative Technologien

Starkey und MED-EL sind führend in ihren jeweiligen Bereichen und dadurch die perfekten Partner für Ihr Fachgeschäft.

Mit der **Starkey**-Technologie in Ihren Händen erhalten Kundinnen und Kunden die Chance auf bestmögliches Hören und ein Leben ohne Einschränkung.



Omega AI

Ob individuell gefertigt oder Standard-Hörsystem – Starkeys neueste Produktfamilie bietet Hörsystemträgerinnen und -trägern ein völlig neues Lebensgefühl.



G Series AI

Fokussiert auf hervorragenden Klang und hohen Tragekomfort präsentiert sich die G Series AI als die neue Produktfamilie für die Einstiegsklassen.



My Starkey

Starkeys App hilft Hörsystemträgerinnen und -trägern, ihr Hörerlebnis zu genießen, das Wohlbefinden zu verbessern und ihren Alltag zu erleichtern.



MED-EL, ein führendes Unternehmen für Hörimplantate, hat sich zum Ziel gesetzt, mithilfe innovativer Lösungen Menschen mit hochgradigem Hörverlust das Hören zurückzubringen.



SONNET 3

Der kleinste und leichteste Hinterdem-Ohr-Audioprocessor mit integriertem Direkt-Streaming ist die neueste Technologie von MED-EL, die Nutzerinnen und Nutzer mit allem verbindet, was diese gerne hören.



RONDO 3 und SONNET 2

Durch ihre praktische Handhabung und Benutzerfreundlichkeit erleichtern diese Audioprocessoren das Hören im Alltag.



AudioKey 3 App

Ermöglicht Nutzerinnen und Nutzern die Einstellungen ihres Audioprocessors zu steuern, detaillierte Statistiken abzurufen und verlorene Audioprocessoren zu finden – alles ohne Fernbedienung.



Alle Wireless-Geräte der Familien Starkey Omega AI, G Series AI, Edge AI und Genesis AI sind mit den MED-EL Audioprocessoren SONNET 3, SONNET 2, SONNET und RONDO 3 kompatibel. SONNET 2, SONNET und RONDO 3 erfordern AudioStream.

*Ist SONNET 3 oder AudioStream mit dem iPhone gekoppelt, lassen sie sich über das Bedienungshilfen-Menü entfernen. Ist die My Starkey App installiert, schließen Sie die App vollständig oder deinstallieren Sie sie, bevor Sie die bimodale Konfiguration einrichten. (Nach Abschluss der Konfiguration kann die App wieder geöffnet oder installiert werden.)

Bimodales Streaming

Um bimodales Streaming auf dem iPhone einzurichten, folgen Sie diesen Schritten:

1

Koppeln Sie das Hörsystem in den **Einstellungen** im Menü „**Bedienungshilfen**“.*





2

Öffnen Sie die **AudioKey 3 App**, wählen Sie **Verbindungsoptionen** und folgen Sie dann den **Konfigurationsschritten** in der App.



3

Lieblingseinhalte auf beiden Geräten gleichzeitig **streamen**.

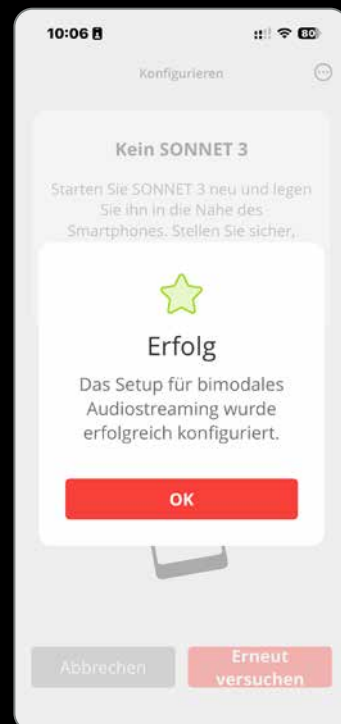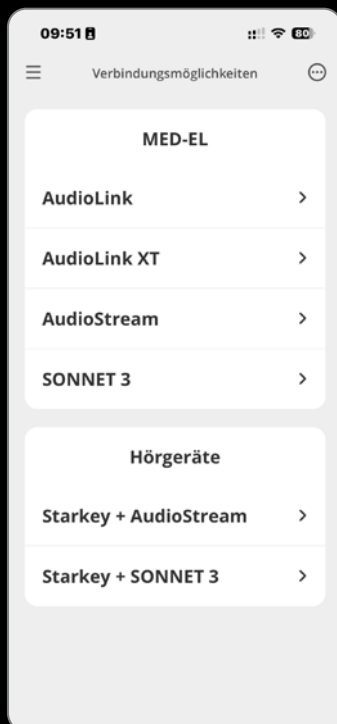



Exklusives Angebot für bimodale Hörsystemversorgung

Sichern Sie sich Ihre Sonderkonditionen bei einer bimodalen
Versorgung mit Starkey- und MED-EL-Hörsystemen.

Technikstufen 24/20/16: zusätzlich -30%

Technikstufen 12/10: zusätzlich -20%

auf Ihre individuell geltenden Konditionen.

Zum Bestellformular



OMEGA^{AI}



Web: qrcode.de/MED-EL



G SERIES^{AI}

Apple und das Apple Logo sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA sowie anderen Ländern und Regionen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. | Android ist eine Marke von Google LLC. Google Play und das Google Play Logo sind Marken von Google LLC. Sonnet, Rondo, AudiKey, MED-EL und das MED-EL Logo sind Marken der MED-EL Elektromedizinische Geräte Ges.m.b.H. Das Starkey Logo, Starkey, Starkey Edge, Genesis und G Series sind eingetragene Marken von Starkey Laboratories, Inc. Omega, DualSync, Starkey G Series sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.

©2026 Starkey Laboratories (Germany) GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 06/26 BKLT3285-01-DE-ST P00023039