

## QUICKTIP

# Microphone de table StarLink Edge




## Jumelage

Le Microphone de table doit être jumelé pour interagir avec les aides auditives 2.4 GHz compatibles utilisant la plateforme Neuro Processeur G2. Le jumelage ne doit être réalisé qu'une seule fois, les aides auditives et le Microphone de table se reconnaissant ensuite automatiquement. Il est possible de jumeler le Microphone de table au sein du logiciel d'adaptation ou en dehors.

### Jumelage dans Pro Fit


- 1 Lancez Pro Fit et connectez les aides auditives.
- 2 Sélectionnez **Accessoires** depuis la session Préparation dans Pro Fit ou à partir du **menu contextuel** ☰.
- 3 Si nécessaire, sélectionnez **Informations de jumelage** pour en savoir plus sur la procédure.
- 4 Assurez-vous que le microphone de table est allumé en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 à 3 secondes jusqu'à ce que les voyants s'allument en vert.
- 5 Placez les aides auditives à moins de 15 cm du Microphone de table.
- 6 Mettez le Microphone de table en mode jumelage en appuyant sur le bouton de jumelage avec une aide auditive situé en bas de l'appareil pendant 2 secondes. Les voyants bleus clignotants situés en haut de l'appareil indiquent que le microphone de table est en mode jumelage.
- 7 Sélectionnez **+** pour mettre les aides auditives en mode jumelage.
- 8 Le jumelage est effectif lorsque l'image du Microphone de table apparaît sur l'écran Accessoires.
- 9 Utilisez le menu déroulant sous la fenêtre Accessoires de streaming pour sélectionner **Microphone aide auditive en streaming**.
- 10 Utilisez le menu déroulant situé sous le Microphone de table pour optimiser le son du streaming. Les options possibles sont Égalisé (par défaut), Amplification des aigus, Amplification des graves et Amplification générale.

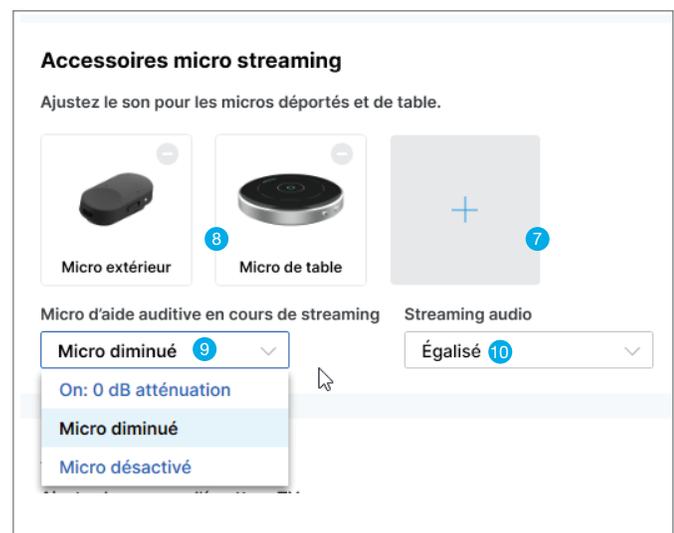


## Jumelage (Suite)

### Jumelage en dehors du logiciel

- 1 Éteignez tout téléphone portable ou autre accessoire déjà jumelé aux aides auditives.
- 2 Éteignez puis rallumez les aides auditives pour passer en mode jumelage.
- 3 Placez les aides auditives à moins de 15 cm du Microphone de table.
- 4 Mettez le Microphone de table en mode jumelage en appuyant sur le bouton de jumelage avec une aide auditive, situé en bas de l'appareil pendant 2 secondes. Les segments bleus clignotants situés en haut de l'appareil indiquent que le Microphone de table est en mode jumelage (A).
- 5 Les segments verts indiquent que le jumelage est effectif (B). Un support est destiné à l'aide auditive gauche et un autre à l'aide auditive droite.

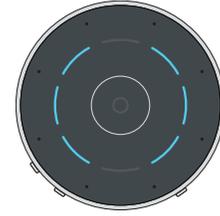

(A) Recherche d'aides auditives

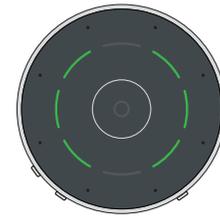

(B) Jumelage de l'aide auditive réussi

## Fonctionnement

Le Microphone de table est conçu pour améliorer l'écoute dans le bruit en permettant à l'utilisateur de se concentrer sur l'interlocuteur principal dans des environnements à plusieurs interlocuteurs, comme les réunions ou les rencontres familiales, et de se connecter avec le monde qui l'entoure.

## Modes d'utilisation


### Mode automatique :

Appuyez sur le bouton Mode automatique. Cinq segments s'allument, l'un étant plus lumineux que l'autre. Les microphones détectent l'intervenant et indique sa direction avec le voyant le plus lumineux.




### Mode manuel :

- Appuyez sur n'importe quel segment pour se concentrer sur une ou plusieurs directions. Les 8 segments bleus indiquent la ou les directions d'écoute sélectionnées.

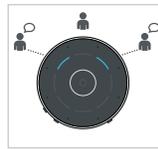

**Mode Surround :** Conçu pour écouter plusieurs intervenants dans un environnement calme.

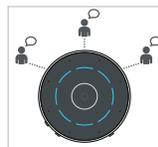

- Appuyez sur tous les segments pour écouter plusieurs personnes.

### Microphone extérieur :

Le Microphone de table peut être utilisé comme microphone déporté lorsqu'il est porté avec un cordon autour du coup. Le Microphone de table doit être à moins de 20 cm de la bouche de l'intervenant.



- Fixez le crochet magnétique situé à l'arrière du Microphone de table. Vérifiez que le crochet tient bien.
- Lorsque le Microphone de table est porté par l'intervenant, le voyant supérieur s'allume pendant 3 secondes.

### Muet :

éteignez manuellement tous les segments, le cercle du milieu s'allume. Appuyez sur le cercle du milieu et le Microphone de table reviendra en Mode automatique.

## Utilisation

Le Microphone de table peut être jumelé à une paire d'aides auditives 2.4 GHz compatibles utilisant la plateforme Neuro Processeur G2. Pour une performance optimale, assurez-vous que les boutons de volume et de marche/arrêt du Microphone de table sont face à vous

- Le streaming audio commence automatiquement lorsque le Microphone de table est allumé. Le streaming audio s'arrête lorsque le Microphone de table est éteint.
- Pour régler le volume du flux audio, appuyez sur les boutons + ou – du Microphone de table, déplacez le curseur du volume sur l'écran Accessoires de votre application mobile compatible et/ou appuyez sur le contrôle utilisateur de votre aide auditive.
- La distance de fonctionnement du Microphone de table est de 15 mètres maximum.
- Pleinement chargé, le Microphone de table assure jusqu'à 10 heures de streaming.
- Le Microphone de table atteint sa pleine charge en 2 heures environ.

- Voyants de niveau de batterie :

- Ⓐ **Les segments verts** indiquent le niveau de charge de la batterie. Le segment vert clignotant indique le niveau actuel.
- Ⓑ Des segments **orange** indiquent moins de deux heures d'autonomie.
- Ⓒ Un segment **rouge** indique moins d'une heure d'autonomie.

