



StarLink Edge LE Adapter

Connect & Go

Der StarLink Edge LE Adapter ermöglicht es Ihnen, kompatible USB-C-fähige Telefone, Tablets und Computer ganz einfach mit Starkeys LE-Audio-Hörgeräten zu verbinden – für freihändiges Telefonieren und Streaming in hoher Qualität sowie mit hervorragendem Klang.

Kompatibel mit:

OMEGA^{AI} EDGE^{AI}

Hilfreicher Tipp:

Telefone und Tablets mit einer 3,5-mm-Audiobuchse funktionieren möglicherweise nicht mit dem Adapter aufgrund des Audio-Routing-Pfads.




Koppeln Ihres StarLink Edge LE Adapters

1. Verbinden Sie den Adapter mit Ihrem Host-Gerät



Stecken Sie den Adapter in Ihr Host-Gerät (Telefon, Tablet, PC). Der Adapter schaltet sich automatisch ein und wechselt bei der ersten Verwendung in den Kopplungsmodus (wenn keine vorherige Kopplung gefunden wird).

2. Koppeln Ihrer LE-Audio-Hörgeräte

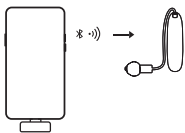


Im Kopplungsmodus blinkt die LED-Anzeige am Adapter blau. Schalten Sie Ihre Hörgeräte **AUS** und dann wieder **EIN**, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Die LED am Adapter leuchtet 5 Sekunden lang durchgehend blau und erlischt dann, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.

Erneut verbinden: Adapter erneut einstecken, wenn die Verbindung verloren geht.

Hinweis: Einige Benutzersteuerungen an Ihrem Hörgerät/Ihren Hörgeräten funktionieren möglicherweise nicht mit dem Adapter. Verwenden Sie Ihr Host-Gerät, um Anrufe anzunehmen/zu beenden.

WEITERE FUNKTIONEN

Telefon/Tablet während der Verwendung des Adapters laden

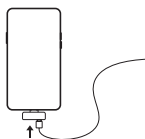

Schließen Sie Ihr Ladekabel an den Adapter an, um das Telefon/Tablet zu laden. Bitte beachten Sie, dass die USB-Datenübertragung während der Verwendung des Adapters nicht verfügbar ist.

System zurücksetzen und Kopplungsmodus aufrufen




Verwenden Sie ein spitzes Werkzeug, um die System-Reset-Taste zu drücken, bis die LED anfängt, blau zu blinken. Dies zeigt an, dass sich der Adapter im Kopplungsmodus befindet und bereit ist, sich mit einem neuen Gerät zu koppeln.

Beschreibung der Anzeige

LED-Anzeige

Kopplung: Blau blinkt.

Gekoppelt: Stetiges blaues Licht für 5 Sekunden und dann erlischt es.

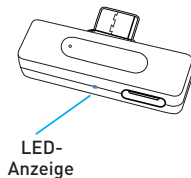

LED-Anzeige