

Kihelyezett Mikrofon +

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



Áttekintés	2
Használat	6
Napi használat	8
A Kihelyezett Mikrofon + viselése	10
Párosítás a hallókészülékekkel	11
Párosítás Bluetooth eszközökkel	13
A bemeneti mód kiválasztása	14
Kihelyezett mikrofon	14
Bluetooth telefonálás és átjátszás	15
Teleloop rendszer	17
FM vevő	17
Vonali hangbemenet	17
Hang átjátszása	18
A tápegység összeszerelése	19
Hibaelhárítás	20
Biztonsági információk	23
Hatósági nyilatkozatok	26

A Starkey Hearing Technologies Kihelyezett Mikrofon + segítségével különböző hangforrásokból

közvetlenül 2.4 GHz vezeték nélküli hallókészülékekre továbbíthatók a hangok. Amikor távoli beszélő viseli, az eszköz egy kihelyezett mikrofonként működik.

A Kihelyezett Mikrofon + továbbá az alábbi hangforrások kezelésére alkalmas:

- Bluetooth A2DP profil (zenehallgatás)
- Bluetooth headset (telefonhívások)
- Teleloop rendszer
- FM rendszerek
- Vonalis hang bemenet


Átjátszás – A különböző hangok vezeték nélküli továbbítása a Kihelyezett Mikrofon + kiegészítőről a hallókészülékekre.

A csomag tartalma

- Kihelyezett Mikrofon +
- Tápegység
- USB – Micro USB átalakító
- Kezelési útmutató

További kiegészítők

- Europin FM vevő
- Audio kábel (part #91259-000)
- Nyakpánt (part #91324-000)

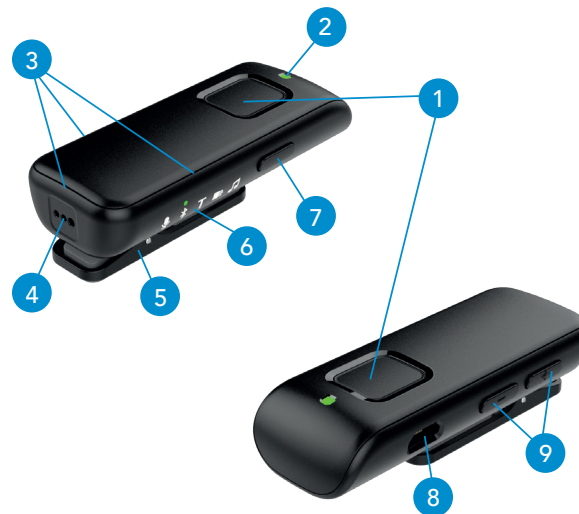

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. Többfunkciós előlapi gomb | 6. Bemeneti mód visszajelző LED |
| 2. Állapotjelző LED | 7. Bemeneti mód választó gomb |
| 3. Mikrofonok | 8. Micro USB csatlakozó |
| 4. FM vevő csatlakozó | 9. Hangerőszabályzó |
| 5. Csíptető | |

Többfunkciós előlapi gomb

1. Többfunkciós előlapi gomb

- A Starkey Hearing Technologies Kihelyezett Mikrofon + kezelésére szolgáló gomb.

2. Állapotjelző LED

- Tájékoztatót nyújt a Kihelyezett Mikrofon + működési állapotáról

LED	ÁLLAPOT
Nem világít	A mikrofon ki van kapcsolva
Lassú zöld villogás	Az eszköz be van kapcsolva, de nincs Bluetooth kapcsolat
Lassú kék villogás	Az eszköz be van kapcsolva és van Bluetooth kapcsolat
Lassú vörös villogás	Alacsony tápfeszültség
Vörös fény	Működési hiba

3. Mikrofonok

- Kihelyezett mikrofonként történő használat esetén a beszélő hangját fogadja
- Bluetooth headsetként használva a felhasználó hangját fogadja

4. Csatlakozó FM vevő számára

- FM Európai vevő csatlakoztatható

5. Csíptető

- Segítségével rögzíthető a mikrofon ruhára vagy a nyakpántra

6. Bemeneti módok LED visszajelzője

- Leolvasható, mely bemeneti mód az aktív

7. Bemeneti módválasztó gomb

- Kiválasztható az audió bemenet

IKON	HANGFORRÁS
	Kihelyezett mikrofon (15. oldal)
	Bluetooth kihangosító vagy átjátszó (15. oldal)
	Teleloop (17. oldal)
	FM vevő (17. oldal)
	Vonali bemenet (17. oldal)

8. Micro USB csatlakozó

- Az USB – Micro USB kábel segítségével tölthető az eszköz
- A kiegészítő kábellel vonali hangbemeneti csatlakozó

9. Hangerőgombok

- Beállítható a hangerő

Tanács: az átjátszott hang erőssége a Thrive Hearing Control applikációból, a Távirányítóval vagy a hallókészülékekről is szabályozható. További segítségnyújtással kapcsolatban keresse a hallókészülék kezelési útmutatóját vagy forduljon hallásszakértőjéhez.

Használat


1. Az előlapi gombot 2 másodpercig nyomva tartva kapcsolja be a Starkey Hearing Technologies Kihelyezett Mikrofon + kiegészítőt. Amikor a zöld LED világítani kezd, engedje el a gombot.
 

1
2. Ellenőrizze, hogy a hallókészülékek be vannak kapcsolva.
 - **Megjegyzés:** Az első használatot megelőzően a hallókészülékeket **párosítani kell a Kihelyezett Mikrofon + kiegészítővel.** További információ a 11. oldalon olvasható.

2
3. Hang átjátszása
 - Indítsa el a Thrive Hearing Control applikációt és a Kiegészítő képernyőn válassza ki az Átjátszás opciót
 - További beállításokkal kapcsolatban keresse a 18. oldalon a **Hang Átjátszása** fejezetet.

4
4. A bemeneti hangforrás választásához használja a bemenet-választó gombot. A bemeneti


módok között a gomb megnyomásával válthat.

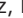5. Ahhoz, hogy Bluetooth eszközről  továbbítani lehessen hangot a mikrofonra, a két eszköznek csatlakoztatva kell lennie (kéken villogó LED)

- **Megjegyzés:** Első használat előtt **párosítsa Bluetooth eszközt** a mikrofonnal. További információ a 13. oldalon olvasható.

6. A + és – gombokkal változtatható a hangerő.
7. Az átjátszás az alábbiak szerint állítható le:

- Kapcsolja ki a mikrofont.
- A Thrive Hearing Control applikációban állítsa le az átjátszást.
- A 18. oldalon található **Hang átjátszása** fejezet alapján.

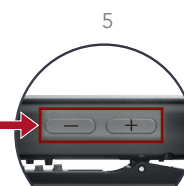

Rendszeres használat

Bekapcsolás

Tartsa nyomva 2 másodpercig az előlapon található gombot, majd a LED felvillanásakor engedje azt el.



Kikapcsolás

Tartsa nyomva az előlapon található gombot addig, míg a LED ki nem alszik.




Alacsony akkufeszültség

Az alacsony feszültségről a lassan, vörösén pulzáló LED és a hallókészülékeken 5 percenként elhangzó figyelmeztetés tájékoztat.



Akkumulátor feltöltése

Csatlakoztassa a Micro USB kábelt a mikrofon csatlakozójához, a kábel másik végét pedig a tápegységhez.

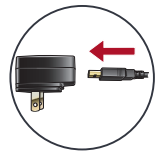



Visszajelzés töltés közben


Állapot	Töltöttség	LED
Kikapcsolt	Töltés	Zölden világít
Kikapcsolt	Feltöltve	Nem világít
Bekapcsolt	Töltés	Zölden világító LED, esetenként más jelzések is megjelenhetnek
Bekapcsolt	Feltöltve	Nem világít

Tanács: A mikrofon töltése tovább tarthat, ha közben átjátszás történik. Az eszköz akkor tölthető fel a leggyorsabban, ha ki van kapcsolva.

A Kihelyezett Mikrofon + viselése

A Kihelyezett Mikrofon + rögzíthető ruházatra, vagy hordható nyakpánton.

Abban az esetben, ha az eszköz  kihelyezett vagy Bluetooth  mikrofonként üzemel, helyezze a hang forrásától 20 cm távolságra.

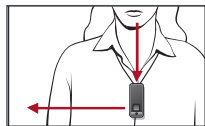

Csíptető – A csípessel ruhadarabra rögzíthető a mikrofon.

Mindig győződjön meg róla, hogy megfelelően rögzítette az eszközt.

Nyakpánt (opcionális kiegészítő) –

1. Nyomja meg a csipeszt a képen látható helyen.
2. Illessze a vékony hurkot a csipeszre, majd engedje el a csipeszt. Ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítve lett-e a hurok.
3. Helyezze a pántot a nyakába.



Párosítás hallókészülékekkel

Ahhoz, hogy a Starkey Hearing Technologies Kihelyezett Mikrofon + kommunikálni tudjon a hallókészülékekkel, párosítani szükséges az eszközöket. A párosítást csak egyszer kell elvégezni, a továbbiakban a két eszköz felismeri egymást ha mindkettő be van kapcsolva és a megfelelő távolságon belül található.*

A mikrofon és a hallókészülékek párosítása:

1. Ellenőrizze, hogy a hallókészülékek nem csatlakoznak más Bluetooth eszközökhöz:
 - Tiltsa le mobiltelefonja Bluetooth kapcsolatát.
 - Kapcsolja ki a korábban párosított és a közelben található Starkey Hearing Technologies TV vagy Kihelyezett Mikrofon + kiegészítőket.
2. Kapcsolja ki, majd vissza a hallókészülékeket.
3. Helyezze a hallókészülékeket 15 cm távolságra a mikrofontól.
4. Tartsa nyomva a hangerő növelő és a bemenetválasztó gombokat egyszerre 7 másodpercig, amíg az állapotjelző LED kéken és vörösén villogni nem kezd.
5. **Egy pár** hallókészülék csatlakoztatásakor:



*Az általános hatótávolság 15 m. A hatótávolságot a környezet, a tárgyak, interferenciák és a viselő testhelyezete befolyásolhatja. Az eszközök kapcsolata nagyobb távolság esetén is fennmaradhat, ekkor azonban a hang- és a kapcsolat minősége egyaránt romolhatnak.

Első LED villanás	2. LED villanás	Párosítás eredménye	Következő lépés
1	2	Mindkét hallókészülék párosítása sikeres	Sikeres párosítás
1	2	Csak egy hallókészülék párosítása sikerült	Ismételje meg az 1 – 5 lépéseket
1	Nem villant	Nem sikerült a hallókészülékek párosítása	Ismételje meg az 1 – 5 lépéseket

6. Egyoldali hallókészülék párosításakor:

LED villanás	Párosítás eredménye	Következő lépés
1	Sikeres	Sikeres párosítás
1	Sikertelen	Ismételje meg az 1 – 4 és 6 lépéseket

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

Más Bluetooth eszközről történő átjátszást megelőzően a Starkey Hearing Technologies Kihelyezett Mikrofon + kiegészítőt párosítani kell a másik készülékkel:

1. Ellenőrizze, hogy a Kihelyezett Mikrofon + kiegészítő be van kapcsolva és nem csatlakozik más Bluetooth eszközökhöz (a zöld LED lassan villog).



2. Tartsa nyomva a hangerő csökkentő és bemeneti módváltató gombokat 7 másodpercig, míg az állapotjelző LED kéken nem kezd villogni.



3. A másik eszközön válassza ki a Bluetooth eszközök közül a mikrofont.

• **Megjegyzés:** További támogatásért olvassa el a párosítandó eszköz kezelési útmutatóját.




4. A mikrofon az alábbi visszajelzéseket szolgáltatja a párosítás állapotáról:
 - Sikeres – zöld LED fény 2 másodpercig
 - Sikertelen – vörös LED fény 2 másodpercig

A bemenetválasztó gomb használata

A jelenlegi bemeneti forrás megtekintése

Ha a bemeneti módokat jelző LED nem világít, nyomja meg a választógombot a LED bekapcsolásához.

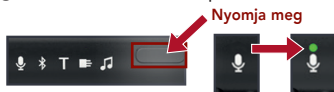

Másik bemeneti mód választása

Mialatt a visszajelző LED világít, nyomja meg ismét a választógombot a következő bemeneti mód kiválasztásához.



🎤 Kihelyezett mikrofon

A Kihelyezett Mikrofon + kiegészítő az orientációtól függően automatikusan optimalizálja a beállításokat.



Beszédhang kiemelése és a háttérzaj csökkentése

A beszélő nyakában viselve a mikrofon kiemeli a fölülől érkező és tompítja a többi irányból érkező hangokat.



Több beszédhang továbbítása csendes környezetben

A csipetőre fektetve a mikrofon továbbítja a több irányból érkező hangokat.



✦ Bluetooth telefonálás és átjátszás

Hívások kezelése: A hívás beszédhangja a hallókészülékekre, a felhasználó hangja a mikrofonon keresztül a telefonra lesz továbbítva



Zenehallgatás: A lejátszott zene a hallókészülékeken hallható.

Bluetooth funkciók



Párosítás Bluetooth eszközökkel

A Kihelyezett Mikrofon + kiegészítő 8 db Bluetooth eszközzel párosítható.

Csatlakozás Bluetooth eszközhöz

Bekapcsolt állapotban megfelelő távolságon belül a mikrofon és a párosított Bluetooth eszköz automatikusan csatlakoznak. A kapcsolat meglétét az állapotjelző LED kék villogása jelzi. A mikrofon egyszerre 2 db Bluetooth eszközzel képes csatlakozni.

Zenehallgatás (vagy más digitális hang átjátszása)

Amikor a bemeneti mód Bluetooth, a Kihelyezett Mikrofon + kiegészítő automatikusan továbbítja a párosított eszköz hangját a hallókészülékekre

Telefonálással kapcsolatos funkciók

Automatikus átváltás Bluetooth hangforrásra	Beérkező vagy folyamatban lévő hívás észleléskor a Kihelyezett Mikrofon + kiegészítő automatikusan átvált a Bluetooth hangforrásra
Hívásfogadás	A csengőhang megszólalásakor az előlapon található gomb megnyomásával fogadható a beérkező hívás.
Hívás elutasítása	A csengőhang megszólalásakor az előlapon található gombot legalább 2 másodpercnyi hosszan nyomva tartva elutasítható a hívás. Amikor már nem hallható a csengőhang, engedje el a gombot.
Hívás befejezése	Hívás közben az előlapi gombot röviden megnyomva befejezhető a hívás.
Hívás átjátszása a telefon és a mikrofon között	Hívás közben az előlapi gombot 2 másodpercnyi hosszan megnyomva a hívás átjátszása befejezhető. A gombot újra hosszan megnyomva a hívás ismét átjátszható a mikrofonra.
Hívásindítás	A telefonon elkezdett hívás automatikusan átjátszásra kerül a mikrofonra.




T Teleloop rendszer

A Starkey Hearing Technologies Kihelyezett Mikrofon + képes fogadni Teleloop rendszerek hangjait (közterületeken elérhető szolgáltatás). A mikrofont függőleges pozícióban viselve érhető el a legjobb eredmény. Teleloop átjátszás közben a Bluetooth csatlakozás nem elérhető, az átjátszás befejeztével azonban ismét aktívvá válik. Előfordulhat, hogy ismét csatlakoztatni kell a Bluetooth eszközöket. További információkért keresse Bluetooth eszközeinek kezelési útmutatóját.




FM vevő

Az opcionális tartozékként vásárolható Europin csatlakozóhoz illeszthető FM vevőt csatlakoztatva a Starkey Hearing Technologies Kihelyezett Mikrofon + kiegészítő képes audiójelet fogadni FM rádióhullámok formájában. A mikrofon ekkor viselhető, de stabilan elhelyezve is használható.

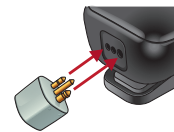

🎵 Vonali hangbemenet

Az opcionálisan vásárolható micro USB csatlakozóba illeszthető vonali bemeneti átalakítóval a mikrofon alkalmas vezetéken továbbított audiójel fogadására telefonok, MP3 lejátszók, tabletek vagy számítógépek kimeneteiről. Használat közben javasolt a mikrofont egy stabil felületre helyezni.

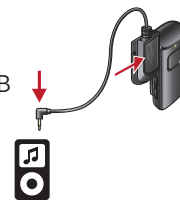

Átjátszás megkezdése/leállítása

A Starkey Hearing Technologies Kihelyezett Mikrofon + kiegészítőre az alábbiak szerint továbbítható hang:

- **A mikrofon bekapcsolásakor:** a hang átjátszása automatikusan megkezdődik a hallókészülékekre.
- **A Thrive Hearing Control applikációt megnyitva:** is vezérelhető az átjátszás.
- **Starkey Hearing Technologies Távirányítóról:** a megfelelő beállításokat követően a kedvenc gombot megnyomva kezelhető az átjátszás.
- **Hallókészülékről:** végrehajtott, szakértő által korábban beállított gesztusvezérléssel is irányítható az átjátszás



Az átjátszás leáll, amennyiben:


- Bluetooth bemeneti módban nem észlelhető bemenő hang.
- A mikrofon ki lett kapcsolva.

Az átjátszás megkezdésekor és leállításakor a hallókészülékeken egy hangjelzés hallható.

A tápegységről


Azért, hogy a Starkey Hearing Technologies Kihelyezett Mikrofon + kiegészítő több régióban használható legyen, számos konnektor csatlakozóval kerül szállításra. Amennyiben a csatlakozó cseréje szükséges:

1. Válassza ki a megfelelő csatlakozót.

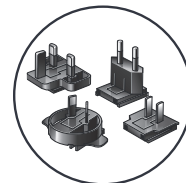


1

2. Csúsztassa a tápegységen a helyére a csatlakozót.

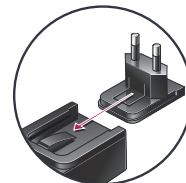

2

3. A csatlakozó eltávolításához húzza szét a tápegységet és a csatlakozót..

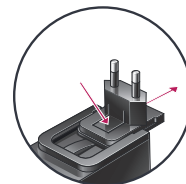

3

Hibaelhárítás

HIBA-JELENSÉG	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
Egy (vagy mindkettő) hallókészülék elveszti a jelet átjátszás közben.	A hallókészülékek a hatótáv szélére esnek.	Helyezkedjen el a mikrofonhoz közelebb.
	A hallókészülék feszültsége annyira alacsony, hogy már nem támogatja a vezeték nélküli funkciókat.	<ul style="list-style-type: none"> Cserélje ki a hallókészülék elemét. Töltse fel a hallókészülék akkumulátorát.
	Valamilyen nagyobb tárgy tompítja a jelet.	A legjobb teljesítmény érdekében a hallókészülékekkel helyezkedjen látótávolságon belül.
Az átjátszott hang gyenge minőségű.	A mikrofon és a hallókészülékek közötti kapcsolat megszakadt.	Indítsa újra az átjátszást a <i>Hang átjátszása</i> fejezet alapján
	A mikrofon akkumulátora lemerült.	Töltse fel a mikrofont.
Az átjátszott hang szakadozik.	Az átjátszott hang erőssége nem megfelelő.	Módosítsa a forráshang erejét a megfelelő szintre.
	<u>Bluetooth átjátszás:</u> a Bluetooth eszköz hatótávjának peremén tartózkodik.	Helyezze közelebb a Bluetooth eszközt a mikrofonhoz.
	<u>Teleloop átjátszás:</u> a mikrofon pozíciója nem megfelelő az átjátszáshoz.	Helyezze a mikrofont függőleges helyzetbe.

HIBA-JELENSÉG	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
Az átjátszott hang túl hangos vagy halk	<p>A hallókészülékekre átjátszott hang nem megfelelő.</p> <p>A forrás hangereje nem megfelelő.</p>	<p>A mikrofon + és – gombjaival állítsa be a megfelelő hangerőt.</p> <p>Állítsa a hangforrás hangerejét megfelelő erősségűre.</p>
<u>Kihelyezett Mikrofon mód:</u> A beszélő nehezen hallható zajos környezetben.	<p>A mikrofon túl távol van a beszélőtől.</p> <p>A mikrofont elfedik a ruhák vagy rosszul van pozicionálva.</p>	<p>Helyezze közelebb a mikrofont a beszélőhöz.</p> <p>Ügyeljen rá, hogy a mikrofon ne legyen takarásban.</p>
<u>Bluetooth headset:</u> A vonal másik végén nem hallható hang.	A mikrofon túl távol van a felhasználótól.	Helyezze közelebb a mikrofont a felhasználóhoz.
<u>Teleloop Mode:</u> A telefonhívások nem hallhatók a hallókészülékeken	A Bluetooth kapcsolatok nem elérhetők Teleloop módban.	Válasszon másik bemeneti módot és szükség esetén létesítsen újra Bluetooth kapcsolatot.
A LED lassan villog zölden vagy kéken, de nem hallható átjátszott hang a hallókészülékeken.	A hallókészülékek nem érzékelik az átjátszott hangot.	Kezdje meg újra a hang átjátszását a <i>Hang átjátszása</i> fejezet alapján.

HIBA-JELENSÉG	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁS
A LED lassan villog zölden vagy kéken, de nem hallható átjátszott hang a hallókészülékeken.	A hallókészülékek nincsenek párosítva a mikrofonnal. Nincs bemenő audió jel.	Olvassa el a <i>Párosítás hallókészülékekkel</i> fejezetet. <ul style="list-style-type: none"> • Kapcsolja be a hangforrást. • Kapcsolja ki a némitást vagy növelje a hangforrás hangerejét. • Ellenőrizze, hogy a Teleloop vagy FM jel elérhető.
A LED erősen világít.	Hibás működés.	Kapcsolja ki a mikrofont, majd 30 másodperc múlva kapcsolja vissza.
A bemenő csatornát jelző LED gyorsan villog.	Probléma észlelhető a kiválasztott hangforrással kapcsolatban.	Csatlakoztasson audió kábelt, FM vevőt vagy létesítse újra a Bluetooth kapcsolatot.
A bemenő csatornát jelző LED nem világít.	A LED az akkumulátor kímélése érdekében ki van kapcsolva.	Nyomja meg a bemenetválasztó gombot a LED bekapcsolásához.
Adott bemeneti mód nem választható ki.	A kiválasztott csatorna nem elérhető.	Csatlakoztasson audió kábelt, FM vevőt vagy létesítse újra a Bluetooth kapcsolatot.
Nem létesíthető egynél több Bluetooth kapcsolat.	A mikrofon már párosítva van egy Bluetooth eszközzel.	Olvassa el a <i>Párosítás más Bluetooth eszközökkel</i> fejezetet.
Váratlan jelvezetés a TV (opcionálisan elérhető kiegészítő) irányából, miközben a két LED lassan villog a mikrofonon.	Másik Bluetooth eszköz magasabb prioritású, mint a TV hangsávja.	Változtassa meg a mikrofon bemeneti módját Bluetooth-ról.

Biztonsági információk

Biztonsági információk



Az elektronikai eszközökből származó hulladékot a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell kezelni.

Útmutató a használaton kívül helyezéshez

A Starkey Hearing Technologies támogatja és elképzelhető, hogy a helyi jogszabályok is előírják, hogy a helyi újrahasznosítási gyakorlatnak megfelelően szabaduljon meg Kihelyezett Mikrofon + kiegészítőjétől.

Az alábbiakban található útmutató a hulladékfeldolgozó/újrahasznosítást végző személyzet tájékoztatása érdekében készült. Kérjük, a kiegészítő használaton kívül helyezésekor tegye mellé ezt az útmutatót is.

A hulladékfeldolgozást/újrahasznosítást végző személyzet részére

A töltőben lítium-ion polimer akkumulátor található. Az akkumulátor eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

- Kapcsolja ki a mikrofont.
- Lapos műszerészcsavarhúzóval pattintsa szét a burkolat két oldalát.
- Az esetleges rövidzárlat elkerülése érdekében vágja le az akkumulátor vezetékét a nyomtatott áramkörrel.
- Egy lapos feszítőeszközzel távolítsa el az akkumulátort az eszközből.

Rendeltetészerű használat

A Kihelyezett Mikrofon + egy kiegészítő eszköz 2.4 GHz vezeték nélküli, légvezetéses hallókészülékek számára, amelynek segítségével számos hangforrás hangja továbbítható vezeték nélkül közvetlenül a hallókészülékekre. Zajos környezetben a távoli beszélő közelében elhelyezve kihelyezett mikrofonként funkcionálhat, de lehetséges hurokjelekre, FM frekvenciákra, analóg vonali jelre és Bluetooth eszközökhöz történő csatlakoztatásra is a megfelelő kiegészítővel.

A Kihelyezett Mikrofon + az IEC 60601-1 gyógyászati segédeszköz sztenderd szerint a B típusba tartozik.

A kiegészítőt úgy tervezték, hogy megfeleljen a legszigorúbb Nemzetközi Elektromágneses Kompatibilitási szabványoknak. Ettől függetlenül előfordulhat, hogy használat során nagyfeszültségű vezetékek, reptéri biztonsági kapuk, elektromágneses mezők vagy egyéb, elektromágneses orvosi eszközök, rádiójelek és elektromos kisülések interferenciát okozhatnak.

A kiegészítőt szappanos vízzel nedvesített ronggyal tisztítsa.

Amennyiben más orvosi eszközt használ vagy visel, mint például defibrillátor vagy pacemaker, és ezek

várhatóan interferálni fognak a kiegészítővel, vegye fel a kapcsolatot orvosával vagy a készülék gyártójával az esetleges következményekkel kapcsolatban. Ne használja a kiegészítőt MRI vizsgálat alatt vagy túlnyomásos kamrában. A kiegészítő használhatósága nincs teljes mértékben ellenőrizve robbanásveszélyes környezetben, pl.: szénbányában vagy vegyianyag gyárakban.

Használat repülőgépeken

A kiegészítő a személyzet kifejezett engedélye nélkül nem használható repülőgépeken.

Nemzetközi használat

A kiegészítő az Ön országában vagy régiójában jóváhagyott frekvencián működik, azonban nem biztos, hogy más országokban és régiókban is megfelel.

Vegye figyelembe, hogy nemzetközi utazás során a Kihelyezett Mikrofon + működése interferenciát okozhat más elektronikus készülékekkel vagy más elektronikus készülékek okozhatnak interferenciát az Ön kiegészítőjével.

A kiegészítőt -10°C és +45°C közötti hőmérsékleten, 10-95% közötti páratartalmú környezetben használja és tárolja.

Az eszközt az alábbi figyelmeztetések tudomásulvételével használja:

FIGYELMEZTETÉS: A megfelelő működés érdekében kerülje a kiegészítő más elektronikai eszközök közvetlen közelében történő használatát. Amennyiben mégis kénytelen így használni a készüléket, győződjön meg róla, hogy a hallókészülék és a környező eszközök megfelelően működnek.

FIGYELMEZTETÉS: Harmadik fél által gyártott tartozékok és alkatrészek használata megnövelheti az elektromágneses kisugárzást és csökkentheti az elektromágnességgel szembeni védettséget, így a felhasználói élmény és a teljesítmény csökkenhet.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a kiegészítő kevesebb, mint 30 cm körzetében hordozható rádiófrekvenciás eszközt használnak, a hallókészülékek teljesítménye csökkenhet. Ebben az esetben távolodjon el a kommunikációs eszköztől.

Annak ellenére, hogy a kiegészítő hivatalosan nem rendelkezik IEC 60529 szerinti por- és cseppálló (IP) minősítéssel, megfelelt az IP 5X szintű teszteken, tehát az eszköz porálló.

A kiegészítőben található akkumulátor nem cserélhető, ennek megfelelően ne próbálja cserélni. A kiegészítőnek nincs a felhasználó által javítható alkotóeleme. Ne nyissa fel és ne próbálja megjavítani az eszközt.

Ne csatlakoztassa a kiegészítőt olyan eszközökhöz, amelyek nem szerepeltek az útmutatóban. A Kihelyezett Mikrofon + tervezett élettartama 3 év.

Vezeték nélküli eszköz műszaki leírása

A kiegészítőben található rádióadó a 2.4-2.4835 GHz tartományban, maximum 8 dBm kisugárzott teljesítménnyel működik, 1.1 MHz tartományú 1M12FXD modulációval. A rádió vevőegységének sávzélessége 2 MHz.

A kiegészítő az alábbi kibocsátási és immunitási teszteknek felelt meg:

- IEC 60601-1-2 szabvány az 1. csoport B osztályába sorolt eszközök által kisugárzott zajhatásról a CISPR 11-nek megfelelően.
- A tápforrás harmonikus torzítása és feszültségingadozása az IEC 60601-1-2 2. táblázatának megfelelően.
- Sugárzott RF-immunitás 10 V/m télerősségnél 80 MHz és 2,7 GHz között, illetve magasabb télerősségű kommunikációs eszközöktől az IEC 60601-1-2 9. táblázatának megfelelően.
- Elektromágneses zavartűrési 30 A/m mágneses mezőkkel szemben.
- Elektrosztatikus kisülés elleni védelem +/- 8 kV kisülésnél és +/- 15 kV levegő kisülésnél.
- A tápforrás elektronikus tranzieniseivel szembeni ellenállás +/- 2 kV feszültségen, 100 Hz ismétlési frekvencián.
- Túlfeszültséggel szembeni ellenállás +/- 1 kV feszültségen.
- A tápforrás által gerjesztett RF mezők keltette zavarral szemben az IEC 60601-1-2 6. táblázata szerint.
- A tápforrás feszültségeseivel és zavaraival szemben az IEC 60601-1-2 6. táblázata szerint.

Szabályozási közlemények

FCC ID: EOA-24MFA

IC: 6903A-24MFA (900 modell)

FCC közlemény

Ez a készülék megfelel az FCC szabályok 15. részének és az RSS szabványoknak. A működtetésnek két feltétele van: (1) Ez a készülék nem okozhat ártalmas interferenciát, és (2) ez a készülék el kell, hogy viseljen bármely kapott interferenciát, beleértve azokat az interferenciákat is, amelyek a készülék nemkívánatos működését okozzák.

MEGJEGYZÉS: A gyártó nem felelős bármely rádió vagy televízió interferenciáért, amelyet ennek a készüléknek a nem engedélyezett módosítása okoz. Az ilyen módosítások érvényteleníthetik a használo jogosultságát, hogy működtesse a készüléket.

Hereby, Starkey Hearing Technologies declares that Starkey Hearing Technologies Remote Microphone+ is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be obtained from the following addresses and from docs.starkeyhearingtechnologies.com

Starkey Hearing Technologies

6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA



Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX
United Kingdom



Az eszköz rádiójeleket bocsát ki. A mellékelt jelöléssel ellátott elektronikai cikkek közelében interferencia alakulhat ki.



II. Osztályú eszköz



Az elektronikai eszökből származó hulladékot a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell kezelni



Használat során kövesse a felhasználói útmutatót





© 2018 Starkey Hearing Technologies. Minden jog fenntartva.
86165-007 9/18 BKLT3010-01-EE-SG -HUN

