

Viele gute Gründe für ein Akku-Hörsystem:

NUEAR

Voller Energie. Jederzeit.

Sicherheit und Komfort mit modernen Akku-Hörsystemen.



Handhabung und Komfort

Kein Batteriewechsel mehr



Hörgenuss rund um die Uhr

Weit mehr als 24 Stunden Laufzeit



Integrierte Schnellladefunktion:

10 Minuten Laden = 3 Stunden Hörgenuss



Sicherheit

Zertifiziertes Medizinprodukt



Langlebigkeit

Lithium-Ionen-Akkus der neuesten Generation



Umwelt

Kein Batteriemüll – Akkus werden in aufwendigem Prozess wiederaufbereitet

Weitere Tipps und Tricks zu der Pflege Ihrer Hörsysteme finden Sie auf

www.nuear.de/hoergeraete-wartung-und-pflege

Für eine lange Leistungsfähigkeit und einen optimalen Schutz vor Feuchtigkeit ist eine tägliche Trocknung der Akku-Hörsysteme zu empfehlen. Dies funktioniert am besten mit der elektrischen Trockenstation Dry Cap UV 3 (39039-000). Der Akku Ihres Hörsystems ist nach neuesten und besten technischen Standards entwickelt. Nichtsdestotrotz kann es im Laufe der Jahre dazu kommen, dass Ihnen nicht mehr die volle Nutzungsdauer von bis zu 51 Stunden zur Verfügung steht. Ähnlich wie bei Smartphones unterliegen auch die von uns verwendeten Akkus natürlichen Verschleißerscheinungen. Hierbei handelt es sich um den physikalischen Abnutzungsprozess. Es ist möglich, dass auch bei täglicher Ladung in Einzelfällen Anzeichen einer verkürzten Nutzungsdauer zu erkennen sind. Ob und ab wann dies auftritt, ist abhängig von der Nutzung Ihrer Hörsysteme, der richtigen Pflege sowie Ihrer Laderoutine. Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass dies kein Qualitätsmangel darstellt und Sie ermutigen, Ihr Akku-Hörsystem trotzdem so oft wie möglich zu tragen und Ihr Leben damit zu genießen.



NUEAR

Akku-Hörsysteme – so sicher und komfortabel wie nie zuvor.

Unsere aktuellsten Hörsysteme sind die leistungsstärksten und langlebigsten, die wir bisher entwickelt haben. NuEars Anspruch ist es, Ihnen die höchste Qualität in puncto Hören, Verstehen, Komfort und auch Verlässlichkeit zu bieten. Deshalb haben wir unser neues **Pro8 HydraShield** entwickelt, um alle Hörsysteme bestmöglich gegen jegliche Umwelteinflüsse, vor Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen. Umfangreiche Testserien bescheinigen einen Schutzfaktor, welcher **weit über IP68 hinaus geht**.

NXG^{AI}



**Feuchtigkeits-
test**



**Salznebel-
test**



**Regenspray-
test**



**Schweiß-
test***



**Erweiterte
Belastungstests***



**Tauchbad in
Salzlake***

IP68+



Für besondere Langlebigkeit entwickelt

Hörsysteme sollen täglich getragen werden. Wir sorgen dafür, dass Sie täglich Freude an Ihren neuen Hörsystemen haben.



Gemacht für jedes Klima

Egal wo Sie sich gerade befinden, ob zuhause oder im Urlaub: Genießen Sie den Klang der Welt und jeden einzelnen Moment.



Blieben Sie aktiv

Bewegung und Sport können anstrengend sein und Sie schon einmal zum Schwitzen bringen. Kein Grund Ihre Hörsysteme abzuliegen: Durch modernste Schutzmechanismen reicht ein Reinigen und Trocknen im Anschluss an die Aktivität aus, um Ihre Hörsysteme dauerhaft funktionsfähig zu halten.

Nutzungstipps

Wie oft sollte ich meine Hörsysteme laden?

Wie viele andere Dinge des täglichen Gebrauchs gehören auch Hörsysteme jeden Abend in die Ladestation. Dadurch haben Ihre Hörsysteme ihren festen Platz und werden ganz automatisch über Nacht für alle Aufgaben des kommenden Tages aufgeladen.

Wie lange dauert eine Ladung?

Eine vollständige Ladung dauert bis zu drei Stunden. Sie können die Hörsysteme nach dem Laden – oder wenn Sie diese gerade nicht tragen – ohne Bedenken in der Ladestation aufbewahren, da sie nicht überladen werden.

Ich habe vergessen meine Hörsysteme zu laden – was nun?

Die Ladestation Ihrer Hörsysteme besitzt eine Turbo-Ladefunktion. Damit haben die Hörsysteme bereits nach 10 Minuten genug Strom, um bis zu 3 Stunden verwendet zu werden. Eine vollständige Ladung dauert bis zu 3 Stunden.

Wie lange hält eine Akku-Ladung?

Unsere Hörsysteme besitzen die neuesten und leistungsfähigsten Akkus. Je nach verwendeter Bauform und Nutzung der Hörsysteme, können diese zwischen 40 und 50 Stunden am Stück verwendet werden.

Wie kann man die Langlebigkeit des Akkus erhöhen?

Wir empfehlen, die Hörsysteme täglich zu trocknen – am besten mit der elektrischen Trockenstation Dry Cap UV 3 (39039-000). Eine regelmäßige Reinigung der Ladkontakte mit einem weichen Tuch stellt den bestmöglichen Kontakt zur Ladestation sicher.

