


# Controlli Utente

Apri Inspire™ X e connetti gli apparecchi acustici 2,4 GHz alla piattaforma Thrive. Per informazioni su come iniziare, far riferimento a Quick Tip Fit Protocol.

Durante il primo fitting si aprirà il pannello per la Configurazione Controlli Utente. Seleziona **Mostra Demo** per una demo delle opzioni di configurazione dei controlli utente, oppure seleziona **Non mostrare più** e **Chiudi**. Seleziona **Controlli Utente** sulla barra di navigazione di sinistra per programmare e regolare i controlli utente.

## Configurazione Controlli Utente

A sinistra del pannello si trovano i controlli utente. Trascina quelli che desideri abilitare e inseriscili nelle gesture a destra.

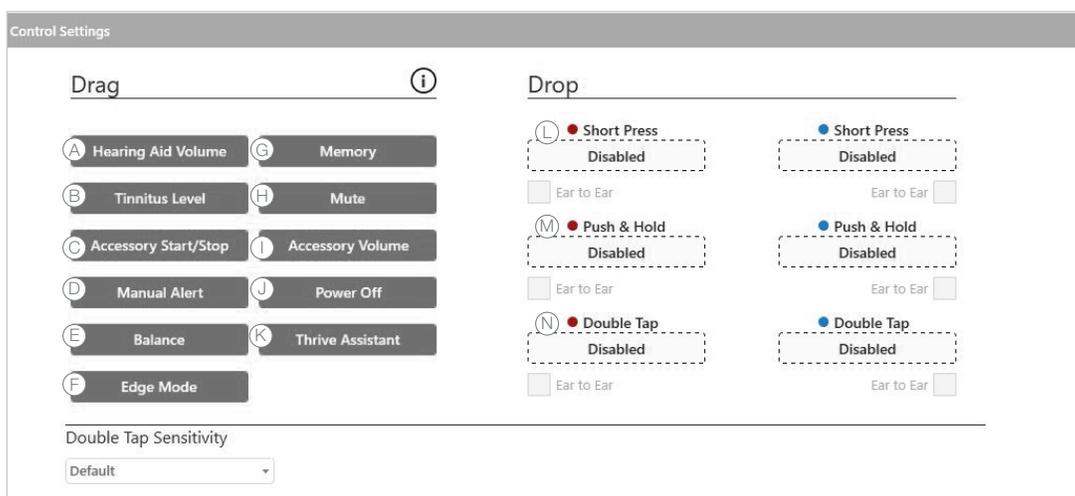

Le opzioni Controlli Utente includono:

- (A) **Volume Apparecchio Acustico**
- (E) **Bilanciamento (Solo per CROS)**
- (H) **Volume Accessori**
- (B) **Livello Tinnito**
- (F) **Modalità Edge (Solo per Edge AI)**
- (I) **Spegnimento (Solo per RIC R)**
- (C) **Avvio/Stop Accessori**
- (G) **Memoria**
- (J) **Assistente Thrive (Solo per Edge)**
- (D) **Notifica manuale (Solo per Edge)**
- (K) **Muto**

Le opzioni gesture comprendono:

- (L) **Short Press** *pressione breve*: Memoria, Volume Apparecchio Acustico, Volume Livello Tinnito o Volume Accessori, Modalità Edge
- (M) **Push & Hold** *pressione prolungata*: Volume Apparecchio Acustico, Memoria, Livello Tinnito, Silenzioso, Avvia/Interrompi Accessori, Volume Accessori, Spegnimento, Notifica Manuale, Bilanciamento
- (N) **Doppio Tocco**: Avvia/Interrompi Accessori, Assistente Virtuale, Modalità Edge

**NOTA:** La pressione del Doppio Tocco può essere regolata selezionando il menù a tendina tra le opzioni controllo utente. La pressione può essere regolata con maggiore o minore sensibilità rispetto alla regolazione di default.




## Gestione delle Telefonate

Selezionare Gestione delle Telefonate per l'informazione specifica controllo utente per rispondere, rifiutare e terminare le chiamate con cellulari iOS. Selezionare il flag per disabilitare la funzione.

Nota: La funzione è disponibile per ogni modello di iPhone.

Nota: La funzione risponderà automaticamente ad ogni telefonata senza perdere altre funzionalità del controllo utente (es. Volume, programma. Tinnitus, ecc.) quando la telefonata non è in corso.

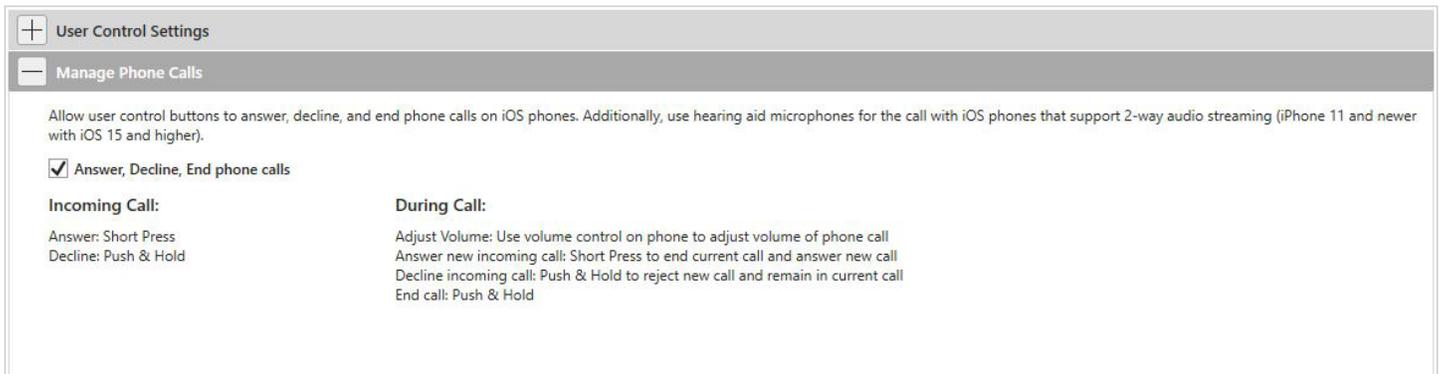


## Ampiezza controllo volume e intervalli

Se è abilitato il controllo volume, seleziona l'ampiezza e gli intervalli

- 1 Seleziona i pin per regolare l'ampiezza del volume.
- 2 Seleziona intervalli di 2 dB o 4 dB.

**NOTA:** Se il controllo del volume non è stato abilitato nelle impostazioni del Controllo Utente, il software Inspire X non permetterà di regolare l'ampiezza del Volume e gli intervalli.

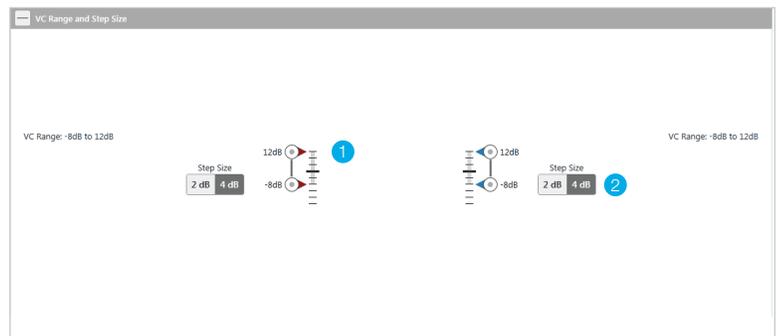


## Ampiezza stimolo sonoro e intervalli

Se è stata abilitata la funzione di stimolo sonoro, selezionane l'ampiezza e gli intervalli.

Per ulteriori informazioni fai riferimento a QuickTIP Tinnitus.


- 1 Seleziona i pin per regolare il livello dello stimolo sonoro.
- 2 Seleziona intervalli di 2 dB o 4 dB.

**NOTA:** Se il controllo tinnito non è stato abilitato nelle impostazioni del Controllo Utente, il software Inspire X non permetterà di regolare l'ampiezza dello stimolo sonoro e i relativi intervalli.

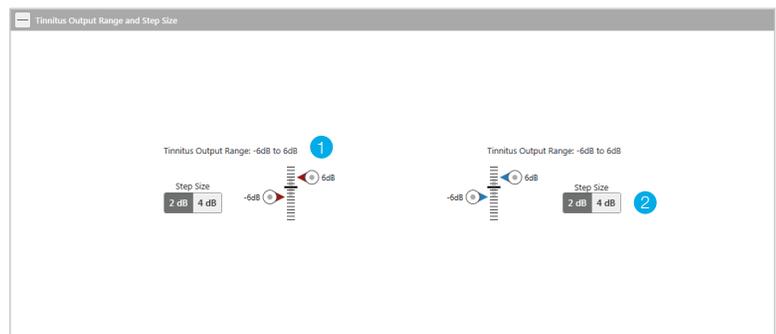


## Altre Opzioni di Configurazione

Resettare i livelli su Cambio Memoria, ripristinerà di default i livelli preimpostati di Volume e Tinnito dell'apparecchio acustico, nel caso di modifica di una memoria. Se si desidera, deselezionare questa funzione per disabilitarla.

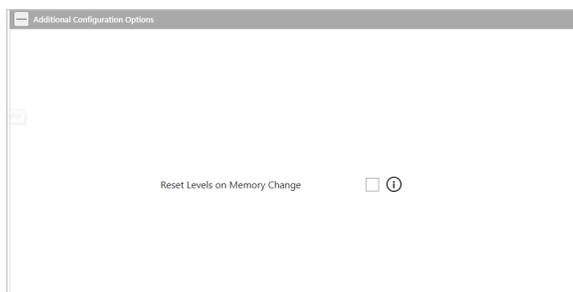

## Guida Dispositivo

Seleziona Stampa nelle Impostazioni Controllo Utente per stampare la Guida Dispositivo. Stamperà le informazioni di controllo utente specifiche per l'apparecchio acustico collegato.

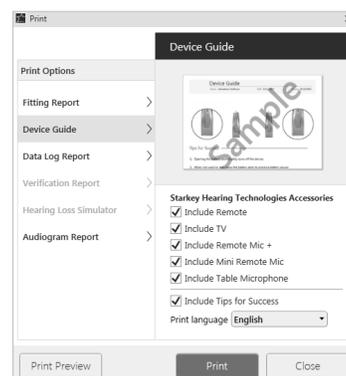

\*Disponibile su determinati apparecchi acustici a 2,4 GHz della piattaforma Thrive. Contatta il tuo rappresentante per informazioni specifiche. |

\*\*Disponibile solo su tecnologia AI.

Il logo Starkey, Inspire e Thrive sono marchi registrati Starkey Laboratories, Inc.

©2022 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved. 12/22 FLYR3487-03-IT\_SC