


Aplikacja Thrive

Tryb Podstawowy



Hear better. Live better.

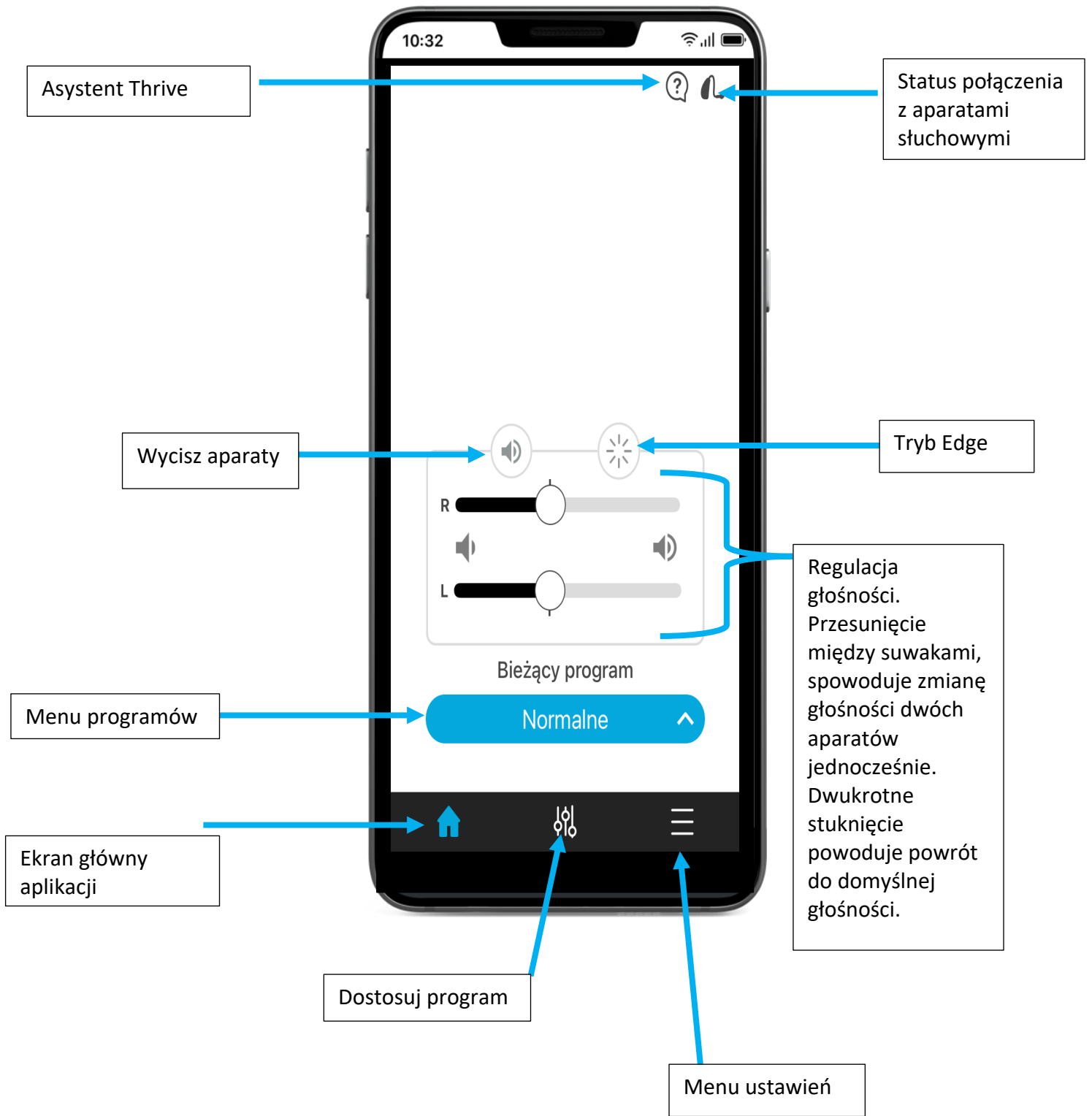

Asystent Thrive

Status połączenia z aparatami słuchowymi

Wycisz aparaty

Tryb Edge

Menu programów

Regulacja głośności. Przesunięcie między suwakami, spowoduje zmianę głośności dwóch aparatów jednocześnie. Dwukrotne stuknięcie spowoduje powrót do domyślnej głośności.

Ekran główny aplikacji

Dostosuj program

Menu ustawień

Aplikacja Thrive

Tryb Podstawowy




Hear better. Live better.


Asystent Thrive

Thrive Assistant zapewnia obsługę aparatów słuchowych bez użycia rąk.

Aktywacja asystenta Thrive poprzez aplikację lub gest umożliwia korzystanie z komend głosowych, które zapewniają:


- Regulację głośniej/ciszej
- Zmianę programów
- Znajdź mój telefon

Asystent Thrive, udziela również odpowiedzi na pytania dotyczące aparatów słuchowych, aplikacji oraz akcesoriów Starkey. Wystarczy wybrać symbol  i zadać pytanie asystentowi.

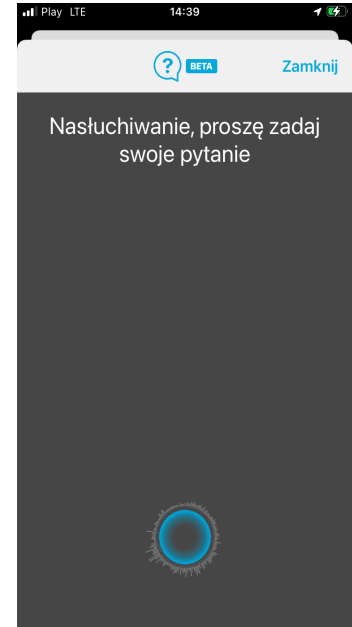


Tworzenie nowych programów

Wybierz pamięć, która zapewnia najlepszą jakość dźwięku w bieżącym środowisku odsłuchowym. Wybrana pamięć stanowi punkt odniesienia dla dokonywanych regulacji. Pacjent może stworzyć 20 programów indywidualnych z przypisaną geolokalizacją.

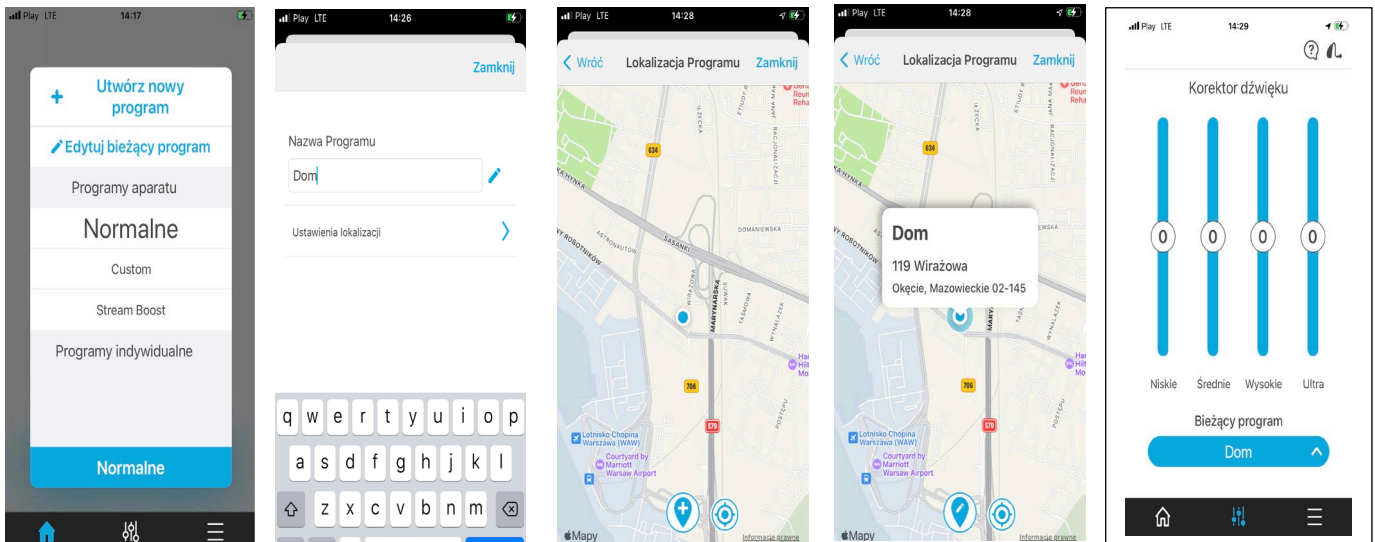


1. Wybierz Menu programów. Na samej górze kliknij „+ Utwórz nowy program”

2. Stwórz program indywidualny. W celu przypisania lokalizacji, wybierz Ustawienia lokalizacji.

3. Wybierz  by przypisać preferowaną lokalizację

4. Program indywidualny został przypisany do wybranego miejsca

5. Regulacja ustawień programów indywidualnych jest możliwa przez wybór w ekranie głównym ikony 

Aplikacja Thrive

Tryb Podstawowy




Hear better. Live better.

Tryb Maski

Zapewnia lepsze słyszenie osób w masce. Wzmacnia zakres dźwięków mowy poprawiając rozumienie w trakcie konwersacji, gdy nasz rozmówca ma zasłonięte usta.

Aktywacja Trybu Maski


Tryb Maska będzie dostępny w aplikacji Thrive tylko wtedy, gdy w oprogramowaniu Inspire lub w aplikacji (menu ustawień-ustawienia urządzenia-wyberz gest) został aktywowany Asystent Thrive. Dostępność tych funkcji jest uzależniona od poziomu zaawansowania aparatu słuchowego.

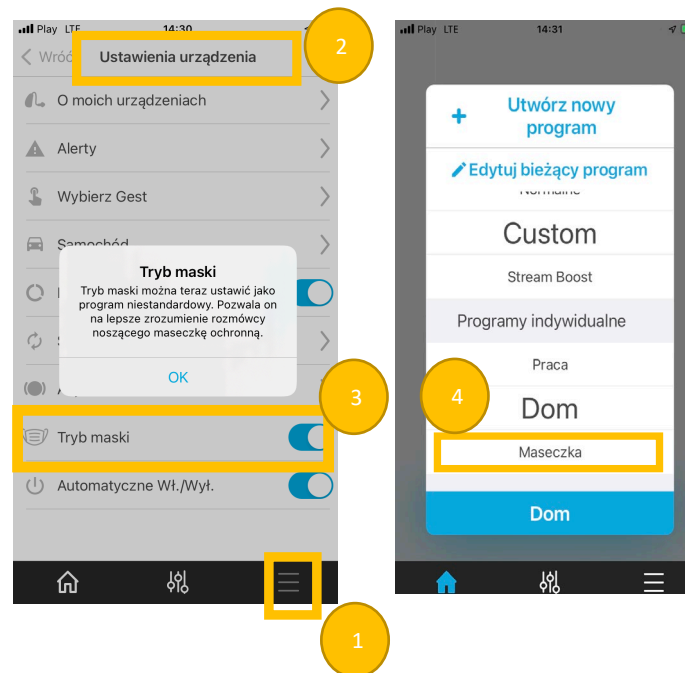

1. Menu ustawień
2. Ustawienia urządzenia
3. Aktywuj Tryb Maska
4. Tryb maska jest dostępny w Menu programów

Powiadomienie o upadkach

Funkcja powiadomienie o upadkach wykorzystuje zintegrowane czujniki do automatycznego wykrywania upadków i wysyłania wiadomości tekstowych z ostrzeżeniem do wybranych kontaktów.

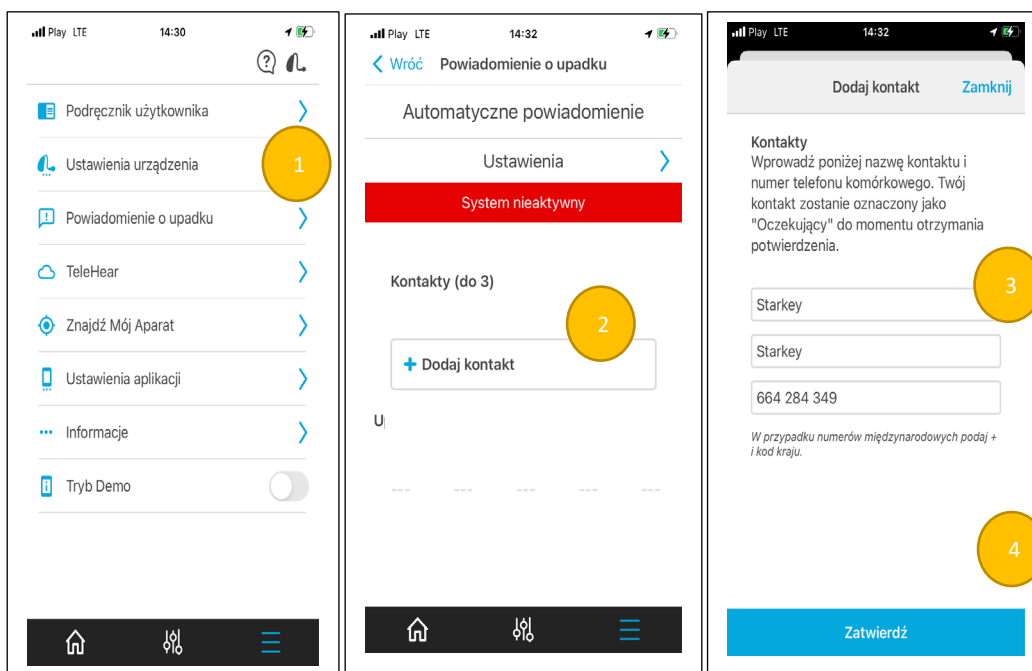


1. W menu ustawień wybierz powiadomienie o upadku.
2. + Dodaj kontakt
3. Wpisz dane osoby, która ma otrzymać powiadomienie o upadku.
4. Wybierz: Zatwierdź

Aplikacja Thrive

Tryb Podstawowy







Hear better. Live better.

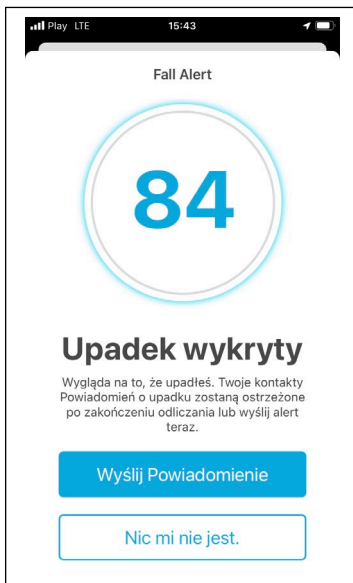

Gdy aparaty słuchowe wykryją upadek, w aplikacji pojawi się powiadomienie. Po odliczaniu (90 lub 60 sekund) opiekun otrzyma powiadomienie SMS o upadku oraz lokalizacji, gdzie do niego doszło. Jeśli Nie doszło do upadku lub czujemy się dobrze i nie chcemy wysłać powiadomienia mamy 90 lub 60 sekund na anulowanie ostrzeżenia.

TeleHear

Umożliwia zdalne połączenie z protetykiem słuchu w celu zaprogramowania aparatu słuchowego. Umów sesję zdalną postępuj zgodnie z zaleceniami:

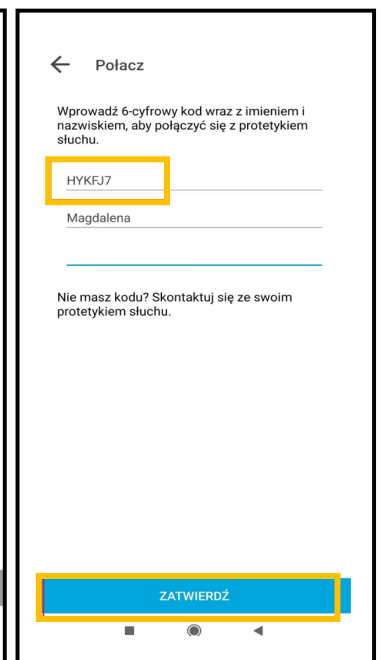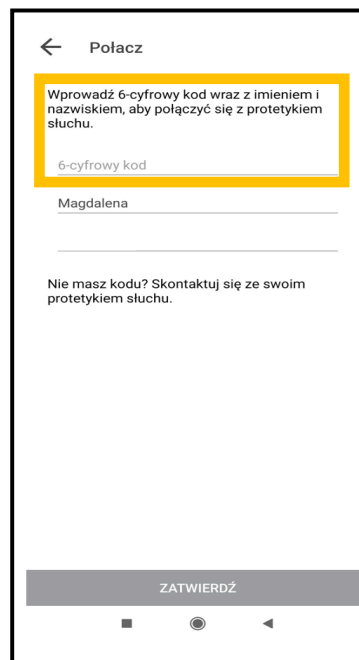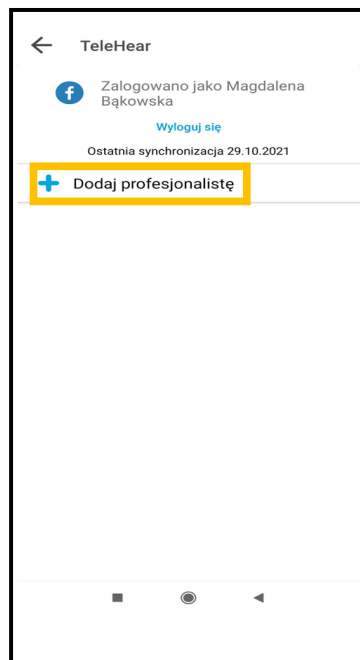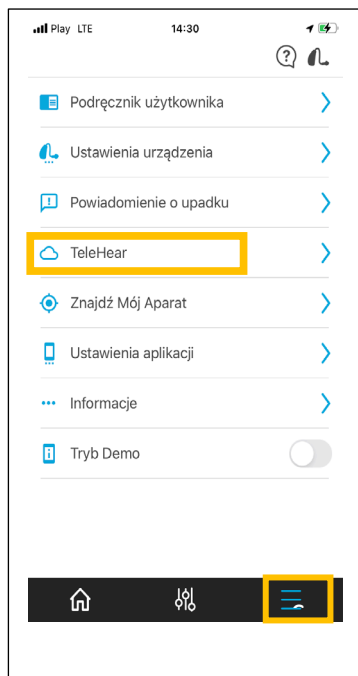

1. W menu ustawień wybierz opcję TeleHear.


2. Wybierz + Dodaj specjalistę

4. Uzupełnij dane wraz z kodem podanym przez protetyka słuchu.

5. Po uzupełnieniu wszystkich informacji wybierz Zatwierdź. Oczekuj na połączenie wideo.


Tinnitus

Wybierając program Tinnitus, użytkownik aplikacji Thrive może regulować głośność oraz szybkość modulacji bodźca dla szumów usznych.

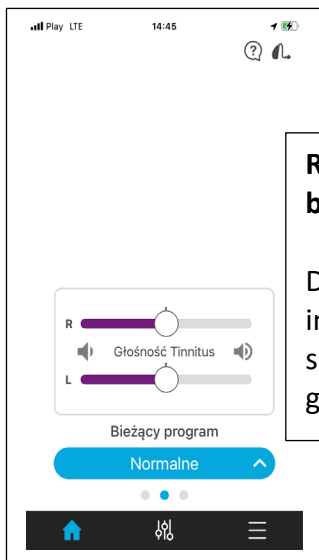

Regulacja głośności bodźca szumów usznych

Dostosuj głośność bodźca indywidualnie, przesunij suwaki, aby dostosować głośność.

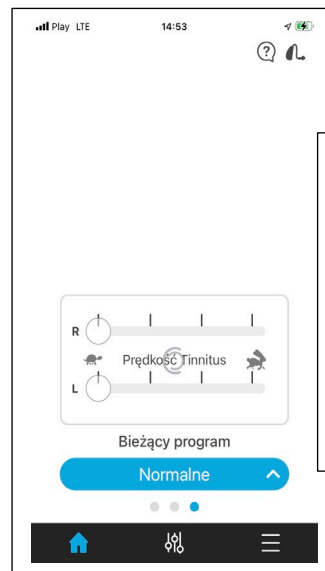


Regulacja prędkości bodźca szumów usznych

Przesunij suwaki, aby zmienić ustawienie z braku modulacji (w lewo) na szybką modulację (w prawo).

System Cros

Dostosuj balans dźwięku z nadajnika względem odbiornika w programie który zostały skonfigurowane dla BiCROS. Ekran Balance (Balans) będzie widoczny w aplikacji Thrive, jeśli program słuchowy będzie miał funkcję BiCROS.

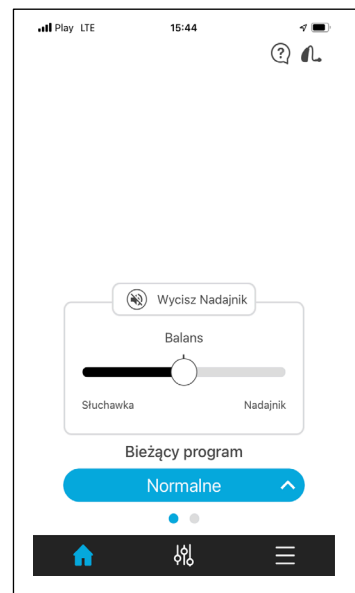

Tryb podstawowy posiada również:

- Podręcznik użytkownika
- Ustawienia urządzenia
- Znajdź Mój Aparat
- Informacje
- Ustawienia aplikacji
- Tryb demo