


## Compatibilité des appareils

Découvrez si votre appareil mobile est compatible avec l'application My Starkey en balayant le code ci-dessous avec l'appareil photo de votre appareil.



### TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION :

1. Ouvrez l'**App Store**  sur les appareils Apple, ou **Google Play**  sur les appareils Android.
2. Dans le champ de recherche, tapez  **My Starkey**.
3. Appuyez sur **OBTENIR** sur les appareils Apple ou **INSTALLER** sur les appareils Android. Cela téléchargera l'application sur votre appareil mobile.

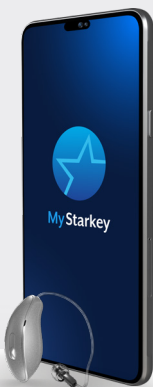

Pour obtenir la liste des appareils compatibles, visitez [fr.starkeycanada.ca/hearing-aids/apps/my-starkey/compatibility](https://fr.starkeycanada.ca/hearing-aids/apps/my-starkey/compatibility).

### En savoir plus sur l'application My Starkey

Visitez [fr.starkeycanada.ca/hearing-aids/apps/my-starkey/overview](https://fr.starkeycanada.ca/hearing-aids/apps/my-starkey/overview) pour obtenir des instructions d'utilisation, des vidéos pratiques et plus d'informations sur les fonctionnalités.



[fr.starkey.ca](https://fr.starkey.ca)

Starkey Canada  
2476 Argentia Road, Suite 301  
Mississauga, ON L5N 6M1  
1.833.423.2598

L'application peut présenter de légères différences selon votre téléphone. REMARQUE : Les téléphones du même modèle peuvent varier d'un pays à l'autre. Cela peut avoir une incidence sur la compatibilité dans certains pays.

Starkey, le logo Starkey, Genesis et Starkey Edge sont des marques de commerce de Starkey Laboratories, Inc. © 2024 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Apple Watch®, Apple et App Store sont des marques de commerce d'Apple, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions.

© 2024 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés.



## My Starkey

### Application mobile

Rien de plus facile.  
La puissance dont vous avez besoin





**Votre appareil sans fil Edge AI ou Genesis AI de Starkey Les appareils auditifs peuvent se connecter par Bluetooth® à l'application compatible My Starkey.**

- **Entendez mieux n'importe où**

Des ajustements instantanés pour éclaircir la parole et réduire le bruit, même dans les environnements d'écoute les plus difficiles.

- **Obtenez des conseils, des outils et des ressources**

Adaptez-vous plus rapidement aux appareils auditifs grâce à des conseils pratiques rapides, des astuces et des vidéos. Adaptés à l'étape où vous vous trouvez dans votre parcours auditif.

- **Surveillez la santé et le mieux-être**

Surveillez l'audition et l'activité physique quotidiennes pour vous aider à rester en bonne santé. Fixez et atteignez des objectifs en matière d'audition, de pas, d'exercice et plus encore.

**Il n'aura jamais été aussi facile de prendre le contrôle de votre parcours auditif. Et de vivre votre meilleure vie, grâce à My Starkey.**



## Connexion de vos appareils auditifs à un appareil Apple compatible

1. Sur votre appareil, assurez-vous que le **Bluetooth** est **activé**.
2. Sélectionnez **Réglages > Accessibilité > Appareils auditifs**.
3. **Désactivez** vos appareils auditifs, puis **réactivez-les** pour activer le mode de jumelage.
4. Dans la rubrique **APPAREILS AUDITIFS MFI**, vous devriez voir vos appareils auditifs (p. ex., « **Appareils auditifs de Jane** »). Sélectionnez-les.
5. Appuyez sur **Jumeler** pour chaque appareil (**DROIT** et **GAUCHE**). Le jumelage est terminé.
6. Ouvrez **l'application My Starkey**, puis suivez les instructions pour créer votre compte et connecter vos appareils auditifs.



**Changez les programmes et réglez le volume rapidement et facilement sur votre montre Apple compatible.**

Visitez **la section « Learn »** de l'application pour savoir comment installer l'application My Starkey sur votre montre Apple.



## Connexion de vos appareils auditifs à un appareil Android compatible

1. Tapez **l'icône Paramètres** sur l'appareil.
2. Sur votre appareil, assurez-vous que le **Bluetooth** est **activé**.
3. **Désactivez** vos appareils auditifs, puis **réactivez-les** pour activer le mode de jumelage.
4. Ouvrez **l'application My Starkey**, puis suivez les instructions pour créer votre compte et connecter vos appareils auditifs.
5. Lorsque vous voyez vos appareils auditifs à l'écran, cochez la ou les cases à côté de chaque appareil (**DROITE** et **GAUCHE**). Appuyez sur « **CONNECT** ». Le jumelage est terminé.

