

Egyéni hallókészülékek

Fülkagyló (CE),
Hallójárat (CC),
Mélyhallójárat (CIC),
Mini mélyhallójárat (IIC) készülék

Tartalomjegyzék

Áttekintés

A fülkagyló készülék áttekintése	4
A hallójáratí készülék áttekintése	5
A mélyhallójáratí készülék áttekintése	6
A miní mélyhallójáratí készülék áttekintése	7

Előkészületek

Elemek.	8
Elemtöltöttség jelzése	10
A hallókészülék behelyezése és eltávolítása	11

A hallókészülék működése

Be- és kikapcsolás.	13
Hangerőszabályozás.	14
Multimemória	16
Íránybeállítások	16
Telefonhasználat	17

Tartozékok

Vezeték nélküli tartozékok	20
--------------------------------------	----

A hallókészülék karbantartása

A készülék karbantartása	21
Szűrők (Hear Clear-HCK)	22
Szervíz és javítás	25
Hibaelhárítási útmutató	25

A jobb kommunikációért

Tanácsok Önnek	26
Tanácsok családja és barátai számára.	27

Biztonsági információk	28
----------------------------------	----

Egyéb információk (Környezetvédelem).	30
---	----

FCC információk.	31
--------------------------	----

Az Ön hallókészüléke:

- fülkagyló készülék (CE).
Kérjük, lapozzon a 4. oldalra.
- hallójáratí készülék (CC).
Kérjük, lapozzon az 5. oldalra.
- mélyhallójáratí készülék (CIC).
Kérjük, lapozzon a 6. oldalra.
- mini mélyhallójáratí készülék (IIC).
Kérjük, lapozzon a 7. oldalra.

Az Ön hallókészüléke ilyen elemmel működik:

- 13-as narancssárga
(fülkagyló készülék, CE).
- 312-as barna
(hallójáratí készülék CC, mélyhallójáratí CIC)
- 10-es sárga
(mélyhallójáratí készülék CIC,
mini mélyhallójáratí készülék, IIC)


Funkciók, szabályozás és a készülék részegységei

Az Ön hallókészüléke az alábbi egységeket tartalmazza:

1. Mikrofon(ok)
2. Elemtartó (ki-, bekapcsolás)
3. Szellőzőfurat (opcionális)
4. Hangszóró, fülzsír elleni védelmi rendszerrel ellátva

A sorozatszám színe azonosítja, hogy a hallókészülék a jobb vagy a bal fülbe való-e.

5. A **PIROS** szám a **jobb**,
a **KÉK** szám a **bal** fülbe való.

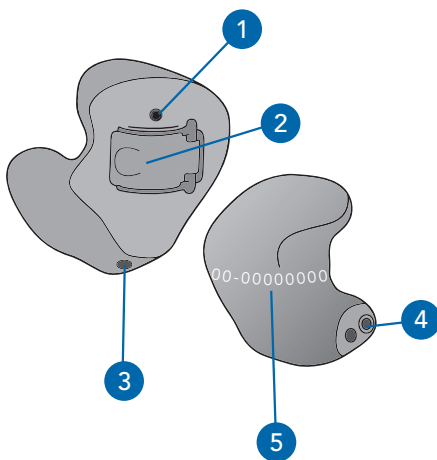

A fülkagyló készülék elemmérete a 13-as.


Funkciók, szabályozás és a készülék részegységei

Az Ön hallókészüléke az alábbi egységeket tartalmazza:

1. Mikrofon(ok)
2. Elemtartó (ki-, bekapcsolás)
3. Szellőzőfurat (opcionális)
4. Hangszóró, fülzsír elleni védelmi rendszerrel ellátva

A sorozatszám színe azonosítja, hogy a hallókészülék a jobb vagy a bal fülbe való-e.

5. A **PIROS** szám a **jobb**,
a **KÉK** szám a **bal** fülbe való.

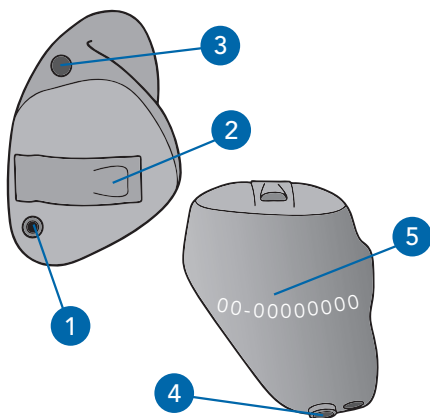

A hallójáratí készülék elemmérete a 312-es.


Funkciók, szabályozás és a készülék részegységei

Az Ön hallókészüléke az alábbi egységeket tartalmazza:

1. Multifunkciós gomb (opcionális)
2. Mikrofon
3. Hangszóró, fülzsír elleni védelmi rendszerrel ellátva
4. Elemtartó (ki-, bekapcsolás)
5. Kihúzószál
6. Szellőzőfurat (opcionális)

A sorozatszám színe azonosítja, hogy a hallókészülék a jobb vagy a bal fülbe való-e.

7. A **PIROS** számos a **jobb**,
a **KÉK** számos a **bal** fülbe való.

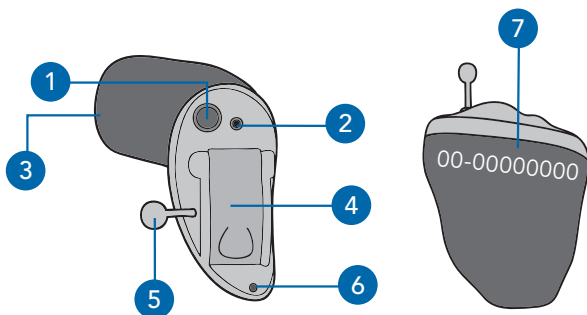

A mélyhallójáratú készülék elemmérete a 10-es.

Funkciók, szabályozás és a készülék részegységei

Az Ön hallókészüléke az alábbi egységeket tartalmazza:

1. Mikrofon
2. Hangszóró
3. Elemtartó (ki-, bekapcsolás)
4. Kihúzószál
5. Szellőzőfurat (opcionális)

**Az Ön hallókészüléke így azonosítható:
a fehér R jelzésű a jobb fülbe,
a fehér L jelzésű pedig a bal fülbe való.
A hallókészüléken sorozatszám is található.**

6. A sorozatszám elhelyezkedése



A mini mélyhallójáratú készülék
elemmérete a 10-es.


Elemek

Az Ön hallókészüléke elemmel működik.


Az elem méretét a csomagoláson található narancssárga (13), barna (312) vagy sárga (10) színkód alapján lehet meghatározni.

Az elem behelyezéséhez vagy cseréjéhez:


1. Használja a körömfogantyút az elemajtón.
2. Óvatosan nyissa ki az elemajtót, és vegye ki a régi elemet.
3. Távolítsa el az új elemről az öntapadós matricát.
4. Az elem „+” jelű oldalát (az elem lapos oldala) fordítsa az elemajtón található „+” jel felé.
5. Csukja be az elemajtót.

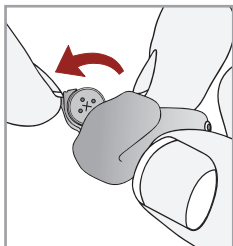


1

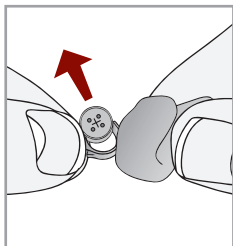


2

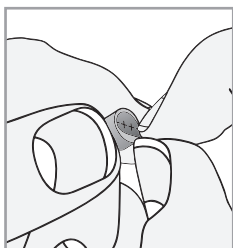

3

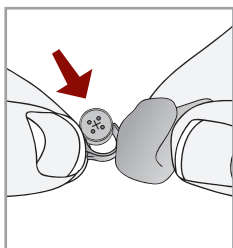

4

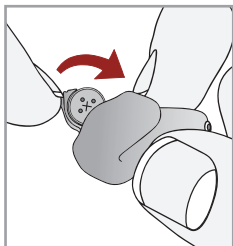

5

Elemtöltöttség jelzése

Az elemtöltöttség alacsony szintjét egy jelzőhang jelzi. Körülbelül 5 perc* áll az Ön rendelkezésére, hogy kicserélje az elemet. A hallókészülék egy másik típusú hangot ad ki, közvetlenül az elem teljes lemerülése előtt.

** A valós idő az alacsony elemtöltöttség jelzése és a kikapcsolás között a környezeti zajok és a használatban lévő elem márkája függvényében változhat.*


Hasznos tanácsok

- **SOHA NE ERŐLTESSE AZ AJTÓ ZÁRÓDÁSÁT!**
Ez a készülék súlyos sérülését eredményezheti. Ha az ajtó nem záródik tökéletesen, nézze meg, hogy az elemet megfelelően helyezte-e be.
- Ne nyissa ki az elemajtót túl tágra, mert az a készülék sérülését okozhatja.
- Méretük miatt ajánlatos az elemeket asztal felett cserélni, így csökken annak a veszélye, hogy a hallókészülék vagy az elem leesik.
- A használt elemeket azonnal dobja ki a megfelelő hulladékgyűjtőbe.
- Mivel az egyes elemek mérete és teljesítménye különböző, kérjük, forduljon audiológusához, aki tájékoztatja Önt az elem élettartamát illetően, valamint ellenőrzi, hogy Ön a megfelelő méretű és típusú elemet használja-e.


A hallókészülék behelyezése és eltávolítása

Így helyezze be a hallókészülékét:

1. Tartsa a készüléket a hüvelyk- és a mutatóujja között a készülékház külső szélénél.
2. Egy kicsit billentse a kezét előre, és óvatosan vezesse be a készülék hallójáratí végét a fülébe. Fordítsa a készüléket hátrafelé. Az ujjbegyével finoman nyomja a hallókészüléket a helyére.

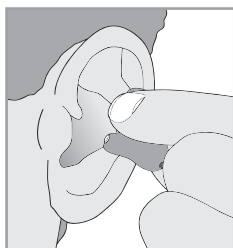

1

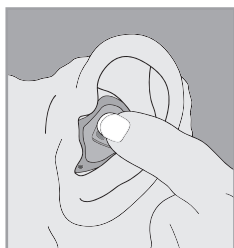

2




Így távolítsa el a hallókészülékét:

1. Fogja meg a hallókészüléket a hüvelyk- és a mutatóujjával. Óvatosan forgassa el, miközben kifelé húzza.
2. Kihúzószállal ellátott hallókészülékek esetében óvatosan fogja meg a kihúzószálat, és finoman húzza ki a hallókészüléket a füléből.

Hasznos tanácsok

- Kismértékű irritáció és gyulladás előfordulhat, amíg a fül hozzászokik a készülékhez. Amennyiben Ön ezt tapasztalja, kérjük, lépjen kapcsolatba audiológusával.
- Ha allergiás reakció lép fel Önnél, alternatív anyagok is rendelkezésre állnak a hallókészülék gyártásához. Kérjük, lépjen kapcsolatba audiológusával.
- Amennyiben súlyos duzzanatot, fülből jövő váladékot, túlzott mértékű fülzsírt vagy más szokatlan állapotot észlel, haladéktalanul forduljon orvoshoz!


Figyelmeztetések

-  Az elemek lenyelése veszélyes. Az elemek véletlen lenyelésének elkerülése végett tartsa azokat gyermekek és háziállatok elől elzárva.
-  Gyógyszereit mindig ellenőrizze, mielőtt beveszi azokat! Már megtörtént, hogy a gombelemeket tablettának nézték.
-  Soha ne vegyen elemet a szájába, mert könnyű véletlenül lenyelni őket.

Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás:

Helyezze be az elemet, és teljesen zárja be az elemajtót.

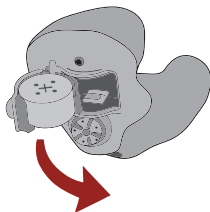

Kikapcsolás:

Nyissa ki az elemajtót oly módon, hogy az elem már ne érjen hozzá az elemérintkezőkhöz.

Az Ön hallókészüléke rendelkezik bekapcsolás késleltető üzemmóddal, így bekapcsolást követően csak néhány másodperc múlva kezd el működni. Egy hangjelzést hall majd, amikor a készüléke működésre kész.

Hangerőszabályozás

- Az Ön hallókészülékén a hangerő alapértelmezett szintre van beállítva. Lásd alább.
- Az Ön hallókészülékén a multifunkcionális gomb szolgál a hangerő szabályozására. Lásd alább.
- Az Ön hallókészülékén végállás nélküli hangerőszabályozó van. Kérjük, lapozzon a 15. oldalra.

Alapértelmezett hangerő

Az Ön hallókészülékének hangerejét audiológusa az Ön hallásának megfelelően állította be. Ha Ön általánosságban azt tapasztalja, hogy ez a beállítás túl hangos vagy túl halk Önnek, kérjük, keresse fel audiológusát.

Multifunkciós gomb

Az Ön hallókészülékén a multifunkcionális gomb segítségével lehet a hangerőt szabályozni. Nyomja meg, majd engedje el a gombot, míg a kívánt hangerőszintet el nem éri. Minden megnyomás/elengedés egy fokozattal változtatja a hangerőt.

Hangerő beállítások

Hangerőszint	Hangjelzés
5. szint (Maximális hangerő)	5 csipogás és hangjelzés
4. szint	4 csipogás
3. szint (Optimális hangerő)	3 csipogás
2. szint	2 csipogás
1. szint (Minimális hangerő)	1 csipogás és hangjelzés


Végállás nélküli hangerőszabályozás

Használja az ujjbegyét a hangerőszabályozó forgatásához.

1. A hangok felerősítéséhez tekerje a szabályozó gombot előre, az arca felé.
2. A hangok csendesebbre vételéhez a szabályozó gombot az ujjbegyével tekerje hátrafelé, a tarkója felé.



1. Hangerő növelése

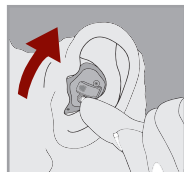

2. Hangerő csökkentése


Hangerőszint	Hangjelzés
(Maximális hangerő)	5 csipogás és hangjelzés
↕	
3-as szint (Optimális hangerő)	3 csipogás
↕	
(Minimális hangerő)	1 csipogás

Egyes hallókészülékek beállíthatók oly módon, hogy a felhasználó a jobb oldali készüléken növelje a hangerőt, a bal oldalin pedig csökkentse. Érdeklődjön audiológusánál, amennyiben egy ilyen beállítás hasznos lehet az Ön számára.

Multimemória

- Az Ön hallókészülékén a multifunkciós gomb multimemóriára van beállítva. Lásd alább.

Audiológusa legfeljebb négy programhelyet tud beállítani az Ön részére. Ezeket a további programhelyeket a multifunkciós gomb benyomásával érheti el.

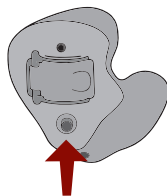

Amikor benyomja a multifunkciós gombot, hangjelzést vagy csipogást hall majd annak jelzéseként, hogy a hallókészülék a következő programhelyre váltott.

Kérdezze audiológusát az Ön hallókészülékén beállított programhelyekről.

Iránybeállítások

Az Ön hallókészüléke iránymikrofonokkal van ellátva. Az iránymikrofonok a jobb beszédértést segítik zajos környezetben.

Kérdezze meg audiológusát az Ön hallókészülékének iránybeállításairól.

Telefonhasználat

Az Ön hallókészüléke olyan eszközökkel van felszerelve, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön eredményesen kommunikálhasson telefonon. Kérdezze audiológusát az Ön hallókészülékén beállított telefonszolgáltatásról.

Az Ön hallókészüléke telefonbeállításai a következők:

- Automatikus alkalmazkodás telefonhoz (ATR). Lásd lent.
- Automatikus telefontekercs. Lásd lent.
- Telefontekercs és manuális beállítás.
Lásd a 18. oldalt. (____ memóriahely).

Automatikus alkalmazkodás telefonhoz (ATR) és Automatikus telefontekercs


Ezek a beállítások automatikusan aktiválják a telefonhoz való alkalmazkodást, amikor Ön hallókészülék-kompatibilis telefont használ. Egyszerűen helyezze a telefonkagylót a füléhez, ahogyan általában teszi. Ekkor a hallókészülék a telefonállásra áll át. A legjobb vétel megtalálása érdekében szükséges lehet, hogy kissé megmozdítsa a telefonkagylót. Amint a telefont elveszi a fülétől, a hallókészülék visszavált az alap hangkörnyezetre.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben úgy tűnik, hogy a hallókészülék nem vált át automatikusan a telefonbeállításra, kérjük, konzultáljon audiológusával.

Telefontekerics és manuális átállítás



A manuális telefontekerccsel ellátott hallókészüléket Ön akkor kapcsolhatja át telefon módra, amikor szükségesnek érzi.

A kézi kapcsolású telefontekerccset oly módon kapcsolhatja be, hogy a multifunkciós gomb segítségével a telefontekerics állást választja.

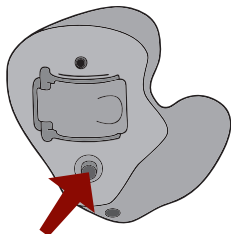

A telefonhasználat általánosságban

A hallókészülékek úgy működnek a legjobban, ha a telefonkagylót közel tartja a füléhez, ám a kagyló nem fedi el teljesen a fülét. Abban az esetben, ha sípolás (visszacsatolás) hallatszik, döntse meg a telefonkagylót olyan szögben, ahol a sípolás abbamarad. Az audiológusa ehhez útmutatást tud adni Önnek, valamint el tudja magyarázni az igényeinek megfelelő technikákat.

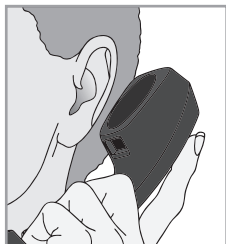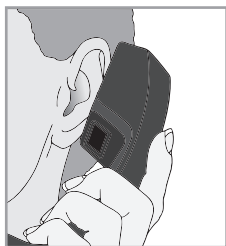

KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉGI NYILATKOZAT

Néhányan a hallókészüléket használók közül jelezték, hogy bűgő hangot hallanak a hallókészülékükben, amikor mobiltelefont használnak. Ez arra utalhat, hogy a mobiltelefon és a hallókészülék nem kompatibilis. Az amerikai ANSI C63.19 szabvány szerint egy adott hallókészülék és egy adott mobiltelefon összeférhetősége előre jelezhető, ha összeadjuk a hallókészülék immunitási értékét és a mobiltelefon kisugárzási értékét. Például egy kettes besorolású (M2) hallókészülék és egy hármas besorolású (M3) telefon együttes használata 5-ös besorolást kap. Bármely 5-ös összesített besorolás „normál üzemmód”-ot tesz lehetővé. A 6-os vagy magasabb összesített érték pedig „kiváló teljesítmény”-t jelez.

Ennek a hallókészüléknek az immunitási besorolása legalább M2/T2. A készülék teljesítménymérései, a kategóriák és a rendszerosztályozások az elérhető legfrissebb adatokon alapulnak. Ugyanakkor nem garantálhatjuk, hogy valamennyi készüléknél tökéletes lesz a telefonnal való együttműködés.

MEGJEGYZÉS: Az egyes hallókészülékek és mobiltelefonok együttműködése esetenként változhat. Éppen ezért javasoljuk, hogy vásárlás előtt próbálja ki a hallókészüléket a mobiltelefonjával. Illetve, ha új mobiltelefont vásárol, mindenképp próbálja ki előtte, hogyan működik az a hallókészülékével.

Vezeték nélküli tartozékok*

Számos vezeték nélküli tartozék létezik, amelyek segítségével Ön szabályozhatja, és maximálisan ki tudja használni a hallókészülékében rejlő lehetőségeket. Ilyenek a távirányítók valamint az egyes szórakoztató eszközökhöz vezeték nélküli kapcsolatot biztosító tartozékok. Konzultáljon audiológusával, hogy mely tartozékok a legmegfelelőbbek az Ön számára.

**A vezeték nélküli tartozékok csak azokkal a hallókészülékekkel kompatibilisek, amelyek rendelkeznek vezeték nélküli technológiával.*

A készülék karbantartása

Figyeljen arra, hogy a hallókészüléke mindig tiszta legyen. A hallókészülékkel érintkező hőhatás, nedvesség és idegen anyagok csökkenthetik a készülék teljesítményét.

- Minden nap tisztítsa meg készülékét egy puha rongy felett, így megelőzheti a kemény felszínre esésből származó sérüléseket.
- Használjon tisztítókefét a mikrofon, a hangszóró és az elemtartó szennyezőanyagoktól való megtisztításához.
- Soha ne használjon vizet, oldószert, tisztítófolyadékot vagy olajat a hallókészülék tisztításához.

Audiológusa további információkkal tud szolgálni az egyéb karbantartási kérdéseket illetően.


Hasznos tanácsok

- Amikor nem viseli a hallókészüléket, tartsa nyitva az elemajtót, hogy elpárologhasson belőle a nedvesség.
- Amikor nem használja a hallókészüléket, vegye ki az elemeket, helyezze a hallókészüléket a tárolódobozba és tárolja:
 - biztonságos, száraz helyen;
 - közvetlen napsugárzástól vagy hőhatástól távol, hogy elkerülje a szélsőséges hőmérsékletet;
 - olyan helyen, ahol könnyen megtalálja;
 - olyan helyen, ahol háziállatok és gyermekek nem érhetik el.
- Ne szedje szét a hallókészüléket, és ne dugja a tisztítóeszközöket a hallókészülék belsejébe.

Hear Clear™ cerumenszűrő

A Hear Clear exkluzív cerumenvédelmi rendszer eldobható cerumenszűrőket használ. Ezek az innovatív cerumenszűrők meggátolják a cerumen felhalmozódását a hallókészülék hangszórójában.

Cerumenszűrő

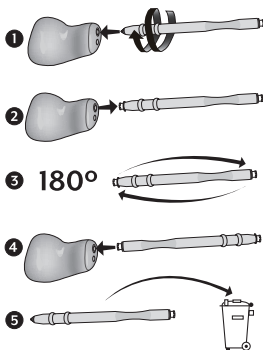


Egyedi mikrofonfedők


Az egyedi mikrofonfedő megvédi a mikrofont a ceruméntól és a szennyeződéstől. Audiológusa elmagyarázza majd Önnek, hogyan kell karbantartani a mikrofonfedőt.

A mikrofonfedők két méretben érhetőek el: kicsiben és nagyban. A mikrofonfedő mérete határozza meg az eltávolítás és kicserélés módját.


Kisméretű mikrofonfedő

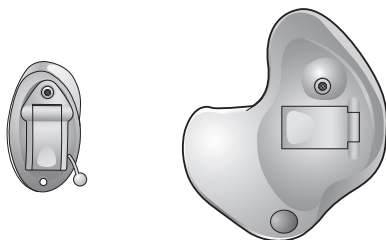


Egyedi mikrofonfedő – Kicsi

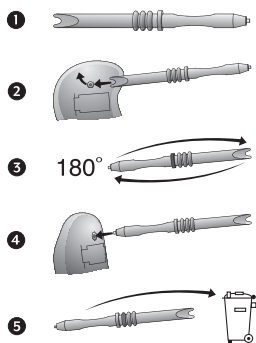

Nagyméretű mikrofonfedő

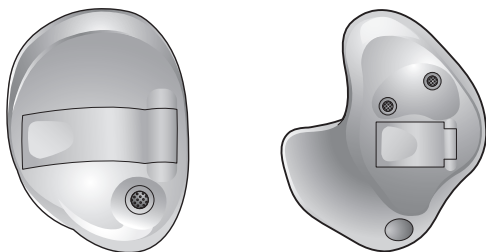

Egyedi mikrofonfedő – Nagy

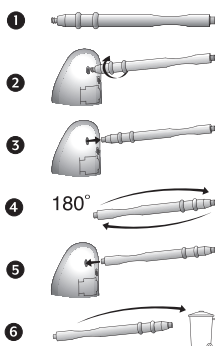

Szerviz és javítás

Ha a hallókészüléke bármely okból nem működik megfelelően, ne próbálja házilag megjavítani. Nagy valószínűséggel nemcsak a jótállás szabályait sérti meg, hanem további károsodást is okoz a hallókészülékben.

Amennyiben hallókészüléke elromlik vagy nem megfelelően működik, tekintse át a lenti útmutatót, amelyben lehetséges megoldásokat talál. Ha a hiba nem szűnik meg, konzultáljon audiológusával.

Hibaelhárítási útmutató

TÜNET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
Nem elég hangos a hallókészülék.	Lemerült az elem.	Cserélje ki az elemet.
	Fülsír vagy szennyeződés van a mikrofonban vagy a hangszóróban.	Tisztítsa meg a mikrofont és a hangszórót a tisztítókefével. Cserélje ki a fülsír elleni védelmi rendszert.
	Megváltozott az Ön hallása.	Vegye fel a kapcsolatot audiológusával.
Kihagy a hallókészülék.	Lemerült az elem.	Cserélje ki az elemet.
Nem tiszta, torz hangot ad a hallókészülék.	Lemerült az elem.	Cserélje ki az elemet.
	Elromlott a hallókészülék.	Vegye fel a kapcsolatot audiológusával.
Nem működik a hallókészülék.	Lemerült az elem.	Cserélje ki az elemet.
	Fülsír vagy szennyeződés van a mikrofonban vagy a hangszóróban.	Tisztítsa meg a mikrofont és a hangszórót a tisztítókefével. Cserélje ki a fülsír elleni védelmi rendszert.

Az audiológusa javasol majd egy, az Ön számára megfelelő menetrendet, hogy hozzászokhasson a hallókészülékéhez. Gyakorlatra, időre és türelemre lesz szüksége ahhoz, hogy az agya alkalmazkodjon az új hangokhoz, amelyeket a hallókészüléke segítségével hall. A hallás csak az egyik módja annak, ahogyan gondolatokat, ötleteket és érzéseket osztunk meg egymással. A szájról olvasás, az arckifejezések és a gesztusok segítik a tanulási folyamatot, és hozzátesznek ahhoz, amit a hangerősítés önmagában nem adna át.

Kérjük, tekintse át a következő egyszerű kommunikációs tanácsokat:

Tanácsok Önnek

- Helyezkedjen a beszélőhöz közelebb, és nézzen rá.
- Üljenek egymással szemben egy csendes szobában.
- Próbáljon ki különböző helyszíneket, hogy megtalálja a hallás szempontjából legideálisabb helyet.
- A figyelemelterelő tényezőket csökkentsék a minimumra.
- A háttérzajok először bosszantóak lehetnek, de ne felejtse el, hogy nem hallotta őket egy ideje.
- Mondja el beszélgetőpartnerének, hogy mire van szüksége. Ne feledje, hogy mások nem „látják” az Ön hallásvesztését.

- Legyenek reális elvárásai azzal kapcsolatban, hogy a hallókészüléke mit tud és mit nem.
- A hallókészülékkel való jobb hallás egy tanult készség, amely a vágy, a gyakorlás és a türelem együttesére épül.

Tanácsok családjá és barátai számára

Az Ön hallásvesztése a családjára és a barátaira is hatással van. Kérje meg őket, hogy

- csak akkor kezdjenek el beszélni Önhöz, amikor Ön teljes mértékben rájuk figyel.
- nézzenek Önre, vagy üljenek egymással szemben egy csendes szobában.
- beszéljenek tisztán, a megszokott sebességgel illetve hangszínen. A kiabálás valójában nehezíti a megértést.
- fogalmazzák át mondandójukat, ne pedig megismélteljék ugyanazokat a szavakat. Előfordulhat, hogy más szavak könnyebben érthetőek az Ön számára.
- a figyelemelterelő tényezőket csökkentsék a minimumra.

Rendeltetésszerű használat

Az egyéni hallókészülék egy hordható hangerősítő eszköz, amelyet arra terveztek, hogy javítsa a halláscsökkenést. A hallókészülékek többféle erősítéssel is elérhetők, hogy kezelni tudják a középestől a nagyfokúig terjedő hallásvesztést.

Hallókészülékét úgy tervezték, hogy eleget tegyen a legszigorúbb Nemzetközi Elektromágneses Kompatibilitási szabványoknak. Ugyanakkor még így is előfordulhat, hogy Ön interferenciát tapasztal, amelyet okozhat elektromos vezeték környezetében lévő nagyfeszültség, repülőtéri fémdetektor, vagy egyéb gyógyászati segédeszközből, rádiójelekből vagy elektrosztatikus kisülésből származó elektromágneses mezők.

Amennyiben más gyógyászati segédeszközt használ vagy beültethető gyógyászati segédeszköze van (mint például defibrillátor vagy szívritmus-szabályozó) és kíváncsi rá, hogy a hallókészüléke interferenciát okozhat-e a gyógyászati segédeszközével, kérjük, konzultáljon orvosával vagy a segédeszköz gyártójával a zavarás kockázatáról.

Ne viselje hallókészülékét MRI vizsgálat alatt vagy túlnyomásos kamrában. Az Ön hallókészüléke nem rendelkezik hivatalos tanúsítvánnyal arra vonatkozóan, hogy használható-e robbantásos környezetben, mint szénbánya vagy egyes vegyiparok.

Az IEC 60601-1 (amerikai) gyógyászati segédeszköz szabvány szerint az Ön hallókészüléke a B típusba tartozik.

Tárolja hallókészülékét a -40°C és $+60^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleti tartományban valamint a 10% és 95% közötti relatív páratartalom tartományban.

Hallókészülékét úgy tervezték, hogy működjön az Ön számára kényelmes hőmérsékleti tartományon kívül is: nagyon hidegtől 50°C -ig (122°F -ig).

Használat repülőgépeken*

Hallókészülékének vezeték nélküli képességeit ne használja repülőgépen, hacsak erre a repülőgép személyzete kifejezetten engedélyt nem adott. Audiológusa be tud állítani egy különleges programot az Ön hallókészülékén, amely lehetővé teszi, hogy a készüléke a vezeték nélküli szolgáltatások nélkül működjön.

Nemzetközi használat*


Hallókészüléke egy adott jóváhagyott rádiófrekvencián működik, amely az Ön országára vagy régiójára vonatkozik, és lehet, hogy nincs jóváhagyva az Ön országán vagy régióján kívül. Vegye figyelembe, hogy nemzetközi utazás során a hallókészülék működése interferenciát okozhat más elektronikus készülékeknél, vagy más elektronikus készülékek okozhatnak interferenciát az Ön hallókészülékénél.

*Kizárólag a vezeték nélküli hallókészülékekre vonatkozik.

Környezetvédelem

A termék tartalmaz egy nyomtatott elektromos áramkört, és így eleget kell tennie a Használt Elektromos és Elektronikai Berendezésekre (WEEE) vonatkozó 2002/96/EC rendeletnek. A rendelet megalkotásával biztosított az elektronikai készülékekben tartalmazott anyagok helyes összegyűjtése, újrahasznosítása, újrafelhasználása, visszanyerése vagy eltávolítása. Helyes eltávolítás nélkül egyes anyagok, melyeket elektronikai berendezések tartalmaznak, hosszú távon szennyeződést okozhatnak a környezetben, és végső soron károsíthatják az emberi egészséget is.

Amikor a készüléket már nem használják, fontos annak helyes megsemmisítése, mert a nem helyes megsemmisítés esetleges büntetést is maga után vonhat.

Az áthúzott szemetes szimbólum  egy vizuális emlékeztető, hogy a megsemmisítésre váró készüléket nem szabad a háztartási szemetesbe dobni, hanem egy gyűjtőrendszeren keresztül kell kidobni.

A gyűjtőrendszerrel információkat a helyi önkormányzati szervezettől kérhet.

Továbbá lehetséges a már nem használt berendezések visszajuttatása a szaküzletbe, ahonnan eredetileg származnak, különösen akkor, ha csereterméket vásárol.

A Starkey Laboratórium Kft. tevékenyen hozzájárul a gyűjtési és a megsemmisítés eljárásához oly módon, hogy megadja a szükséges információt, valamint a részletes anyagtartalmat, és a szétszerelés módját. A feleslegessé vált hallókészüléket elviheti a Starkey Laboratórium Kft. szaküzleteibe, ahol a cég saját költségén hatékonyan megsemmisíti azokat.

SZABÁLYOZÁSI KÖZLEMÉNYEK

FCC ID: EOA-IRIS-HA

IC: 6903A-IRISHA

FCC KÖZLEMÉNY

Ez a készülék teljesíti az FCC szabályok 15. részét és az RSS-210-et. A működtetésnek két feltétele van: (1) Ez a készülék nem okozhat ártalmas interferenciát, és (2) ez a készülék elfogad bármely kapott interferenciát, beleértve azokat az interferenciákat is, amelyek a készülék nemkívánatos működését okozzák.

Megjegyzés: A gyártó nem felelős az olyan rádió vagy televízió interferenciáért, amelyet ennek a készüléknek a nem engedélyezett módosítása okoz. Az ilyen módosítások érvényteleníthetik a használati jogosultságát, hogy működtesse a készüléket.

A Starkey® Hearing Technologies ezennel kijelenti, hogy a vezeték nélküli egyéni hallókészülék-család teljesíti az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményeit és egyéb lényeges rendelkezéseit. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya az alábbi címen keresztül szerezhető be.

Starkey Hearing Technologies

6600 Washington Ave. South

Eden Prairie, MN USA



Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park

Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX

United Kingdom

CE

0086

0 6 7 3



A hallássegítő megoldások globális piacán ágazatvezető vállalat, székhelye az Egyesült Államokban, Minnesota államban, Eden Prairie városában van.

Starkey
6700 Washington Avenue South
Eden Prairie, MN 55344-3476
800.328.8602
www.starkey.com

Európai képviselő:
Starkey European Headquarters
Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX
United Kingdom

Magyarországi képviselet:

Starkey Laboratórium Kft.
1119 Budapest, Fehérvári út 79.
+36 1 462 6050

www.starkey.hu

© 2014 Starkey Hearing Technologies. Minden jog fenntartva.
81015-007 2014/09 BKLT2605-03-EE-XX HUN Rev. B

