


QUICKTIP

Konfiguracja aplikacji Thrive Hearing Control Android

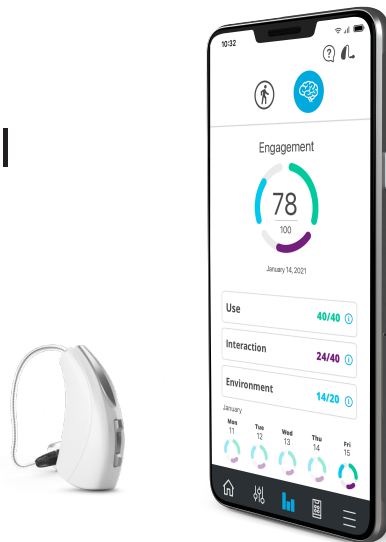

Pobranie Aplikacji Thrive Hearing Control


Do pobrania aplikacji potrzebujesz Sklepu Google Play na swoim urządzeniu. Zalecane jest zalogowanie do aplikacji przy użyciu konta Google, Facebook lub stworzenie konta.

- 1 Po skonfigurowaniu konta Sklepu Google Play, otwórz Sklep Play.
- 2 Wyszukaj aplikacji Thrive Hearing Control.
- 3 Wybierz **Zainstaluj**.



Konfiguracja wstępna aplikacji Thrive Hearing Control

Po otwarciu aplikacji Thrive po raz pierwszy, pojawiające się ekrany dostarczają użytkownikowi informacji o funkcjonalności aplikacji. Dotknij **Rozpocznij**, aby rozpocząć proces konfiguracji aplikacji.

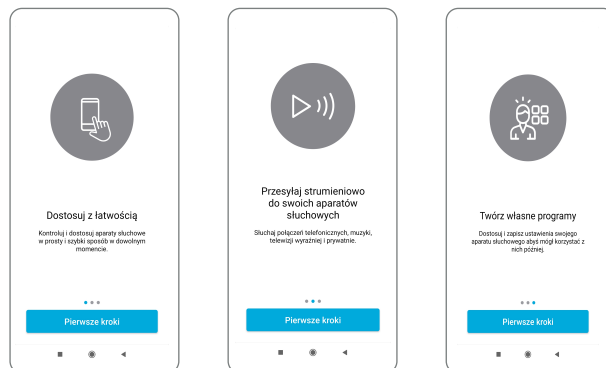


Umowa użytkownika Thrive **A**

Przeczytaj, a następnie zaznacz pole, aby potwierdzić zapoznanie się z umową użytkownika Thrive. **B** Dotknij **Zgoda**, aby kontynuować.

Logowanie do Chmury

Zaloguj się używając konta Facebook, Google lub utwórz konto przy pomocy adresu e-mail i hasła. Łączność z Chmurą umożliwia przechowywanie i archiwizowanie informacji dla TeleHear, powiadamiania o upadkach oraz z aplikacji/aparatu słuchowego. Jeśli wybierzesz **Pomiń Chmurę** możesz zalogować się później, przechodząc do aplikacji **Thrive Ustawienia > TeleHear > Zaloguj się**.

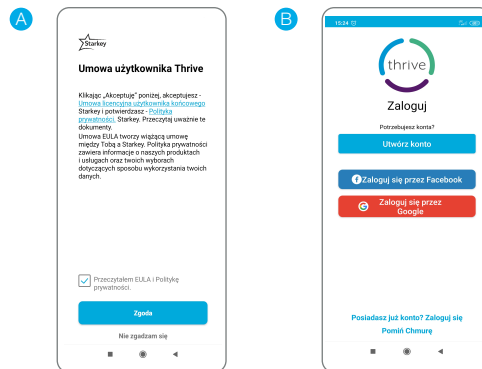


Hear better. Live better.

Konfiguracja wstępna aplikacji Thrive Hearing Control (ciąg dalszy)

Połączenie z aparatami słuchowymi C

Aplikacja Thrive wyszuka i sparuje aparaty słuchowe. Zostanie wyświetlony komunikat informujący użytkownika, że wymagane jest zezwolenie na lokalizację. Następnie wybierz **Zezwalaj**.

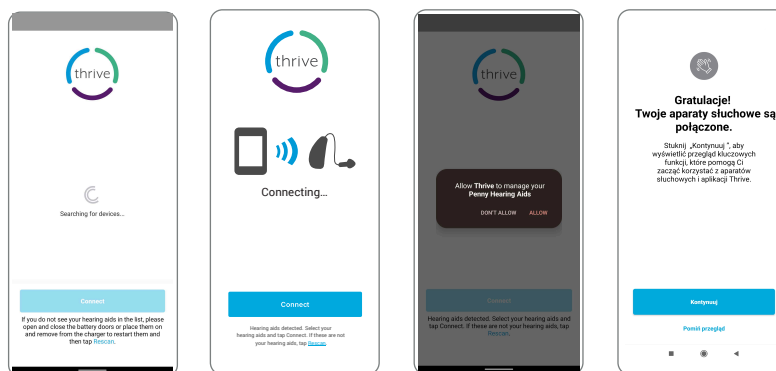

Przegląd funkcji aplikacji Thrive

Przegląd funkcji aplikacji Thrive przedstawia krótkie informacje i praktyczne zastosowanie powszechnie używanych regulacji użytkownika i funkcji jakie posiada aplikacja. Użytkownicy mogą pominąć ekrany informacyjne lub konfiguracyjne, wybierając opcję **Pomiń**.

D Dostosuj głośność: Użytkownicy mogą eksperymentować z regulacją głośności aparatu słuchowego. Dotknij **Kontynuuj**, aby kontynuować.

E Programy: Użytkownicy mogą eksperymentować ze zmianą programów. Dotknij **Kontynuuj**, aby kontynuować.


F Śledź zaangażowanie i aktywność: Dotknij **Kontynuuj**, aby kontynuować.

G Znajdź Mój Aparat: Dotknij **Kontynuuj**, aby kontynuować.

H Powiadomienia i przypomnienia: Dotknij **Kontynuuj**, aby kontynuować.

I Asystent Thrive: Aby korzystać z Asystenta Thrive użytkownicy muszą zezwolić aplikacji Thrive na dostęp do mikrofonu smartfona. Po wyświetleniu komunikatu dotyczącego zezwolenia aplikacji na nagrywanie dźwięku, wybierz **Zezwól**.

J **Wszystko gotowe** Dotknij **Kontynuuj**, aby kontynuować.

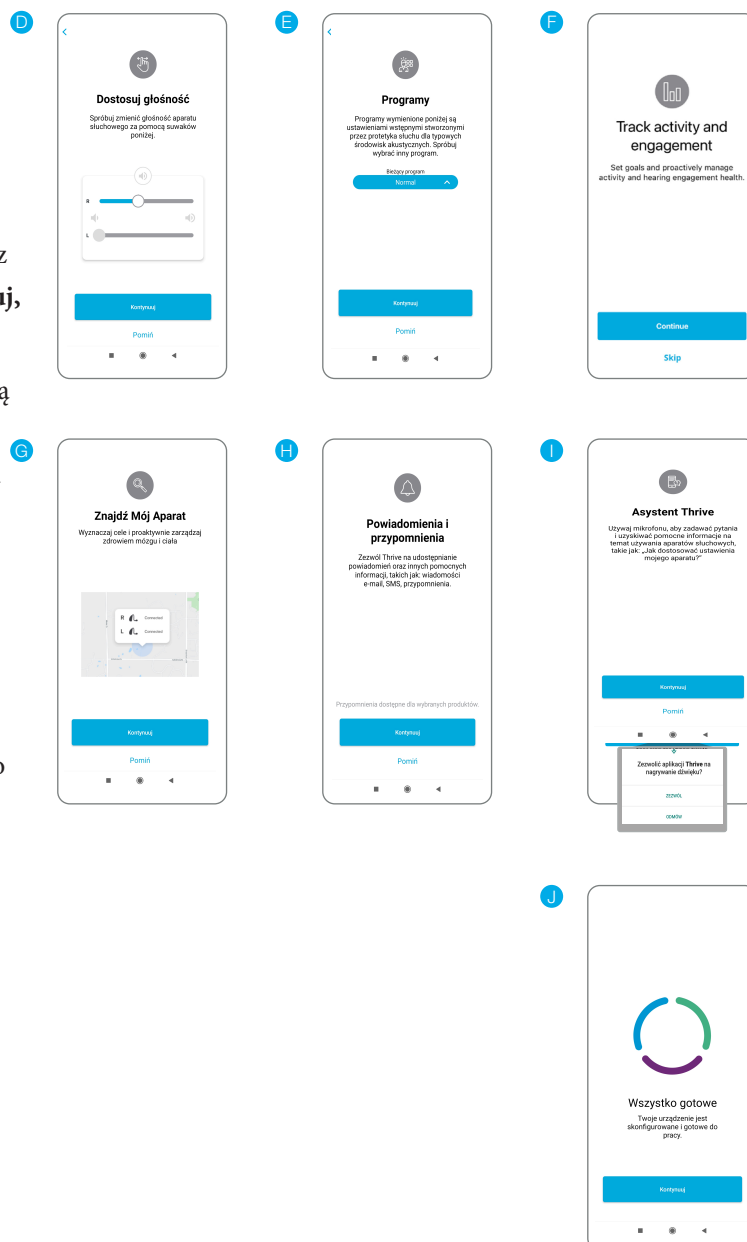


Ustawienia urządzenia


Zaawansowane ustawienia aparatów słuchowych mogą być włączone/wyłączone w tym menu.

O moich urządzeniach: Wyświetla model, poziom technologiczny i numery seryjne aparatów słuchowych, a także aktualną wersję oprogramowania.

Powiadomienia: Włączenie powiadomień umożliwia odtworzenie sygnału w aparatach słuchowych podczas odbierania rozmów telefonicznych. Dotknij niebieski prostokąt, aby odegrać alert.

Wybierz Gest: Włącz lub wyłącz możliwość regulacji przez dotknięcie.



Funkcja Podwójne dotknięcie pozwala na uruchomienie działania Akcesoriów/zatrzymanie strumieniowania, Trybu Edge i Asystenta Thrive. Ustaw preferowaną funkcjonalność Podwójnego Dotknięcia dla prawego i lewego aparatu słuchowego przez dotknięcie ikony  ołówka. Wybierz czułość dotknięcia między **Mniej**, **Domyślne** lub **Więcej**. Dostępne tylko dla aparatów słuchowych AI.

Samochód: Włącz opcję Samochód dla automatycznego włączenia się dedykowanego programu podczas podróży samochodem. Dotknij **Ok**, aby umożliwić dostęp do czujnika ruchu telefonu w celu zapewnienia automatycznych zmian programu, gdy pojazd osiąga prędkość 16 km na godzinę lub większą. Określ, którego programu używa tryb Automatyczny samochód, klikając  i wybierając preferowany program.

Logowanie danych: Włącz lub wyłącz opcję logowania danych. Wyłączenie logowania danych eliminuje możliwość generowania wyniku zaangażowania.







Strumieniowanie Automatem: Włącz lub wyłącz opcję automatycznego strumieniowania.

Automatyczne przesyłanie strumieniowe jest domyślnie włączone po zaprogramowaniu aparatów w Inspire X. Automatyczne przesyłanie strumieniowe będzie domyślnie korzystać ze Stream Boost (przełączy się na program dedykowany połączeniom telefonicznym i strumieniowaniu). Jeśli automatyczne przesyłanie strumieniowe jest wyłączone, program nie zmieni się sam podczas przesyłania strumieniowego.

- **Telefon:** Wybierz program, z którego będzie korzystać tryb automatycznego strumieniowania rozmów telefonicznych, dotykając ikonę  i wybierając preferowany program. Wybierz również sposób działania mikrofonów aparatów słuchowych podczas przesyłania strumieniowego połączeń telefonicznych. Wybierz opcję: Brak zmian, Zmniejsz (50%) lub Wycisz, aby wskazać preferencje ustawień mikrofonu.
- **Media:** Wybierz program, z którego będzie korzystać tryb automatycznego strumieniowania mediów, dotykając ikonę  i wybierając preferowany program. Wybierz również sposób działania mikrofonów aparatów słuchowych podczas strumieniowania mediów. Wybierz opcję: Brak zmian, Zmniejsz (50%) lub Wycisz, aby wskazać preferencje ustawień mikrofonu.

Automatyczne włączanie/wyłączanie: dotknij suwaka, aby dezaktywować/aktywować automatyczne włączanie/wyłączanie. Automatyczne włączanie/wyłączanie pozwala aparatom słuchowym na automatyczne przejście w tryb niskiego poboru mocy, gdy te nie są używane. Dostępne tylko dla aparatów słuchowych AI.

Speech Assistant Mic: Dotknij **Mikrofon** aparatu słuchowego lub **Mikrofon telefonu**, aby wybrać preferencje użycia mikrofonu dla Asystenta Thrive. Mikrofon aparatu słuchowego jest ustawiony domyślnie.

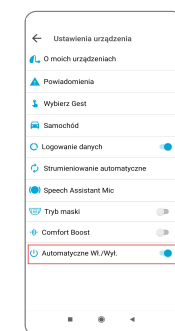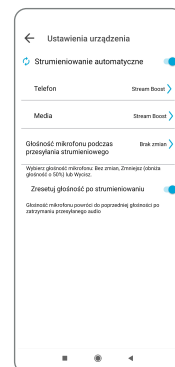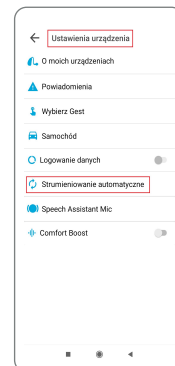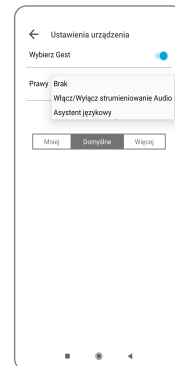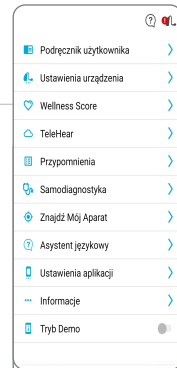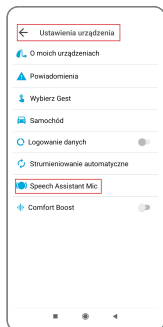


Hear better. Live better.

Konfiguracja Wellness Score

Ustaw informacje dotyczące śledzenia aktywności, aby zapewnić najdokładniejsze obliczenia Wellness Score:

- **Śledzenie Aktywności:** Dostosuj cele wyników aktywności, w tym kroki, ćwiczenie i stanie. Informacje można modyfikować w dowolnym momencie, przechodząc do opcji **Ustawienia > Wellness Score > Śledzenie aktywności**

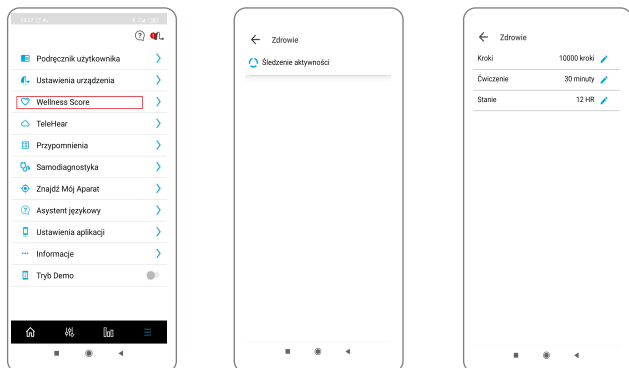

UWAGA: Bezpośrednie przesyłanie strumieniowa jest dostępne tylko z wybranymi urządzeniami z systemem Android. W przypadku wszystkich innych modeli smartfonów z systemem Android prowadzenie rozmów telefonicznych bez użycia rąk i słyszenie obustronne zapewni połączenie aparatów słuchowych ze Zdalnym Mikrofonem +. Ponadto, dźwięki, takie jak muzyka, filmy, wskazówki GPS i inne, mogą być również przesyłane strumieniowo bezpośrednio do aparatów słuchowych z platformy Thrive dzięki użyciu zdalnego mikrofonu.



Hear better. Live better.

The app may look slightly different depending on your phone and/or hearing aid model.

The Starkey logo, Thrive, Thrive logo, Inspire and TeleHear are trademarks of Starkey Laboratories, Inc. | Android, Google and Google Play are trademarks of Google LLC.

©2021 Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved. 8/22 FLYR3480-03-PL-SC