


# Benutzersteller

Starten Sie Inspire X und verbinden Sie die Thrive Plattform 2,4 GHz Hörsysteme.

Bei der Erstanpassung erscheint das Dialogfeld für die Tastenoptionkonfiguration. Wählen Sie **Demo zeigen** aus, um Demos der verschiedenen Tastenoptionkonfigurationen anzuzeigen, oder **Nicht mehr zeigen** und **Schließen**. Wählen Sie **Tastenoption** in der linken Navigationsleiste aus, um Tastenoption bei der nachfolgenden Programmierung anzupassen.

## Konfiguration der Tastenoption

Ziehen Sie die gewünschten Tastenoption von der linken Seite auf die entsprechenden Steuerbefehle auf der rechten Seite.

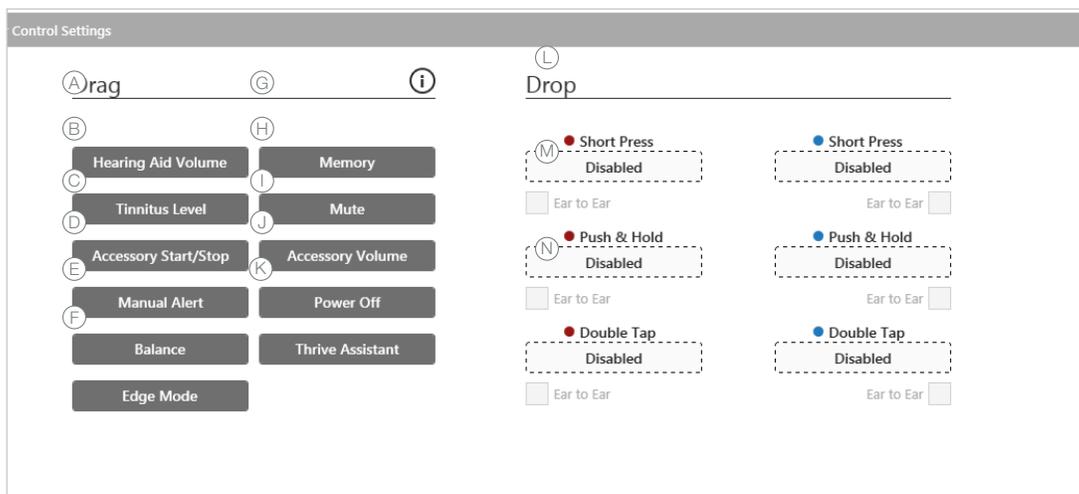

Mögliche Tastenoption sind:

- (A) Lautstärke Hörsystem
- (E) Balance (nur CROS)
- (I) Lautstärke Zubehör
- (B) Tinnituspegel
- (F) Edge Modus (nur Edge AI)
- (J) Ausschalten
- (C) Zubehör Start/Stop
- (G) Hörprogramm
- (K) Thrive Assistant (nur Edge AI)
- (D) Manuelle Sturzalarm
- (H) Stummschalten

Mögliche Steuerbefehle sind:


- (L) **Kurz drücken:** Hörprogramm, Hörerätelautstärke, Tinnituspegel, Zubehörlautstärke, Edge Modus
- (M) **Drücken und Halten:** Hörerätelautstärke, Hörprogramm, Tinnituspegel, Stummschaltung, Zubehör Start/Stop, Zubehörlautstärke, Ausschalten, Manuelle Sturzmeldung, Balance
- (N) **Doppeltippen:** Zubehör Start/Stop, Thrive Assistant, Edge Modus

## VC Stelltiefe und Schrittweiten

Wählen Sie „Potibereich und Schrittweite“ aus, wenn die Lautstärkeregelung aktiviert ist.

- 1 Wählen Sie „Pins“ aus, um den Potibereich anzupassen.
- 2 Wählen Sie für die „Schrittweite“ 2 dB oder 4 dB aus.

**HINWEIS:** Die Inspire X Software verwehrt die Anpassung von Potibereich und Schrittweite, wenn die Lautstärke-regelung in den Tastenoption-einstellungen deaktiviert ist.

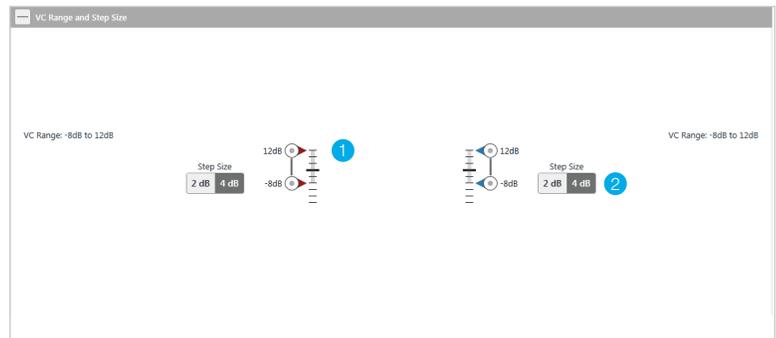


## Tinnitus Ausgangsbereich und Schrittweite

Wählen Sie „Ausgangsbereich und Schrittweite für Tinnitus“ aus, wenn der Tinnitus-Stimulus aktiviert ist. Für weitere Informationen siehe die QuickTIP zu Tinnitus.


- 1 Wählen Sie „Pins“ aus, um den Stimuluspegel anzupassen.
- 2 Wählen Sie für die „Schrittweite“ 2 dB oder 4 dB aus.

**HINWEIS:** Die Inspire X Software verwehrt die Anpassung von Ausgangsbereich und Schrittweite für Tinnitus, wenn die Tinnitus-Steuerung in den Tastenoptioneinstellungen deaktiviert ist.

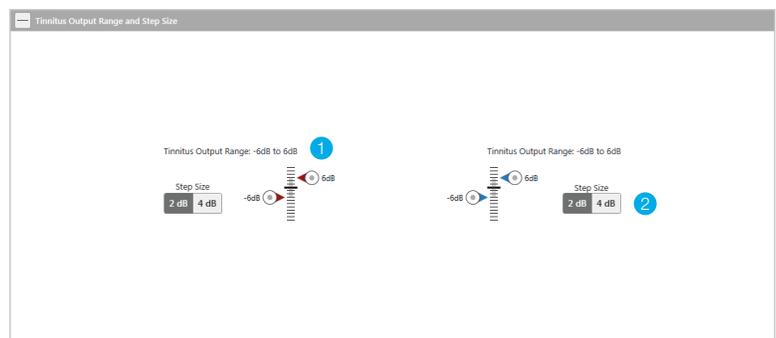

## Weitere Konfigurationsoptionen

„Pegel beim Hörprogrammwechsel zurücksetzen“ ist standardmäßig deaktiviert. Markieren Sie das Kontrollkästchen, damit Hörgeräteleastärke und Tinnituspegel auf die Standardwerte zurückgesetzt werden, wenn das Hörprogramm gewechselt wird.

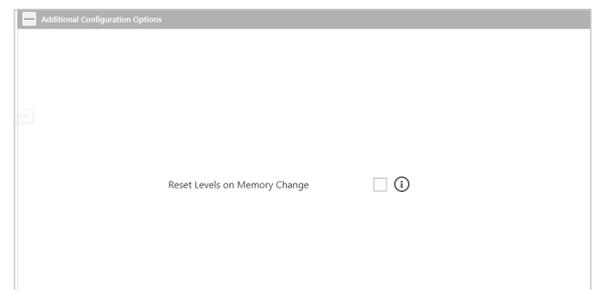

## Geräteanleitung

Wählen Sie **Drucken** in den Tastenoptioneinstellungen, um die Geräteanleitung auszudrucken. Das erstellt einen Bericht mit spezifischen Tastenoptioninformationen für die verbundenen Hörsysteme.

\* Nur mit Technologie der AI Spitzenklasse verfügbar. | \*\* Nur mit Technologie der Spitzenklasse verfügbar.

Das Starkey Logo, Inspire und Thrive sind Handelsmarken von Starkey Laboratories, Inc.

© 2022 Starkey. Alle Rechte vorbehalten. 07/22 FLYR3487-DE-03-SC JB

