

Chargeur Starkey® Hearing Technologies



Le Chargeur Starkey® Hearing Technologies sert de station de charge, de kit de déshumidification et de boîtier pour toutes les aides auditives Starkey au lithium-ion. Le chargeur est pourvu de voyants LED qui indiquent l'état de charge des aides auditives et de la batterie intégrée.

Voyants LED pour état de charge des aides auditives

Sur le devant du chargeur, deux voyants LED renseignent sur l'état de charge des aides auditives.

- 1 Lorsque les aides auditives sont insérées dans le chargeur, les voyants situés sur le devant clignotent en vert, indiquant que les appareils sont bien en cours de chargement.
- 2 Lorsque les aides auditives sont complètement chargées, ces mêmes voyants restent fixes au vert pour indiquer que le chargement est terminé.
- 3 Si un problème survient pendant le chargement et que les aides auditives sont mal positionnées, les voyants avant clignotent en rouge.

REMARQUE : si l'état de défaut est signalé, retirez les aides auditives du chargeur, attendez que les voyants s'éteignent puis réinsérez les aides auditives dans le chargeur. Si l'état de défaut persiste, contactez votre audioprothésiste.



Voyants LED pour batterie intégrée

Sur l'arrière du chargeur se trouvent quatre voyants LED qui renseignent sur l'état de charge de la batterie intégrée. La batterie intégrée permet de charger les aides auditives sans relier le chargeur au secteur.

- Quatre voyants verts fixes indiquent que le chargeur est relié à une source d'alimentation et qu'il est complètement chargé.

REMARQUE : *lors d'un chargement nomade, les voyants situés à l'arrière s'éteignent au bout de 10 secondes pour économiser la batterie du chargeur.*

- Quatre voyants fixes indiquent que la batterie est chargée à plus de 75 %.
- Trois voyants fixes indiquent que la batterie est chargée à moins de 75 %.
- Deux voyants fixes indiquent que la batterie est chargée à moins de 50 %.
- Un voyant clignotant indique que la charge est faible et qu'il convient de relier le chargeur à une source d'alimentation pour charger la batterie intégrée.

REMARQUE : *lorsque le chargeur est relié au secteur, les aides auditives et la batterie intégrée se chargent en même temps.*



Utilisation

- Si le chargeur n'est pas branché et qu'il se décharge complètement, les aides auditives s'allumeront dans le chargeur.
- Les aides auditives peuvent rester dans le chargeur dans la mesure où il n'y a aucun risque de surcharge.
- Le couvercle peut être ouvert ou fermé lors du chargement.

REMARQUE : *il est recommandé de laisser le couvercle du chargeur fermé pour protéger l'absorbeur d'humidité si le boîtier sert aussi de déshumidificateur.*