

# Guía de inicio rápido

Evolv AI



micro RIC 312, RIC 312, BTE 13 y Power Plus BTE 13

**En Starkey, comprendemos el impacto que implica la pérdida de audición.**

**Por eso, damos todos los pasos necesarios para lograr una audición sin esfuerzo.**

**Evolv AI** ofrece nuestra línea completa de audífonos más innovadores hasta la fecha. Fabricados a mano, con nuestra tecnología más innovadora y el sonido más nítido, estos audífonos se adaptan perfectamente a su estilo de vida.

**Obtenga el máximo partido a sus audífonos**

Visite [starkey.com/care](https://starkey.com/care) para obtener herramientas y recursos adicionales, que incluyen:

- Videos instructivos
- Manuales de operaciones
- Folletos de productos


# Pilas

Su audífono utiliza una pila como fuente de energía.


Para insertar o reemplazar la pila:

1. Use el dedo para abrir la pestaña del compartimento de la pila.
2. Abra con cuidado el compartimento de la pila y retire la pila gastada.
3. Retire la pestaña de color de la pila nueva. Espere de 3 a 5 minutos después de retirar la pestaña y antes de insertar la pila.
4. Insértela en el compartimento de la pila con el signo "+" hacia arriba.
5. Cierre el compartimento de la pila.


- **NUNCA FUERZA EL COMPARTIMENTO DE LA PILA CERRADO.** Esto podría provocar daños graves. Si el compartimento no se cierra bien, compruebe si ha insertado correctamente la pila.
- No abra del todo el compartimento de la pila, ya que podría dañarlo.
- Deseche las pilas gastadas inmediatamente en los contenedores apropiados para ello.

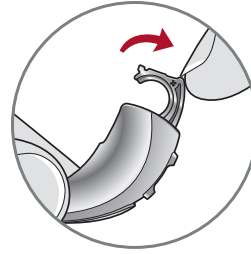


1

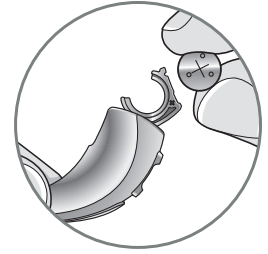


2

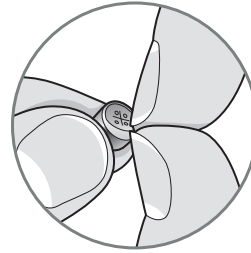

3

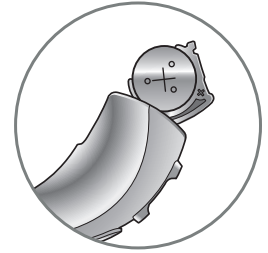

4

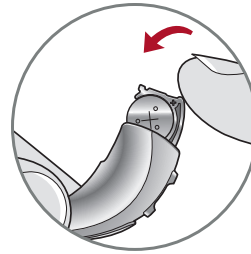

5

## Indicadores de pila

Un indicador sonará cuando el voltaje de pila esté bajo. Dispone de unos 30 minutos\* para reemplazar la pila. También puede sonar una alarma acústica justo antes de que la pila deje de funcionar.

## Encendido y apagado

### PARA ENCENDERLO:

Inserte la pila y cierre el compartimento completamente. El audífono tiene un retraso de encendido que dura unos segundos. Es posible que oiga un tono indicando que el audífono está encendido.

### PARA APAGARLO:

Abra el compartimento de la pila hasta que ésta ya no toque los contactos.

## Cuidados de los audífonos

Mantenga sus audífonos limpios. El calor, la humedad y las sustancias extrañas pueden provocar un rendimiento deficiente.

*\*El tiempo real entre el indicador de pila baja y el apagado total varía en función del nivel de ruido del entorno y de la marca de la pila.*

- Utilice un cepillo o un paño suave para limpiar la suciedad alrededor del control de usuario, del micrófono y del compartimento de la pila.
- Inspeccione el receptor, el auricular y el protector anticerumen con regularidad.
- No utilice nunca agua, disolventes, líquidos de limpieza ni aceite para limpiar su audífono.


## Consejos útiles

- Cuando no use el audífono, abra el compartimento de la pila para que se evapore la condensación.
- No desarme sus audífonos ni inserte herramientas de limpieza en su interior.
- Cuando no los utilice, coloque los audífonos en el recipiente de almacenamiento y guárdelos:
  - En un lugar seco y seguro
  - Lejos de la luz solar directa y del calor para evitar temperaturas extremas
  - Donde pueda encontrarlos fácilmente
  - Con seguridad fuera del alcance de niños y mascotas


## Protectores de cerumen Hear Clear

Los audífonos RIC integran una protección de cerumen desechable Hear Clear. Estos innovadores protectores de cerumen evitan la acumulación de cerumen en el receptor del audífono. Cuando necesite cambiar los protectores de cerumen, siga las instrucciones siguientes.

1. Inserte el extremo vacío de la barra de aplicación directamente en el protector de cerumen usado en el audífono.
2. Jale **hacia afuera** (sin girar) la barra para quitar el protector de cerumen usado.
3. Utilice el extremo opuesto de la varilla para insertar con firmeza el protector de cerumen limpio en el audífono.
4. Jale **hacia afuera** (sin girar) para quitar la barra y desecharla.

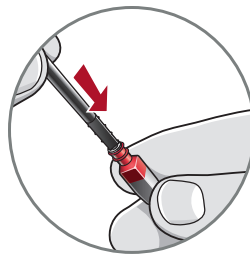


1

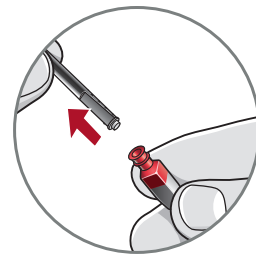

2



3

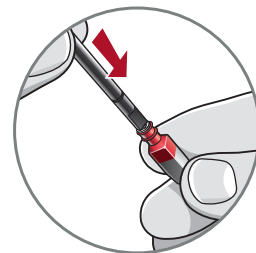

4

## Descargue y conéctese a la aplicación Control Auditivo Thrive



La aplicación Control Auditivo Thrive facilita el control y el ajuste de sus audífonos de 2,4 GHz con su dispositivo Apple o Android compatible. Descargar y conectarse a la aplicación es fácil; consulte la

### Guía del usuario de la aplicación Control Auditivo

**Thrive** o visite [starkey.com/thrivesupport](http://starkey.com/thrivesupport) para obtener información adicional, por ejemplo:

- Sensores integrados y funciones de inteligencia artificial
- Memorias automáticas y personalizadas
- Geoetiquetas
- Manejo del tinnitus
- Encontrar mis audífonos
- Alertas

Para obtener información sobre la compatibilidad con iOS/Android de la aplicación Control Auditivo Thrive, visite [starkey.com/thrivesupport](http://starkey.com/thrivesupport).

## Información sobre los audífonos

Modelo de los audífonos: \_\_\_\_\_

Número de serie: I \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_

Fecha de caducidad de la garantía: \_\_\_\_\_

Tamaño de la pila: \_\_\_\_\_

Configuración de la memoria, si procede: \_\_\_\_\_

N.º de memorias	Entorno/Situación de escucha	Pitido/Indicador
-----------------	------------------------------	------------------

---

---

---

---

---

---

---

Instrucciones especiales: \_\_\_\_\_

---

---

---

Profesional de la audición:

Su profesional de la audición le proporcionará las especificaciones del producto.

Para los profesionales de audición:  
Para conocer las especificaciones del producto, visite [StarkeyPro.com/Evolv-AI](https://StarkeyPro.com/Evolv-AI).

## Clasificaciones M/T

	M	T
micro RIC 312	4	N/A
RIC 312	4	N/A
BTE 13	4	3
Power Plus BTE 13	4	2

## Notas

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





Para obtener información sobre la compatibilidad con iOS/Android y la aplicación Control Auditivo Thrive, visite [starkey.com/thrivesupport](https://starkey.com/thrivesupport).

Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod Touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio registrada de Apple Inc.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Starkey, el logotipo de Starkey, Thrive, el logotipo de Thrive, Evolv y el logotipo de Evolv son marcas comerciales de Starkey Laboratories, Inc.



Starkey.com

