

Télécommande Starkey




Jumelage

La télécommande Starkey® doit être jumelée aux aides auditives 2,4 GHz afin de communiquer avec elles. Le jumelage ne doit être réalisé qu'une seule fois, les aides auditives et la télécommande se reconnaissant ensuite automatiquement. La télécommande peut être jumelée dans ou en dehors d'Inspire™ X. Les aides auditives 2,4 GHz ne peuvent être jumelées qu'à une seule télécommande.

Jumelage dans Inspire™ X



- 1 Lancez Inspire™ X puis connectez les aides auditives afin de les détecter.
- 2 Sélectionnez « Accessoires » dans la barre de navigation de gauche.
- 3 Veillez à ce que le bouton de verrouillage soit en position déverrouillée (à gauche).
- 4 Placez les aides auditives à moins de 30 cm de la télécommande.
- 5 Activez le mode jumelage de la télécommande en appuyant sur le bouton Accueil pendant 5 secondes. Les deux voyants clignotent rapidement.
- 6 Sélectionnez « Jumeler » pour mettre les aides auditives en mode jumelage (A).
- 7 Le jumelage est effectif lorsque l'image de la télécommande s'affiche sur l'écran Accessoires (B).
- 8 Ouvrez le menu déroulant sous l'image de la télécommande pour procéder à la « Configuration du bouton Favori » (C).
- 9 Cliquez sur l'icône Information pour obtenir plus de détails sur le processus de jumelage, le cas échéant (D).

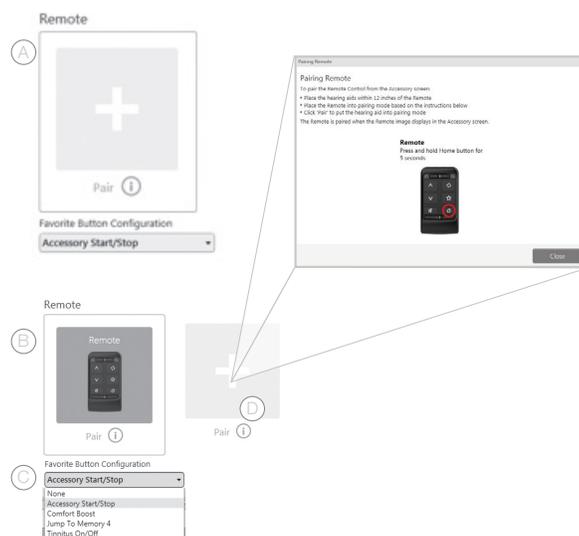

Jumelage (suite)

Jumelage en dehors d'Inspire™ X

- 1 Éteignez tout téléphone mobile ou tout autre accessoire déjà jumelé aux aides auditives.
- 2 Veillez à ce que le bouton de verrouillage soit en position déverrouillée (à gauche).
- 3 Éteignez puis rallumez les aides auditives pour passer en mode jumelage.
- 4 Placez les aides auditives à moins de 30 cm de la télécommande.
- 5 Maintenez le bouton Accueil enfoncé pendant 5 secondes. Les deux voyants clignotent rapidement.
- 6 Lorsque le voyant bleu de gauche et le voyant rouge de droite s'allument pendant plus de 2 secondes, le jumelage est effectif. La télécommande détectera si l'adaptation est monaurale ou binaurale et procédera au jumelage d'un ou deux appareils en conséquence.

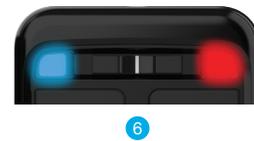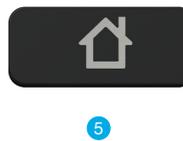

Utilisation

-  **Sélecteur d'oreille** : positionnez-le au centre pour des réglages binauraux. Glissez vers la droite ou la gauche pour régler chaque oreille.
-  **Volume** : une pression brève sur les flèches augmente/diminue le volume des aides auditives et une pression longue sur les flèches augmente/diminue le volume du streaming. Il y a modification du volume du streaming lorsqu'un accessoire de streaming 2,4 GHz Starkey est activé, ce qui est sans effet sur un streaming iOS.
-  **Muet** : appuyez sur ce bouton pour couper temporairement le son des aides auditives. Appuyez à nouveau pour réactiver le son.
-  **Programme** : permet de faire défiler les programmes paramétrés dans Inspire™ X.
-  **Accueil** : restaure le volume et le programme des aides auditives à la mise sous tension. Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode jumelage.
-  **Verrouiller/Déverrouiller** : la position déverrouillée permet de réaliser des ajustements à distance. La position verrouillée empêche toute modification accidentelle et permet d'économiser la batterie.
-  **Bouton Favori** : active la configuration associée au bouton Favori. Le bouton Favori est configuré dans Inspire™ X et les options disponibles peuvent inclure :
 - Aucun** : aucun effet sur les aides auditives.
 - Démarrer/arrêter le streaming audio** : démarrer ou arrêter le streaming audio d'un accessoire de streaming Starkey 2,4 GHz.
 - Comfort Boost** : appuyer sur ce bouton permet de réduire le bruit tout en optimisant la qualité sonore dans les environnements bruyants. Appuyer à nouveau désactive la fonction.
 - Passer au Programme 4** : bascule les aides auditives sur le programme quatre.
 - Stimulus Tinnitus On/Off** : démarrer ou arrêter le stimulus Tinnitus dans les aides auditives.

*Les accessoires sont uniquement jumelés aux aides auditives (pas à l'iPhone/applications). La fonction Double Tap n'est disponible que sur les aides auditives AI.

iOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis. et d'autres pays et est utilisé sous licence.

Le logo Starkey, Starkey Hearing Technologies, Thrive et Inspire sont des marques commerciales de Starkey Inc.

© 2020 Starkey. Tous droits réservés.. 03/20 FLYR3470-01-FF-ST