

## QUICKTIP

# Protocollo di Fitting Iniziale

Per la piattaforma di apparecchi acustici 2.4 GHz



## Come iniziare

- 1 Lanciare **Inspire™ X** e inserire le batterie negli apparecchi acustici.
- 2 Nella schermata **"Inizio"**, selezionare Visualizza Interfaccia di programmazione, quindi scegliere l'interfaccia wireless a 2,4 GHz e confermare cliccando **OK**.  
**NOTA:** La portata prevista per la programmazione wireless è di circa 9 m.
- 3 Selezionare la **casella** accanto agli apparecchi acustici da programmare.
- 4 Selezionare **Leggi Impostazioni Dispositivo** per iniziare un nuovo fitting o per eseguire una sessione di follow-up utilizzando le impostazioni attuali memorizzate negli apparecchi acustici del paziente, oppure **caricare una sessione precedente** per recuperare una sessione di lavoro salvata in precedenza salvata.
- 5 Cliccare su **Avvia**.

## Fitting Iniziale e Percorso Automatizzato

Quando si programmano degli apparecchi acustici nuovi la procedura di fitting Iniziale si avvia automaticamente.

- 1 Selezionare le **Opzioni acustiche** appropriate, quindi **OK**.
- 2 Scegliere la voce appropriata in base all'**Esperienza di Amplificazione** del paziente (si consiglia Esperienza con Starkey [Fig. 1])  
*Per ulteriori informazioni, consultare la QuickTip per il Livello di esperienza*
- 3 Inserire gli apparecchi acustici nelle orecchie del paziente, ridurre tutte le fonti di rumore esterne, quindi selezionare **Inizia** ed avviare il Percorso Automatizzato.

**NOTA:** Se la programmazione degli apparecchi acustici viene effettuata prima dell'appuntamento per il fitting, ripetere il test per la cancellazione del feedback facendo indossare gli apparecchi nelle orecchie del paziente.

- 4 Rivedere la schermata con i risultati del Percorso Automatizzato. Selezionare **Riavvia** se lo Stato risulta Incompleto e se ci sono dei passaggi non andati a buon fine oppure cliccare su **Chiudi** per proseguire.

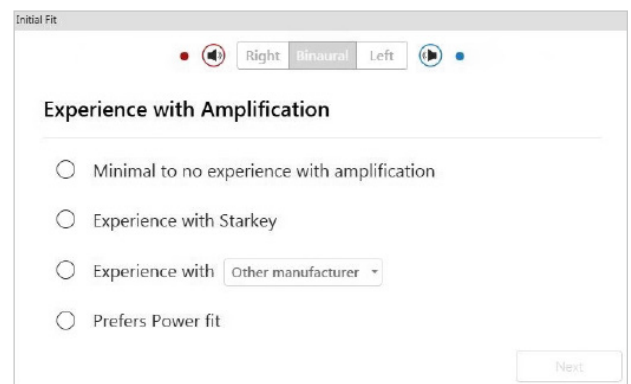


Figura 1

## Controlli utente

Durante il percorso automatizzato comparirà la schermata demo Configurazione Controllo Utente. Selezionare **Mostra demo** per effettuare la dimostrazione delle opzioni che consentono di configurare i controlli dell'utente oppure selezionare **Non mostrare più** e **Chiudi**.

- 1 Trascinare e rilasciare da sinistra verso destra i controlli che si desidera abilitare. Le opzioni per il controllo utente includono: Volume degli apparecchi acustici, Programmi, Volume Tinnitus, Mute, Start/Stop Accessorio, Volume Accessorio, Notifica Manuali e Thrive Assistant™. Le opzioni per le gestures includono: pressione breve, pressione prolungata e doppio tocco. [Fig. 2]

**NOTA:** Il doppio tocco è disponibile solo per i prodotti AI.

**NOTA:** Avviso manuale, Thrive Assistant e Modalità Edge sono disponibili solo per determinati prodotti della piattaforma Thrive 2,4 GHz.

- 2 Cliccare su **Range e intervalli volume**. Selezionare i **Pin** per regolare il range di azione del controllo volume. Scegliere la misura preferita per ciascun passaggio tra i valori 2 dB - 4 dB.

**NOTA:** Il software Inspire X non consente di regolare il range del volume e la grandezza dei passaggi se il controllo volume non è stato prima abilitato tramite Impostazioni Controllo Utente.

## QuickFit e Regolazione Fine

- 1 Selezionare **QuickFit** nella barra di navigazione sinistra per effettuare le regolazioni globali (**Occlusione, Gravi Hz, Guadagno, Acuti Hz, MPO**). [Fig. 3]
- 2 Selezionare con le frecce il menu a discesa **Programmi** per procedere alla programmazione degli stessi.
- 3 Selezionare **Regolazione Fine** nella barra di navigazione sinistra o dalla parte inferiore della schermata QuickFit.
- 4 Selezionare **Tabelle** o **Cursori** per scegliere il tipo di visualizzazione desiderato.
- 5 Selezionare + per espandere i gruppi di canali **Gravi, Medi, Acuti e Ultra**.
- 6 Selezionare i canali e i livelli di ingresso da regolare, quindi servirsi delle frecce **su e/o giù** per effettuare le regolazioni.

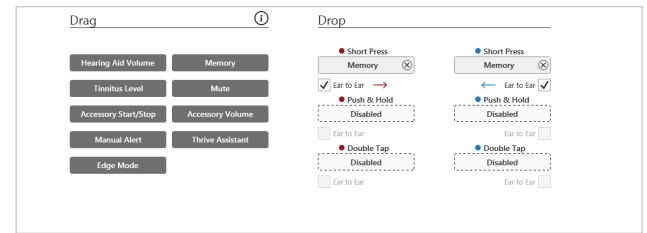


Figura 2

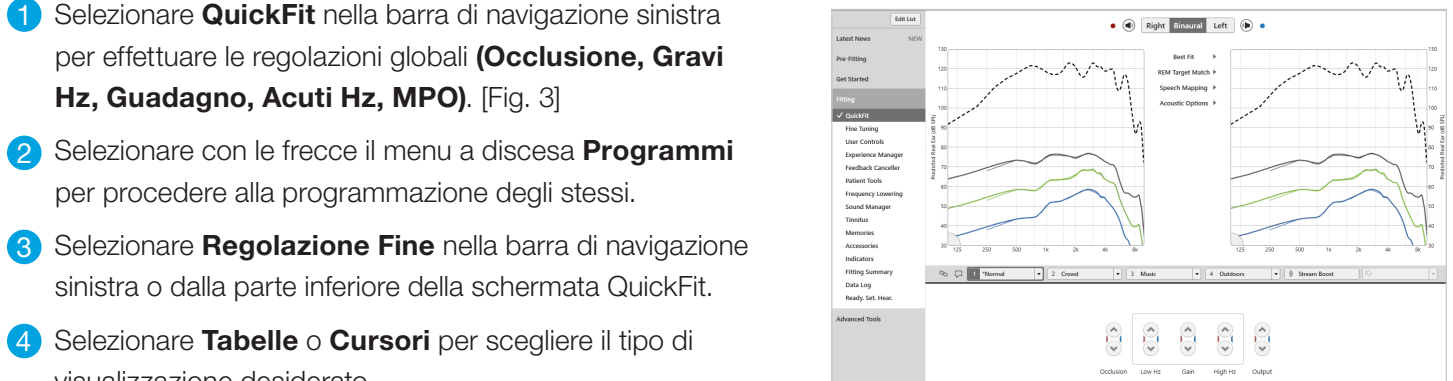


Figura 3

## Strumenti per il paziente

Selezionare **Programmazione Remota** in Strumenti per il paziente per abilitare la programmazione remota. Fare clic sulla **casella di controllo** accanto a Programmazione remota. Quindi fare clic su **Accetta** dopo aver esaminato l'avviso di divulgazione con il paziente. Quindi, fare clic sull'icona del generatore di codice per generare un codice univoco affinché il paziente possa accedere all'app Thrive Hearing Control per consentire l'accesso alla programmazione remota. [Figura. 4]

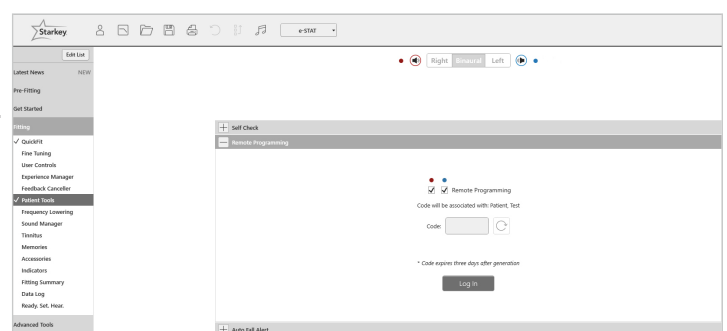


Figura 4

## Strumenti per il paziente (Continuo)

Selezionare **Avviso di caduta automatica** in Strumenti paziente per modificare la sensibilità di rilevamento cadute e completare lo screening del rischio di caduta con il paziente. Fare riferimento ai QuickTIP degli avvisi di caduta per le istruzioni complete sul completamento dell'installazione e dell'uso. Si noti che l'Avviso di caduta automatica è disponibile solo per gli apparecchi acustici Edge AI. [Figura. 5]

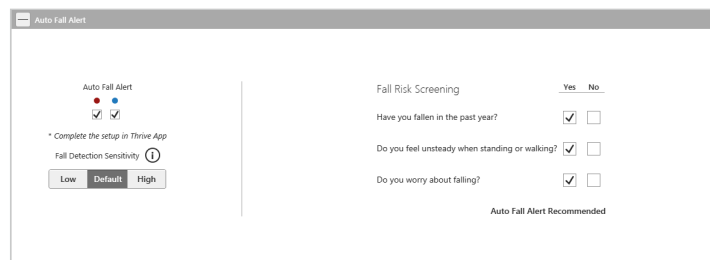


Figura 5

## Modifiche aggiuntive

Fare riferimento alla libreria QuickTIP per ottenere ulteriori informazioni sulle varie funzioni, come Sound Manager, Tinnitus e Abbassamento Frequenziale.

## Indicatori

Selezionare **Programmi** nella barra di navigazione sinistra o al centro di tutte le schermate di fitting.

- 1 Tramite le **frecche** estendere il menu a discesa **Programmi**, quindi, scegliere quelli da programmare.
- 2 Se si desidera configurare un **programma per la Musica**, fare riferimento alla QuickTip “Programma Musica”.
- 3 Gli **Indicatori Vocali** possono essere personalizzati. (Vedi Indicatori alla pagina seguente).
- 4 Come impostazione predefinita la barra del programma visualizza l'ambiente di ascolto selezionato (ad esempio, “Esterno”). Selezionare il **simbolo con il fumetto** per cambiare il nome sul display con quello dell'indicatore vocale configurato (ad esempio, il programma “Esterno” verrà visualizzato come “Golf”). [Fig. 6]

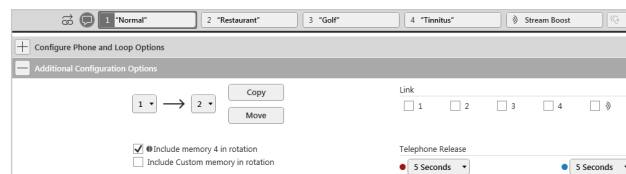


Figura 6

## Accessori

Selezionare **Accessori** nella barra di navigazione sinistra per configurare i nuovi accessori Starkey Hearing Technologies. Fare clic sull'**icona Informazioni** per consultare le istruzioni specifiche circa l'associazione dei vari dispositivi. Una volta effettuato l'associazione, regolare il comportamento del **microfono dell'apparecchio acustico durante lo streaming** per gli vari Accessori Streaming (Dispositivo TV Starkey Hearing Technologies, Microfono a Remote+ o Mini Microfono Remote) e configurare il **tasto Preferiti** del telecomando. [Fig. 7]

*Fare riferimento ai QuickTIP degli accessori wireless a 2,4 GHz per ulteriori informazioni*

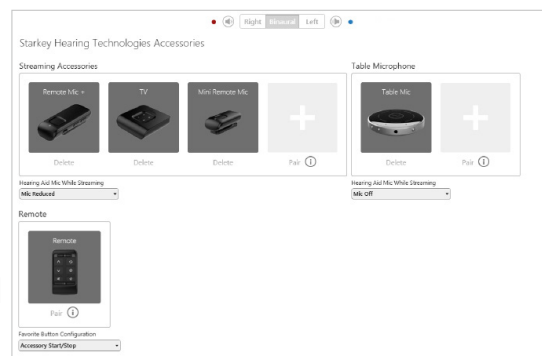


Figure 7

## Indicatori

Selezionare **Indicatori** dalla barra di navigazione sinistra.

- 1 Selezionare o deselezionare le caselle per attivare o disattivare i rispettivi indicatori.  
**NOTA:** *Gli indicatori di volume possono essere abilitati o disabilitati singolarmente.*
- 2 Selezionare **Regola tutti gli indicatori** per aumentare o diminuire il livello di volume per tutti i tipi di indicatori: Toni o Voce/Suoni con incrementi di 5 dB oppure per cambiare la lingua degli avvisi vocali.
- 3 Selezionare i **nomi dei singoli indicatori** per regolare il livello di volume ed il tipo di segnale prescelto ogni indicatore. Selezionare l'icona dell'apparecchio acustico per riprodurre l'indicatore direttamente attraverso i dispositivi oppure scegliere l'icona del computer per riprodurlo, a scopo dimostrativo, attraverso gli altoparlanti del pc.
- 4 Selezionare **Programma/Home** per configurare gli Indicatori Vocali, specifici. Come impostazione predefinita, quando i programmi sono abilitati, l'indicatore vocale corrisponderà all'ambiente di ascolto selezionato (ad esempio, l'utente sentirà la parola "Esterno" quando passa al programma dedicato all'Esterno). Selezionare la freccia per espandere il menu a discesa sotto Stimolo e cambiare l'indicatore vocale (ad esempio, l'utente ha l'opzione possibilità di sentire la parola "Golf" quando passa al programma Esterno.) [Fig. 8]

**NOTA:** *Se si desidera, gli indicatori Personalizzati e Stream Boost possono essere disattivati.*



Figure 8

## Riassunto Adattamento

Selezionare **Riassunto Adattamento** dalla barra di navigazione sinistra. [Fig. 9]

Selezionare **Dettagli** per modificare lo stato delle funzioni, se necessario. Nei dettagli, in pratica, compaiono dei collegamenti ipertestuali che consentono di accedere alle schermate per la regolazione delle varie funzioni.

Selezionare il menu a discesa per Accensione/Spegnimento automatico in **Stato** per consentire agli apparecchi acustici di passare automaticamente in modalità sospensione quando non vengono utilizzati. Questa funzione è disponibile solo per gli apparecchi acustici AI.

Selezionare **Stampa** per generare la reportistica sul Fitting, la reportistica sul Data Log e/o la Guida Dispositivo per il paziente, che riassume tutte le informazioni importanti per la gestione dei suoi apparecchi acustici, come la regolazione del volume, i programmi in memoria e gli indicatori vocali che sono stati abilitati. All'interno della schermata di stampa è possibile scegliere la Guida Dispositivo nelle varie lingue disponibili.

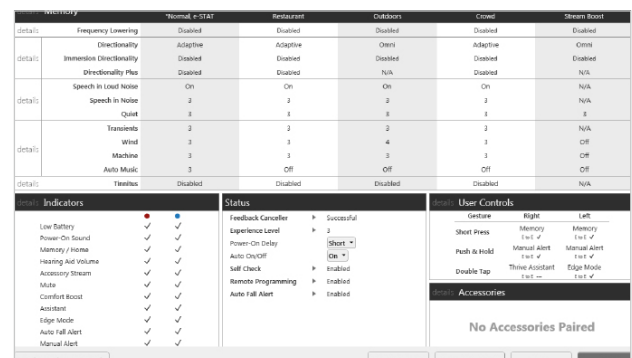


Figure 9